

品名：NW ストレッチャー

品番：ANS

使用方法

- ・傷病者及び患者をストレッチャーの上に寝かせ、脚袋に脚部を収納し両側から黒いベルトをつかみ、周囲の安全を確認し3名～6名で搬送して下さい。
- ・3名で搬送の際は、傷病者及び患者の上半身を左右両側から包み込むように、黒いベルトの持ち手を2名がつかみ、残る1名は脚部側の黒いベルトをつかみ搬送して下さい。より水平に近い状態での搬送になります。
- ・4名で搬送の際は、傷病者及び患者の膝の部位と脚袋の部位の黒いベルトの持ち手を2名がつかみ、他2名で頭部と胸部の黒いベルトをつかみ搬送して下さい。より水平に近い状態で重量が分散し、より搬送者の安全を確保できます。
- ・5～6名で搬送の際は、傷病者及び患者の膝の部位と脚袋の部位の黒いベルトの持ち手を2～3名がつかみ、他2～3名で頭部と胸部の黒いベルトをつかみ搬送して下さい。より水平に近い状態で重量が分散し、より搬送者の安全を確保できます。

狭所での搬送

- ・NW ストレッチャーを二つ折りにし、両側から4名で黒いベルトの持ち手をつかみ搬送して下さい。座位に近い体位での搬送になります。

※使用上のご注意

- ・上半身部分を激しく上下に揺らさないでください。
また、生地や縫製部分破損の際は、直ちに使用を中止してください。
- ・保管の際は水に濡れる可能性のある場所、高温多湿の場所を避け保管して下さい。
- ・水に濡れた状態での使用はしないで下さい。
- ・ディスプレイザブル（使い捨て）の製品ですので、2回以上の使用をしないでください。