## MATSUYOSHI

## マツヨシ ノンラテックス駆血帯


- ●チューブは腕に結びやすく、ほどけにくいポリウレタン製。
- ●従来の天然ゴムの質感を再現しています。
- ●ラテックスフリーですので安心です。

■品番: MY-5700

■サイズ:チューブ= *ϕ* 8.4×400mm

■材質:金具=真鍮、チューブ=ポリウレタン

## 【チューブの取り付け方法】

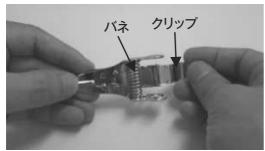

①金具を裏返しにして、バネからク リップを右に開いて「パチン」と 外します。



②クリップの下の方からチューブを 通します。



③チューブが 1 cm程度出るところ までチューブを差し込んでくださ い。



④チューブを挟んだままクリップを もう一度バネに「パチン」と引っ掛 けて完成です。



