

# Mysco マイスコ スライディンググローブ

## スムーズな移乗をサポートするスライディンググローブです

- 表面にはすべりやすい特殊加工を施しているため体の下に簡単に手を差し込めます。
- 裏面にはすべりにくい特殊加工を施しているためグローブが抜けにくく、操作性を保てます。
- 体位変換、ベッド上での移動・背ぬき、ポジショニング時の体圧確認、寝具・衣類のしわ伸ばしに。
- 日本製。

### 【使用方法】

- 体重のかかっている部分に手を差し込み、体を滑らせて使います。
- 介助者の腰への負担を避けるため、腕だけの介助を避け、体全体で介助してください。



### マイスコ スライディンググローブ

コード	品番	入数	価格(税抜)
① 24-4219-00	MY-7350	2枚	¥1,780

●サイズ: 170 × 480mm

●材質: ナイロン

●取り扱い: 洗濯○(弱・40℃以下)、乾燥機×



4 535847 003427

### 【使用上の注意】

- 本製品は滑りやすいので取扱には十分ご注意ください。
- 通路や床などに放置しないでください。
- ベッド・寝具上での体位変換・移乗等の使用目的以外には使用しないでください。
- 洗濯には中性洗剤をご使用ください(漂白剤や柔軟剤は使用しないでください)。
- ドライクリーニングをご遠慮ください。
- 熱湯での洗濯はしないでください。
- 乾燥機やアイロンは使用しないでください。
- 風通しのよい日陰で干してください。

<販売元>



松吉医科器械株式会社

<https://www.matsuyoshi.co.jp>

