


## マツヨシ診察台 取扱説明書

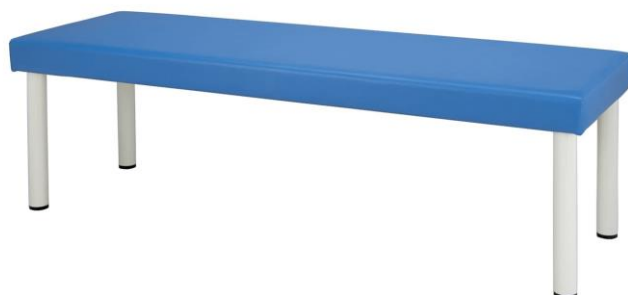

品名	マツヨシ診察台
製品サイズ	W600～700×L1800×H500～600mm
重量	約19～23kg
材質	フレーム＝スチール マット＝ウレタンフォーム 張地＝ビニールレザー
耐荷重	100kg

### <取扱注意事項>

⚠ 本製品は、組み立てのために、13mmのスパナが必要になります。

● 本製品は、診察以外の目的でご使用をお控えください。

（1人用になります）

● マッサージ等、重量のかかる治療を行う場合は、他の機種をお選びください。

● 使用前に必ず点検し、異常がある場合は必要な処置を行い、万一の場合には、ただちにご使用をお控えください。

● ご使用は平らな安定した場所でお使い下さい。

● 診察台をゆすったり、脚に斜めの重みがかかるような行為はお控えください。

● 改造、分解は行わないでください。

### <組み立て方法>

1, 診察台天板の裏側の角に脚パイプの取り付け用金具が取り付けしておりますので、受け金具のボルトを緩め脚パイプを差し込んでください。

2, 脚パイプを奥まで十分に差し込み、ボルトをしっかりと締め固定してください。

3, 脚パイプが取り付けられましたら診察台をゆっくりと起こし、ぐらつきがないことを確認してください。

❗ 必要に応じて、アジャスターで段差の微調整をしてください。

【販売元】



松吉医科器械株式会社

〒113-8520 東京都文京区湯島3-14-9 湯島ビル3階  
TEL:03-5816-8819（音声ガイダンス）