

製品をご使用の前に、必ず取扱説明書をよくお読みいただき正しくご使用ください。


【注意事項】

- ◆「マツヨシ アームプロテクター」は、患者様に爪を立てられたり、噛まれた際に前腕および上腕部を守る事ができる腕用のプロテクターです。
- ◆本製品を目的以外の用途では使用しないで下さい。
- ◆本製品を使用する前に破損や異常が発生していないか、ご使用前に必ず点検して下さい。
破れ・ほつれ・損傷が有る場合は、直ちに使用を中止して下さい。

- ◆無断で本製品を加工・改造・修理等を行わないで下さい。
本製品の機能低下を招き、事故の原因となります。
- ◆お手入れ方法をご確認の上、適切に行って下さい。
また、製品の状態に応じて、定期的な買い替えをおすすめします。

【マツヨシ アームプロテクター MY-TK3000(2コイリ)】

◆本体

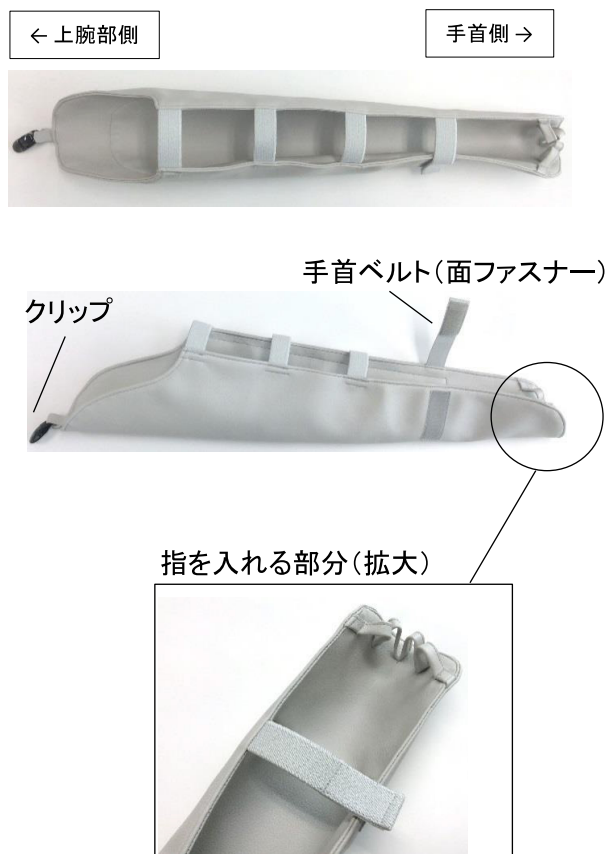

◆装着方法

- ①腕を本体の先端まで入れる。



- ②先端のループに指を通し、手首ベルトを留める。




- ③衣服にクリップで留める。



◆クリップの使い方

- ①クリップの両端を持って折ります。
※上下関係なく折ることができます。

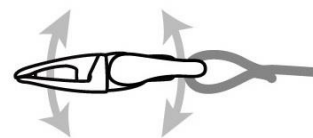

- ②クリップの口が開くので、衣服をはさみ、クリップを平らな状態に戻して使用します。



◆お手入れ方法

- ・汚れた際はアルコールや水、中性洗剤等で拭き、水分が残らないよう十分に乾燥させて下さい。
- ・洗濯機、脱水機、乾燥機はお使いいただけません。

【販売元】

松吉医科器械株式会社

住所: 東京都文京区湯島3-14-9 湯島ビル3F

TEL: 03-5816-8819 (音声ガイダンス) FAX: 0120-024432