

FitTex フィットテックス 取扱説明書

清拭タイプ SA-1020シリーズ

マットレスを正しくお使いいただくためにシーホネンスからのお願い

このたびは、フィットテックスをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書には、ご使用上の注意事項や使用方法が記載されています。
- ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになって、正しくお使い下さい。
- このマットレスを使用される方ばかりでなく、付き添いの方もこの取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後も、いつでも見られる場所に大切に保管してください。
- ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店にお問合せください。

安全にお使いいただくために

警告 この表示の説明は、危険行為ですので必ず守って下さい。守らなければ生命にかかわるケガを負う可能性が想定されます。

- 体の挟み込みに注意してください
頭や腕、足をはさんで大変危険です。
ベッドとサイドレールや介助バーの隙間に頭や腕、足を挟まれないようにしてください。
とくにベッドの操作時には、ご注意ください。
- うつぶせ寝はしないでください
カバーには通気性がありませんので、長時間うつぶせ寝をすると窒息する恐れがあります。
- ベッドからの転落に十分注意してください
サイドレール使用時にもサイドレールの上から身をのり出して転落し、ケガをする恐れがあります。



注意 以下の項目は、全て危険行為ですので必ず守って下さい。守らなければケガを負う可能性や物品的損害の発生が想定されます。

- 表・裏を正しく設置して使用してください
このマットレスは、表と裏があります。カバーに商品名「Fit Tex (フィットテックス)」と印刷されたほうが表です。表が上になるように設置してください。表・裏を正しく設置しないとマットレスの本来の性能が発揮されません。
- マットレスの上に厚手の敷物などを置かないでください
マットレス本来の性能を発揮できません。
- 火気に近づけないでください
火気、または高温になるものを近づけないでください。変形、変質、発火などの原因となります。
- 冷却作用（氷まくらや保冷剤など）のあるものを直接乗せないでください
このマットレスが冷えると内部で結露が起り、ウレタンフォームが劣化するおそれがあります。
- マットレス洗浄機、オートクレーブ、オゾン滅菌器などを使用しないでください
マットレスが変質・破損するおそれがあります。
- 弊社指定以外の製品とは組み合わせないでください
このマットレスには、必ず弊社のベッドを組み合わせるようお願いいたします。他社製ベッドは、寸法が適合せずマットレス本来の性能が活かせません。また、マットレスに負担をかけ、ケガをしたり、破損するおそれがあります。
- ファスナーが開いた状態では使用しないでください
開いているファスナーから水分などが浸入すると、ウレタンフォームが劣化するおそれがあります。
- カバーの洗濯はできません。
カバー表面が破損、劣化するおそれがあります。本書の「お手入れについて」を参考に、清拭してください。
- クッション材やカバーを強く引張ったりしないで下さい。
クッション材やカバーが破損するおそれがあります。
- お客様による修理・改造はしないでください
思わぬケガや故障の原因になります。
- 人が乗ったまま移動させないでください
転落してケガをしたり、クッション材やカバーが破損するおそれがあります。



シーホネンス株式会社

仕様

品番	SA-1021	SA-1023	SA-1024	SA-1021	SA-1023	SA-1024	SA-1021	SA-1023	SA-1024	SA-1021	SA-1023	SA-1024
	SS			S			M			L		
幅・厚み (mm)	(幅) 730・(厚み) 80			(幅) 780・(厚み) 80			(幅) 830・(厚み) 80			(幅) 900・(厚み) 80		
長さ (mm)	1810	1910	1950	1810	1910	1950	1810	1910	1950	1810	1910	1950
質量(kg)	4.7	4.9	5.0	4.9	5.1	5.2	5.2	5.4	5.8	5.5	5.8	5.9

材 質:クッション材=ウレタンフォーム/カバー=ポリウレタン(裏地:ポリエステル)

使用方法

●マットレスの設置について

このマットレスは、表と裏があります。カバーに商品名「Fit Tex (フィットテックス)」と印刷されたほうが表です。表が上になるように設置してください。表・裏を正しく設置しないとマットレスの本来の性能が発揮されません。

前後方向の向きはありませんので、適宜反転させてご使用ください。



注意 マットレスをご使用中は、ファスナーを開けないでください。ファスナーの破損や水分などの浸入によりクッション材が劣化するおそれがあります。

お手入れについて

●汚物(血液、便、尿など)の付着があれば除去してください。中性洗剤などを水で薄めたものでカバー表面を拭き、汚れを落としてください。天日干しは避けて自然乾燥させてください。

●消毒液でカバーの表面を清拭消毒してください。

消毒液は、必ず下記の薬品を、指定の濃度を守って使用してください。また、各消毒液の取り扱い方法に従って使用してください。

◎76.9%~81.4%:消毒用エタノール

◎50%~70%:イソプロパノール

◎0.05%~0.2%:次亜塩素酸ナトリウム

◎0.05%~0.2%:塩化ベンゼトニウム(ハイアミンなど)

◎0.05%~0.2%:塩化ベンザルコニウム(オスバンなど)

◎0.05%:グルコン酸クロルヘキシジン(ヒビデンなど)

上記以外の消毒液を使用すると、カバーの防水性能などの劣化や変色が生じるおそれがあります。

●マットレスは定期的に、清拭消毒してください。 その際、クッション材をぬらさないよう注意してください。

●カバーの洗濯は行わないでください。



注意 清拭消毒時は、ファスナーを必ず閉めて行ってください。開いているファスナーから水分などが浸入すると、クッション材が劣化するおそれがあります。揮発性のもの(シンナー、ベンジン、ガソリンなど)では拭かないでください。

販売店様へのお願い マットレスの品質維持のため、以下に注意してください。

1. 保管方法について

- 倉庫保管時は平面平置き、積重ねは10枚以内として下さい。
- 積み重ねる場合、同サイズで積み重ねて保管して下さい。
- 折曲げ、立掛けでの長期間放置は避けて下さい。
- 保管中のマットレス上に物を置かないで下さい。

- カビ防止のため、風通しの良い場所で保管して下さい。
- 零下20℃以下の低温にならない場所で保管して下さい。
- 近くに火気もしくは熱を持つものが無い場所で保管して下さい。

2. 保管場所について

- 日光、紫外線の当たらない場所で保管して下さい。
- 温度50℃以上、湿度80%以上にならない場所で保管して下さい。

3. 取り扱い方法について

- 運搬時は一部分を掴むのではなく、全体を抱き抱えるように持ち上げて下さい。
- 水濡れしないように注意して下さい。
- 手かぎ、カッターは使用しないで下さい。

保証書

品名/品番	Fit Tex フィットテックス	保証期間	お買い上げ日	年	月	日	より1ヶ年間
お客様	お名前	販売店	販売店名				
	住所		住所				
	TEL		TEL				

1. 1年間の保証期間に取扱説明書に従った正常な使用状況で破損した場合には、無償修理致します。

④本書の提示がないもの。

2. 保証期間内でも次の場合は有償になります。

⑤本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

①使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および破損がある場合。

②お買い上げ後の落下による事故および破損。

3. 本書は国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

③火災、地震、水害、落雷、その他天変地変による故障および破損。

4. 本書は再発行いたしませんので紛失しないようご注意ください。

商品に関する
お問い合わせ

シーホネンス・
カスタマーサポート



無料

ツール

福祉用具の日

0120-20-1001

受付時間 / 月曜~金曜 9:00~17:30
(土・日・祝日、夏期休暇、年末年始を除く)