

## 取扱説明書

### マツヨシ シャワーベンチ(背なし)

この度は本製品をお買い上げ頂き、誠に有難うございます。安全にご使用頂くため、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。お読みいただいた後はお手元に保管してください。



#### 製品仕様

品 名: マツヨシ シャワーベンチ(背なし)  
型 番: MY-1240  
サイズ: W478×D445×H350～524mm (25mm単位・8段階調節)  
重 量: 1.9kg  
耐荷重: 約100kg  
材 質: 足パイプ=アルミ合金  
座面=高密度ポリエチレン




#### 安全上のご注意

- 本製品は、本来の目的以外に使用しないでください。また、加工や改造など行わないでください。
- ご使用前に破損や変形などの異常が無いか必ず点検してください。異常が見られる場合は使用を中止してください。
- 耐荷重(約100kg)以上の無理な力がかからないようにご使用ください。破損や事故の原因に繋がる恐れがあります。
- 本製品の一部分に過度な荷重をかけないでください。転倒や破損に繋がる可能性があります。
- 平らな場所でご使用ください。凸凹のある不安定な場所に置くと転倒してけがをする可能性があります。
- 4本の伸縮パイプは同じ高さに調節してください。プッシュボタンが確実に穴に固定されていることを確認してください。  
尚、伸縮パイプの高さを調節する際は、指を挟まないように十分注意して行ってください。
- 利用者が座っている状態で持ち上げたり、引きずらないでください。重大事故に繋がる可能性があります。

#### お手入れ・保管方法





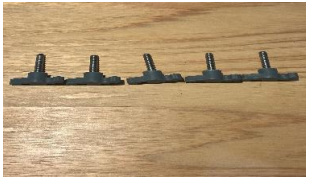
- ◎本製品をご使用後はシャワーで石鹸やシャンプーの泡を十分洗い流し、水気を拭き取り屋内で自然乾燥させてください。
- ◎汚れが落ちにくい場合、薄めた中性洗剤を柔らかいスポンジや布などに含ませ、拭き取ってください。  
汚れを取った後はきれいな水で洗剤を洗い流してください。洗剤を洗い流した後は乾いた布で拭きとるか陰干ししてください。
- ◎本製品に直接熱湯をかけて洗わないでください。変形する恐れがあります。
- ◎タワシ・研磨剤入りスポンジ・両面スポンジの固い面などはご使用にならないでください。また、塩素系洗剤・有機溶剤・クレゾールなどはご使用にならないでください。樹脂が劣化し、破損する恐れがあります。
- ◎直射日光があたる場所や高温な環境に保管しないでください。日陰で風通しの良い場所で保管してください。  
また、乳幼児の手の届かない所に保管してください。

#### 【発売元】

 松吉医科器械株式会社  
本社: 〒113-8520 東京都文京区湯島3-14-9  
TEL : 03-5816-8819(音声ガイダンス)

## 付属品一覧

当製品には下記①～⑤の部品が同梱されています。不足がないこと、破損など異常がないことをご確認ください。※不足品や不具合などがございましたら、お買い求めの販売店までご連絡ください。

番号	部品名	数量	番号	部品名	数量	番号	部品名	数量
①	足パイプ(下凹み)	1本	②	足パイプ(上凹み)	1本	③	座面	1枚
								
④	伸縮パイプ	4本	⑤	ネジ	5本			
								

## 組立方法

<b>ステップ1</b>		<b>足の取り付け①</b>		<b>ステップ2</b>		<b>足の取り付け②</b>	
座面(③)を裏返して、足パイプ(①)を溝に合わせます。				足パイプ(②)の窪みと足パイプ(①)の窪みをあわせ、ネジ(⑤)でしっかり固定してください。			
<b>ステップ3</b>		<b>足の固定</b>		<b>ステップ4</b>		<b>伸縮パイプの取り付け</b>	
残りの4ヶ所の穴をネジ(⑤)でしっかりと固定してください。				足パイプに伸縮パイプ(④)を挿入し、任意の高さに調節してください。			
<b>ステップ5</b>		<b>完成</b>					
組みあがった製品の座面や足にグラつきなどがなければ、完成です。							

## 取扱説明書

### マツヨシ シャワーベンチ(背付)

この度は本製品をお買い上げ頂き、誠に有難うございます。安全にご使用頂くため、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。お読みいただいた後はお手元に保管してください。



### 製品仕様

品 名: マツヨシ シャワーベンチ(背付)  
型 番: MY-1241  
サイズ: W478×D445×H665～840mm (25mm単位・8段階調節)  
重 量: 2.6kg  
耐荷重: 約100kg  
材 質: 足パイプ=アルミ合金  
背もたれ、座面=高密度ポリエチレン



### 安全上のご注意

- 本製品は、本来の目的以外に使用しないでください。また、加工や改造など行わないでください。
- ご使用前に破損や変形などの異常が無いか必ず点検してください。異常が見られる場合は使用を中止してください。
- 耐荷重(100kg)以上の無理な力がかからないようにご使用ください。破損や事故の原因に繋がる恐れがあります。
- 本製品の一部分に過度な荷重をかけないでください。転倒や破損に繋がる可能性があります。
- 平らな場所でご使用ください。凸凹のある不安定な場所に置くと転倒してけがをする可能性があります。
- 4本の伸縮パイプは同じ高さに調節してください。プッシュボタンが確実に穴に固定されていることを確認してください。  
尚、伸縮パイプの高さを調節する際は、指を挟まないように十分注意して行ってください。
- 利用者が座っている状態で持ち上げたり、引きずらないでください。重大事故に繋がる可能性があります。

### お手入れ・保管方法

- ◎本製品をご使用後はシャワーで石鹸やシャンプーの泡を十分洗い流し、水気を拭き取り屋内で自然乾燥させてください。
- ◎汚れが落ちにくい場合、薄めた中性洗剤を柔らかいスポンジや布などに含ませ、拭き取ってください。  
汚れを取った後にきれいな水で洗剤を洗い流してください。洗剤を洗い流した後は乾いた布で拭きとるか陰干ししてください。
- ◎本製品に直接熱湯をかけて洗わないでください。変形する恐れがあります。
- ◎タワシ・研磨剤入りスポンジ・両面スポンジの固い面などはご使用にならないでください。また、塩素系洗剤・有機溶剤・クレゾールなどはご使用にならないでください。樹脂が劣化し、破損する恐れがあります。
- ◎直射日光が当たる場所や高温な環境に保管しないでください。日陰で風通しの良い場所で保管してください。  
また、乳幼児の手の届かない所に保管してください。

### 【発売元】






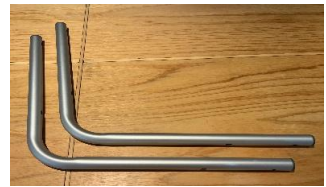





本社: 〒113-8520 東京都文京区湯島3-14-9  
TEL : 03-5816-8819(音声ガイダンス)


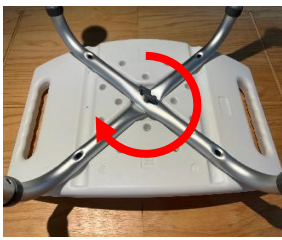

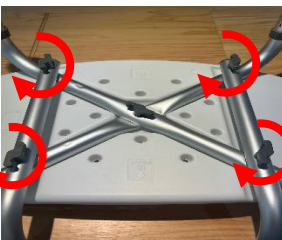



## 付属品一覧

当製品には下記①～⑨の部品が同梱されています。不足がないこと、破損など異常がないことをご確認ください。※不足品や不具合などがございましたら、お買い求めの販売店までご連絡ください。

番号	部品名	数量	番号	部品名	数量	番号	部品名	数量
①	足パイプ(下凹み)	1本	②	足パイプ(上凹み)	1本	③	座面	1枚
								
④	背もたれ	1枚	⑤	伸縮パイプ	4本	⑥	L型フレームブラケット	2本
								
⑦	短ネジ	5本	⑧	長ネジ	4本	⑨	ワッシャー	9枚
								

## 組立方法

ステップ1	足の取り付け①	ステップ2	足の取り付け②
座面(③)を裏返して、足パイプ(①)を溝に合わせます。		足パイプ(②)の窪みと足パイプ(①)の窪みを合わせ、短ネジ(⑦)でしっかり固定してください。	
ステップ3	背もたれの取り付け	ステップ4	足と背もたれの固定
背もたれ(④)の裏側とL型フレームブラケット(⑥)を合わせ、短ネジ(⑦)を使い、しっかりと固定してください。		ステップ2で組み立てた足部にステップ3で組み立てたL型フレームブラケット(⑥)を合わせ、ワッシャー(⑨)、長ネジ(⑧)の順で挿入し、しっかりと固定してください。	
ステップ5	伸縮パイプの取り付け	ステップ6	完成
足パイプに伸縮パイプ(⑤)を挿入し、任意の高さに調節してください。		組みあがった製品の座面や足、背もたれにグラつきなどがなければ、完成です。	