





取扱説明書

MATSUYOSHI マツヨシ エコノミーストレッチャー

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。ここに示した事項は安全にお使いいただくことにより、事故を未然に防止するためのものです。

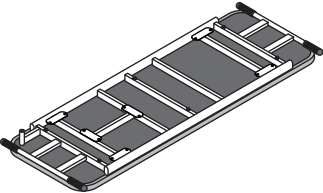

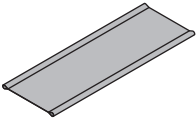

区 分	危険や損害の大きさと切迫の度合い
 警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定されます。



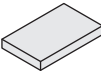

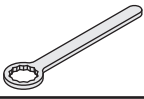
 警告	本製品を設置する際には、必ず平らでしっかりした床の上に設置してください。傾いた場所や段差のある場所に設置しますと本製品が転倒する恐れがあります。
	改造や分解修理は絶対にしないでください。事故・けがの原因となります。

 注意	ゆるみ、がたつき、傾き、音等に常に注意して、点検を行ってください。また少しでも違和感を感じたときはご使用を中止してください。
	本製品の用途以外には使わないでください。事故や故障の原因になります。
	ご使用中に異常な揺れが発生したら、使用を中止し、各部の締め付けボルトの再点検を行ってください。又、改善されない場合は、ご購入代理店にご相談ください。
	通常、キャスターは常温、構内で使用される事を想定しております。高温、低温、多湿、酸、アルカリ、塩分、溶剤、油、海水、薬品等の影響を受ける特別な環境でのご使用は避けてください。製品の劣化が進む恐れがあります。やむをえず、ご使用になる場合は個々の用途に合わせた金具、車輪、グリスが必要です。尚、材質により床面に汚染の恐れがあります。
	キャスターは消耗品のため、劣化、破損等の不具合が生じた場合は、ただちに交換してください。
	アジャスターゴム、脚部キャップ及びキャスターの樹脂等によって、床材と床の表面処理材（ワックス等）が化学反応を起こし、変色する恐れがあります。設置場所等には十分ご注意ください。よろしくお願いいたします。

部品一覧表

● 最初に下記の部品が揃っているかご確認ください。

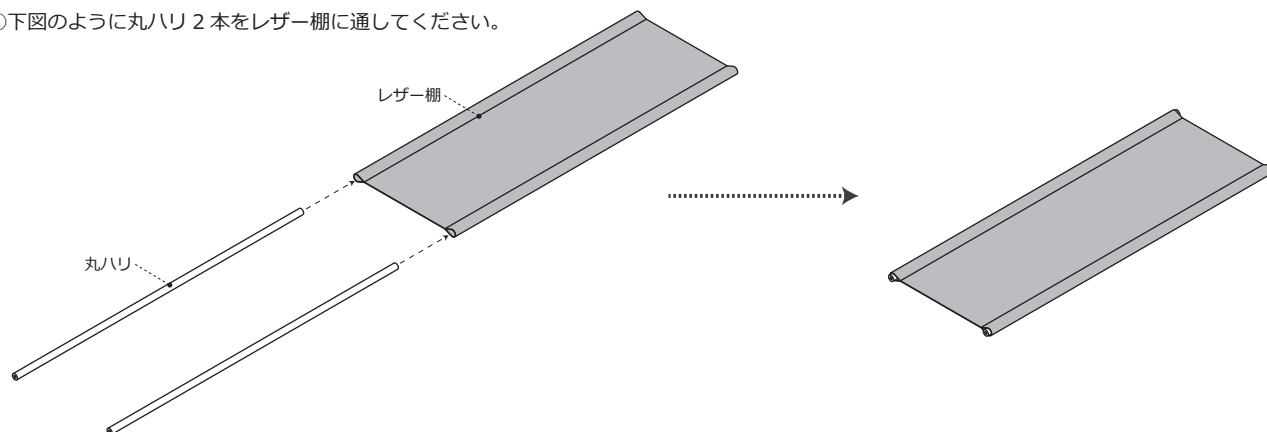
部 品 図	部 品 名	個 数	部 品 図	部 品 名	個 数
	座シート	1		脚部	2
	レザー棚	1		丸ハリ	2

六角セムス (小)	六角セムス (大)	パッキンクッション	ボルトキャップ	スパナ
				
8	4	4	12	1

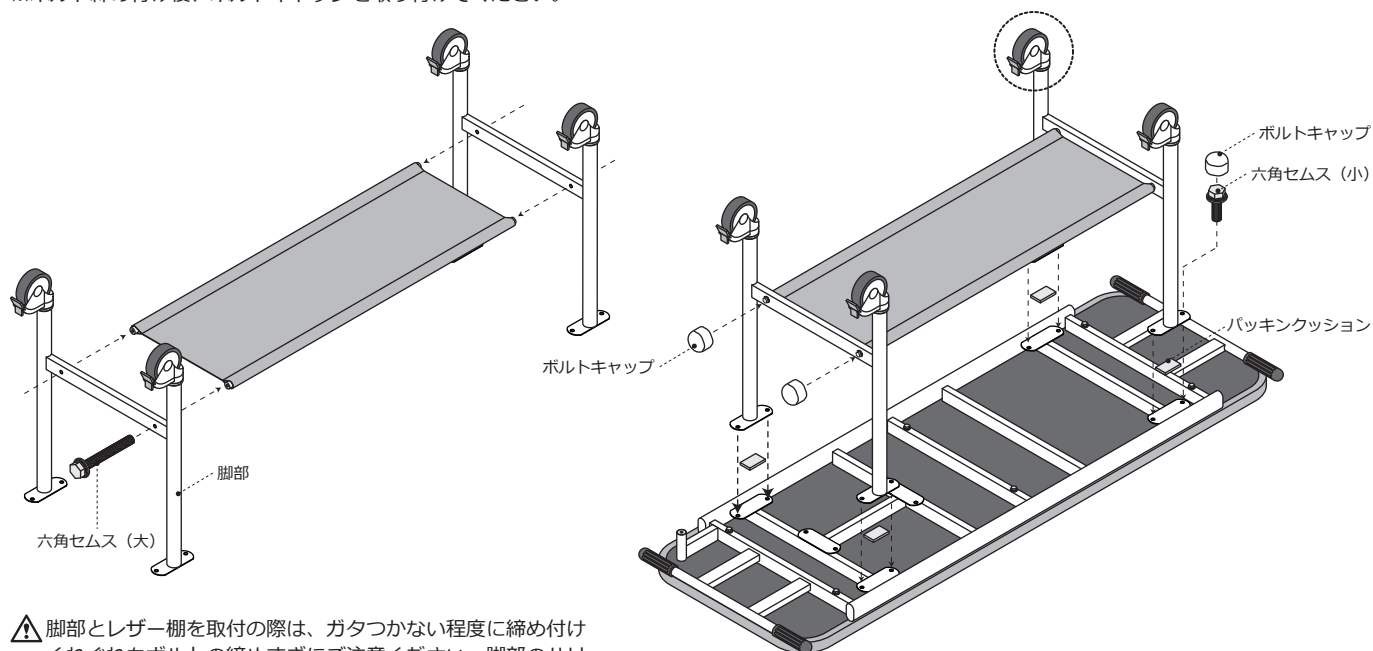
組立方法

● 組立時間：約 20 分

①下図のように丸バリ 2 本をレザー棚に通してください。



②下図のように、座シート・脚部・レザー棚を取り付けてください。
※全てのボルトを仮止めし、その後付属のスパナで本締めしてください。
※ボルト締め付け後、ボルトキャップを取り付けてください。



⚠ 脚部とレザー棚を取付の際は、ガタつかない程度に締め付けくれぐれもボルトの締めすぎにご注意ください。脚部のバリが変形する可能性があります。



【ベッドを動かす場合】

キャスター（4箇所）のストッパーを解除してください。
キャスターの回転・旋回共に解除され、ベッドを移動できます。

【ベッドを固定する場合】

キャスター（4箇所）のストッパーをロックしてください。
キャスターの回転・旋回共にロックされ、ベッドが固定されます。

【発売元】

 松吉医科器械株式会社
<https://www.matsuyoshi.co.jp>