

Mysco

マisco シリコン駆血帯(小児用)

- チューブは腕に巻きやすい軟らかなシリコン製。
- オートクレーブ滅菌可能(121℃まで)。
- ラテックスフリーですので安心です。

■品番：MY-5755


■サイズ：チューブ=φ6.0×400mm

■材質：金具=真鍮、チューブ=シリコン

01 ピンク



[チューブの取り付け方法]

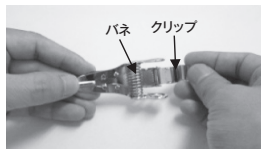

- ①金具を裏返しにして、バネからクリップを右に開いて「パチン」と外します。



- ②クリップの下の方からチューブを通します。



- ③チューブが1 cm 程度出るところまでチューブを差し込んでください。



- ④チューブを挟んだままクリップをもう一度バネに「パチン」と引っ掛けて完成です。

<発売元>

松吉医科器械株式会社

<http://www.matsuyoshi.co.jp>