

# 取扱説明書

## ホスピタル耳栓

この度は当製品をお買い上げ頂き、誠に有難うございます。安全にご使用頂くため、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みいただいた後はお手元に保管してください。



### 《付属品の確認》

当製品には下記の物が同梱されています。不足がないこと、破損など異常がないことをご確認ください。

【透明コンテナ、ハカマ、耳栓1袋(500ペア)、ネジ位置決め用紙、ネジ3本、ボードアンカー3本】

※不足品や不良品がございましたら、お買い求めの販売店までご連絡ください。

### 《製品の仕様》

カタログコード : 24-5015-00

品 名 : 耳栓ディスペンサーセット

材 質 : 本体=ABS樹脂・ポリプロピレン、耳栓=弾性ポリウレタン

サ イ ズ : 217×170×600mm

重 量 : ディスペンサー=1,354g・耳栓(500ペア)=520g

### 《組立方法》

- ① 耳栓の袋を開封し、透明コンテナに入れてください。
- ② プッシュボタンを押し、ハカマが下向きになるよう回転させてください。
- ③ 透明コンテナ両側の凹部分とハカマの凸部分を合わせ、透明コンテナを右に回して取り付けてください。
- ④ 透明コンテナが上にくるように、ハカマが固定されるまで回転させてください。
- ⑤ 取り出しノブを左右に回すと耳栓がでえます。



### ※壁に取り付ける場合

付属のネジを壁に打って、ディスペンサーを壁に掛けることができます。

同梱の『ネジ位置決め用紙』の十字マークで3ヶ所のネジの位置を決め、ネジを壁から8mm程度出るまで回してください。ハカマの背面に3ヶ所穴がありますので、ネジの位置をあわせて引っ掛けてください。

石膏ボードに取付けする場合はボードアンカーをご使用ください。

販売元

松吉医科器械株式会社

<http://www.matsuyoshi.co.jp>

本社: 〒113-8520 東京都文京区湯島3-14-9 湯島ビル3階

TEL : 03-5816-8819(音声ガイダンス) FAX: 0120-024432

E-Mail: [info@matsuyoshi.co.jp](mailto:info@matsuyoshi.co.jp)