

取扱説明書

製品を安全にご使用いただくために、この取扱説明書よくお読みになり、お読みいただいた後はお手元に必ず保管してください。

⚠ 注意


取り扱いを誤った場合に、人が怪我を負ったり財産に損害を受ける恐れがある内容を示しています

- 本製品は、本来の目的以外に使用しないでください。また、加工や改造など行わないでください。
- ご使用前に破損や変形などの異常が無いかな必ず点検してください。異常が見られる場合は使用を中止してください。
- 火気を近づけないでください。溶解や変形する恐れがあります。
- 使用後は必ず洗浄し、よく乾燥させてから保管してください。
- 必ず、被介護者の体調の変化を観察しながら、ご使用ください。
- 耐熱温度以上での滅菌や洗浄はお控えください。
- 乾燥の際は、ドライヤーや熱風乾燥機を使用しないでください。
- 幼児の手の届かない所に保管してください。

【製品仕様】

- ・本製品は、薄型で差し込みやすい形状です。
- ・ポリプロピレン製で軽量です。
- ・オートクレーブ滅菌(121℃、20分以内)が可能です。

- 寸法：本体=W240×D375×H30mm
- 容量：800cc
- 重量：約350g
- 材質：ポリプロピレン
- 耐熱温度：121℃（オートクレーブ滅菌、ベッドパンウォッシャー可）

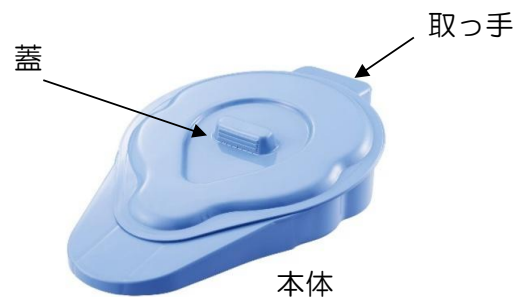

■使用方法

- 飛散防止や後始末を容易にするため、トイレットペーパーを敷いてからご使用ください。
- 被介護者の腰を浮かし、本製品を差し込んでください。
- 排泄後、被介護者の陰部を清拭タオルなどで拭き取り、部屋の換気を行ってください。

■保管方法

- 菌の繁殖や臭いの原因になりますので、ご使用後は必ず洗浄・消毒し、よく乾燥させてください。
- 乾燥の際は、風通しのいい直射日光のあたらない場所で陰干ししてください。

（発売元）

 松吉医科器械株式会社

<https://www.matsuyoshi.co.jp>