

KA-P70RA・P70RB・P70RC・P70RC1

保証書付

抑制帯受

まえがき

このたびは抑制帯受をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。


この「取扱説明書」には、抑制帯受を安全にお使いいただくための注意事項と取付方法などを記載しています。

- 抑制帯受をお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」、抑制帯の「取扱説明書」および適合するベッドの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- 抑制帯受を使用する方ばかりでなく、付き添いの方や介護する方もこの「取扱説明書」をよくお読みください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- この製品は、改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
- 動作範囲・寸法・角度・質量などの数値の記載がある場合、その数値には多少の誤差が含まれます。特別なものを除きこの「取扱説明書」では、表示を見やすくするため、約・およそといった言葉を省略しております。
- ご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。

使用目的

■この抑制帯受は、睡眠中や昏睡状態などの使用者の転落予防のため、抑制帯をベッドに容易に取付け可能にすることを目的に作られています。

<メーティスPROシリーズの場合>

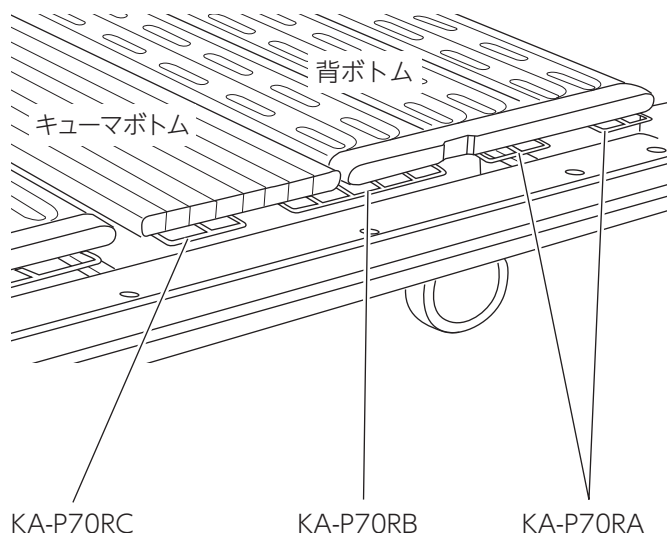


KA-P70RC

KA-P70RB

KA-P70RA

<エスパシアシリーズ・KA-N1000シリーズの場合>

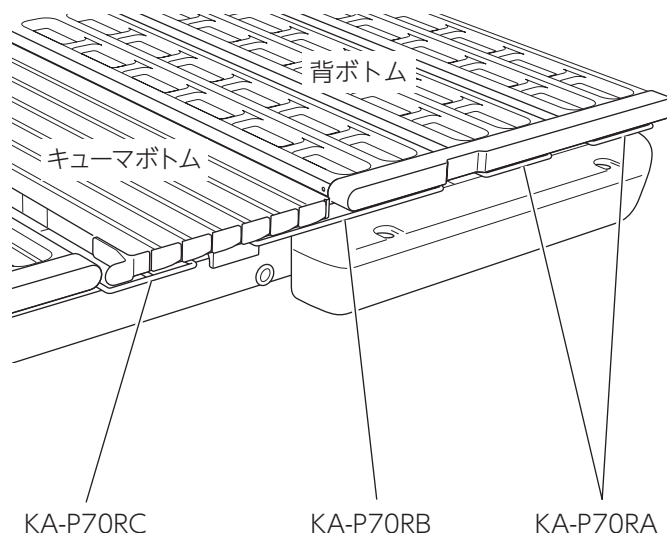

KA-P70RC

KA-P70RB

KA-P70RA

※エスパシアシリーズ・KA-N1000シリーズは、KA-P70RCを取付ける際にKA-70RC1が必要になります。

安全に使用するための注意事項



この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷(骨折・圧迫・麻痺など)を負う可能性が想定される内容を示しています。

■抑制帯受に抑制帯を取付けた状態で、背あげや膝あげなどのベッド操作を行わないでください

- 使用者の身体が締付けられてけがをしたり、ベッドが破損・変形したりするおそれがあります。
- 使用者や付き添いの方などが手元スイッチに触れる可能性がある場合には、次のいずれかの方法により操作を制限し、誤操作による事故を未然に防いでください。
 - ・手元操作禁止スイッチで操作を禁止する。(設定方法はベッドの取扱説明書をご覧ください)
 - ・電源プラグを抜く。
- 手元操作禁止スイッチで操作禁止を設定している場合でも、リセットスイッチを押すとすべての操作ボタンが操作可能な状態に戻ってしまいますのでご注意ください。意図せぬベッドの動作により、けがをするおそれがあります。(詳細はベッドの取扱説明書を参照してください)

■ベッドの操作中はベッドのフレームと抑制帯受の間などに手(指)や足などを入れないでください

- さがってきた抑制帯受とベッドのフレームなどのすき間にはさまれて、けがをするおそれがあります。

■お客様による修理・改造はしないでください

- 思わぬけがや破損の原因となります。

■抑制帯をお使いになる前に、抑制帯の取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください

- 思わぬけがをするおそれがあります。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷(打撲・すり傷・切り傷など)を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

■破損した場合は使用を中止してください

- 抑制帯が適切に固定できず、思わぬけがをするおそれがあります。


■ベッドメイキングなどの際は、抑制帯受に手をぶつけないように注意してください

- 手・指が当たり、けがをするおそれがあります。



各部の名称と部品の確認

■開梱後、下記の部品がすべて揃っていること、破損していないことを確認してください。万一、部品の不足や破損があった場合には、販売店または直接弊社までご連絡ください。

●KA-P70RA

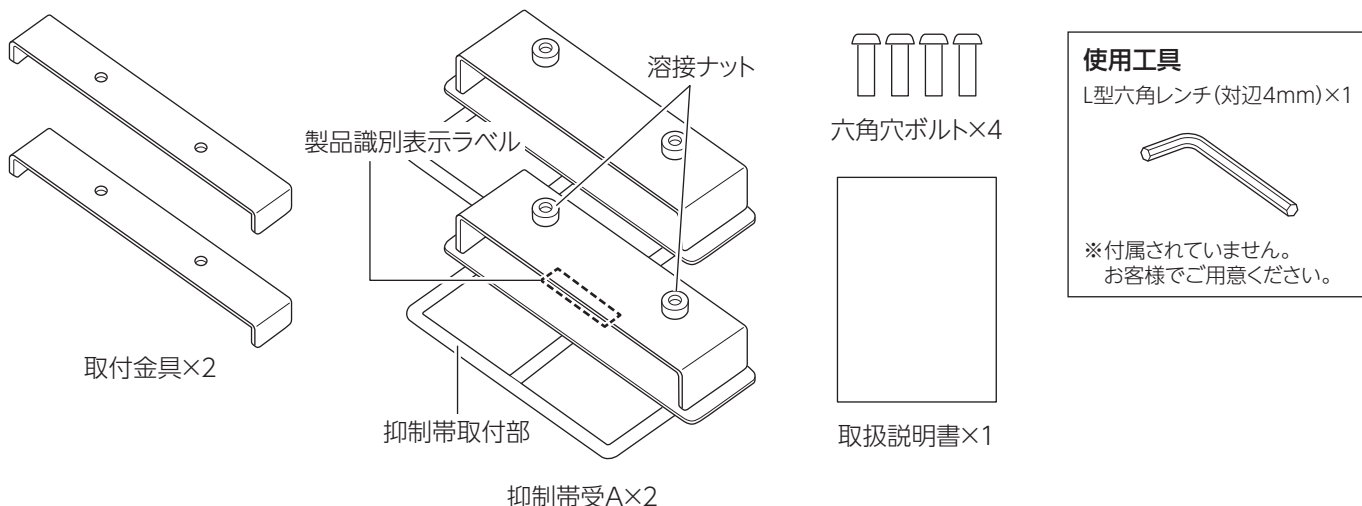


●KA-P70RB

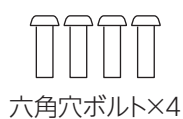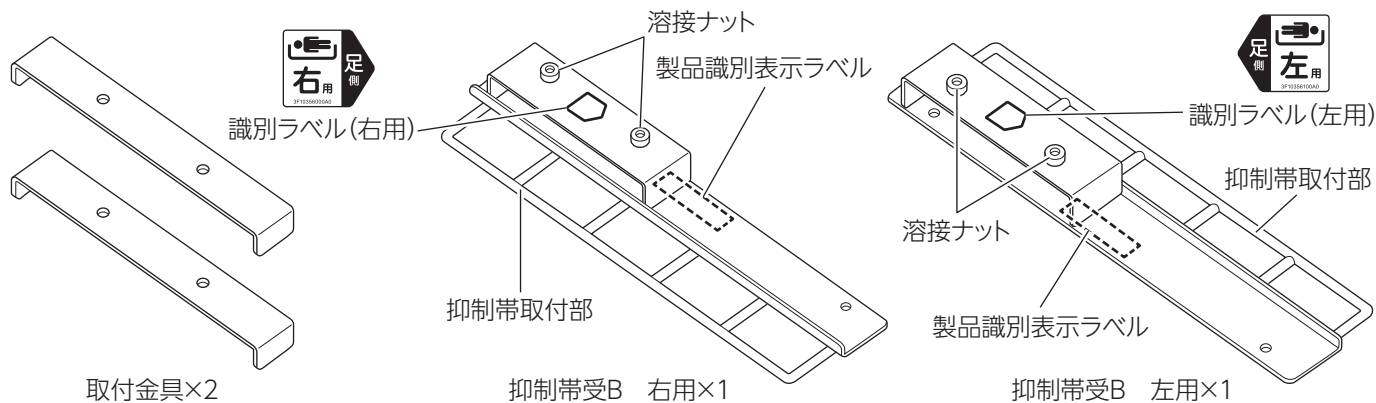



使用工具

L型六角レンチ(対辺4mm)×1

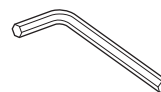


※付属されていません。
お客様でご用意ください。

●KA-P70RC

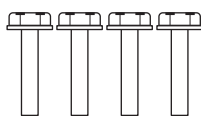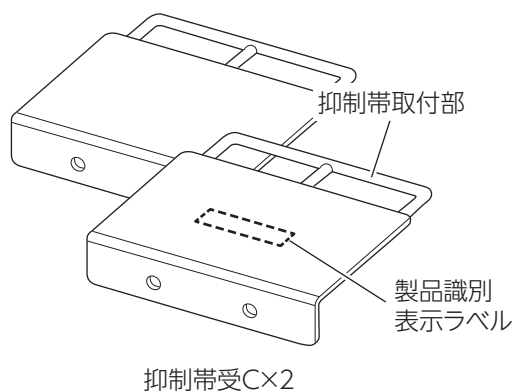

ボルト×4

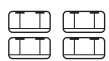


ナット×4



使用工具


スパナ(対辺13mm):2本

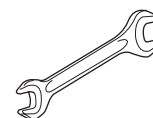

※付属されていません。
お客様でご用意ください。

●KA-P70RC1


エスパシアシリーズ・KA-N1000シリーズにKA-P70RCを取付ける際、必要となるオプション品です。

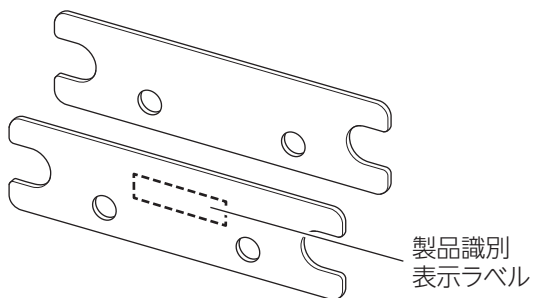

抑制帯受の取付位置


■抑制帯受は以下の位置に取付け可能です。

<メーティスPROシリーズ>

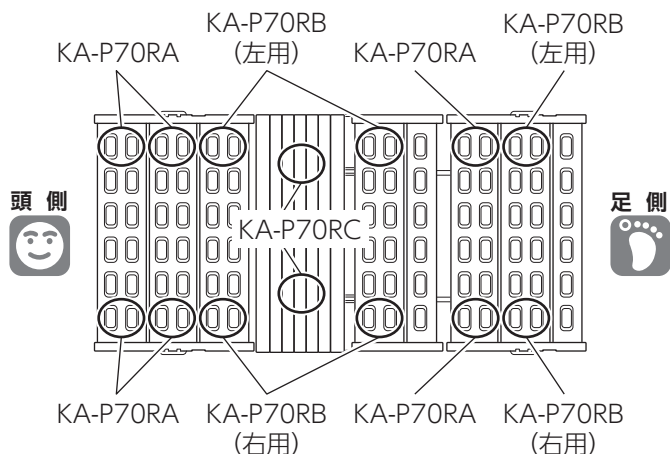

<メーティスシリーズ・KA-4000シリーズ*1>


*1: 2016年8月以降製造分が対象です。

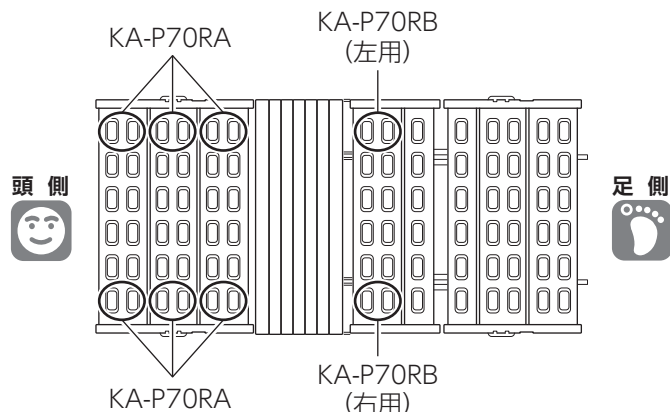


※イラストはメーティスシリーズです。

<KA-5000シリーズ*2・アルデコラシリーズ・ウッディーシリーズ・ドージェシリーズ>

*2: 78cm幅仕様を除く

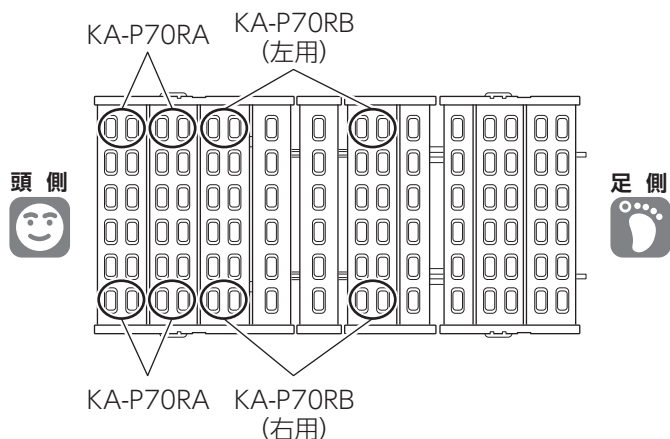


<カリストエールシリーズ・KA-30000シリーズ>

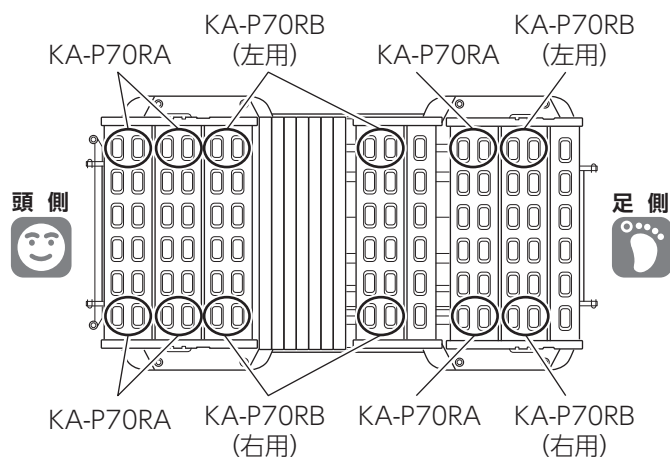


<スタンダードベッド・KA-5000シリーズ(78cm幅仕様)*3・アルフォーネシリーズ*3・*4>

*3: 2016年10月以降製造分が対象です。

*4: デジタルスケール付機種 (KA-8341A・KA-8341) を除く

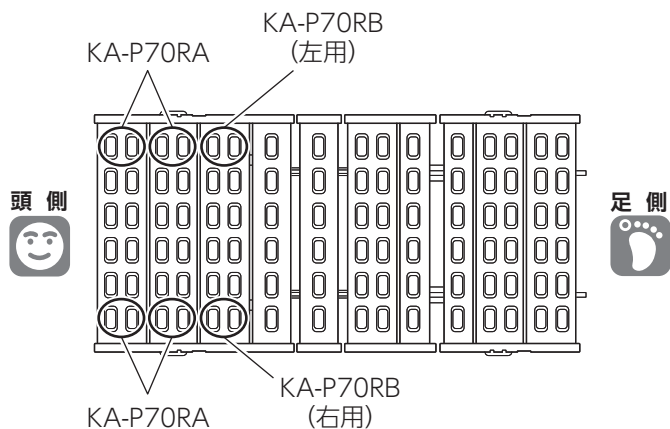


<エスパシアシリーズ・KA-N1000シリーズ>

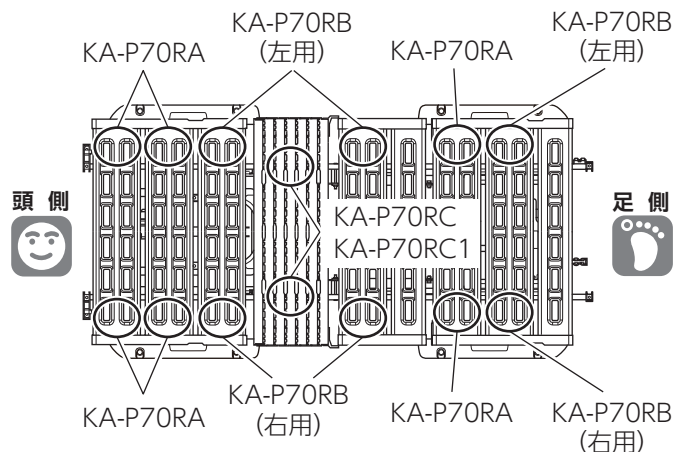

●KA-P70RB (右用) もしくは KA-P70RB (左用) が取付可能な位置には、KA-P70RA も取付可能です。



●KA-P70RBは右用と左用があります。3ページの取付位置とあわせて下図の右側、左側に注意して取付を行ってください。

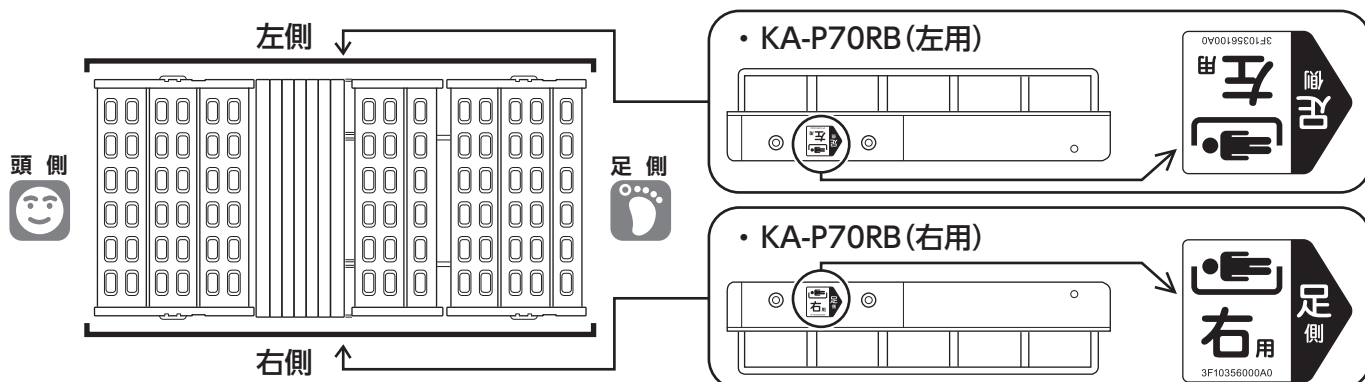


けい こく
警 告

●抑制帯受は指定の位置以外に取付けないでください。指定以外の位置に取付けると、思わぬけがをしたり、抑制帯受やベッドが破損・変形したりするおそれがあります。


抑制帯の取付

■抑制帯取付部（下図の斜線の範囲）に抑制帯を取付けてください。


●KA-P70RA

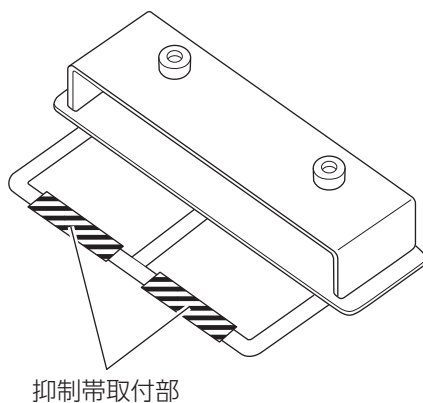

●KA-P70RB

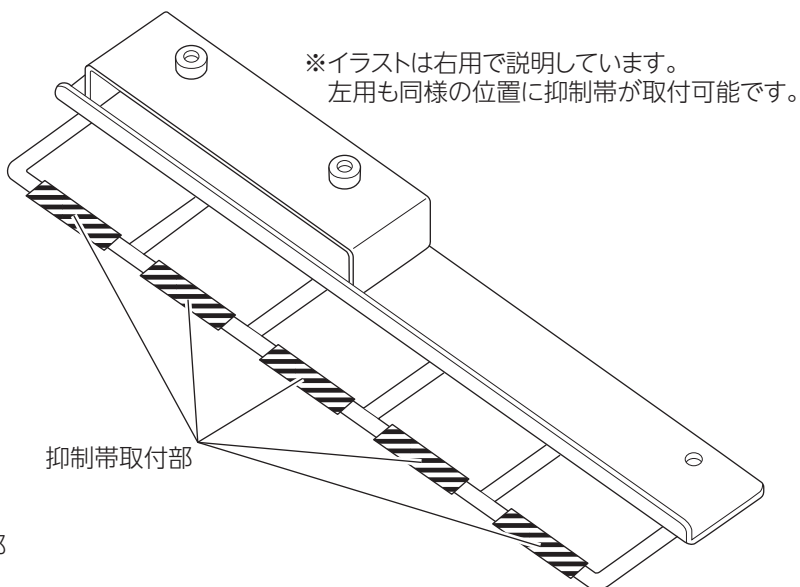

●KA-P70RC

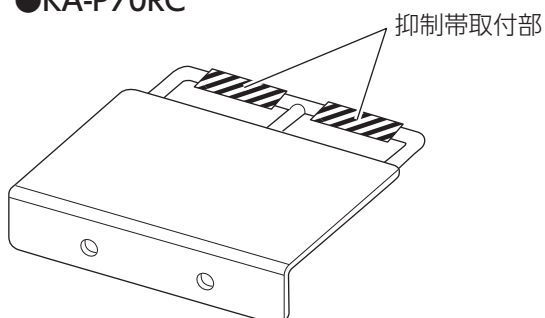


取付方法（使用方法）



- 抑制帯受はKA-P70RA・KA-P70RBは六角穴ボルトで、KA-P70RCはボルト・ナットで確実に固定してください。締め忘れり、締めかたが不完全だった場合は、抑制帯受が外れてけがをするおそれがあります。定期的に各部のゆるみ、破損の有無などを点検してください。
- エスパシアシリーズ・KA-N1000シリーズにKA-P70RCを取付ける場合は、KA-P70RC1と合わせて取付けてください。KA-P70RCのみで取付けると、ベッドの連結ピンが変形・破損するおそれがあります。

●KA-P70RA、KA-P70RB

- ①抑制帯取付部がベッドの外側に向くようにして、ボトム端部の通気穴にボトムの下側から抑制帯受を取付けてください。
 - ②取付金具をボトムの上から載せ、六角穴ボルトで抑制帯受を仮止めし、その後L型六角レンチ（対辺4mm）で、しっかりと締付けて固定してください。（2ヶ所）
- ※取付位置については3ページをご確認ください。

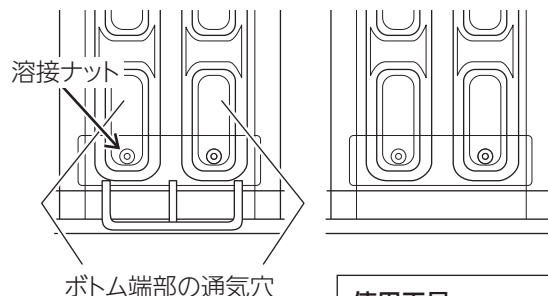


使用工具

L型六角レンチ（対辺4mm）×1



※付属されていません。
お客様でご用意ください。

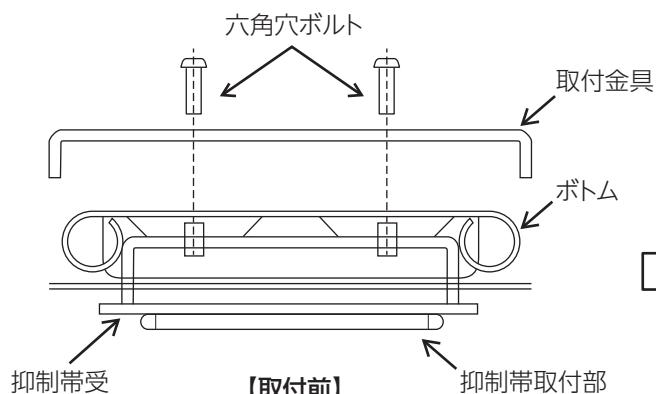


●KA-P70RC (KA-P70RC1)

- ①抑制帯取付部がベッドの外側に向くようにして、キューマボトムの下にある長手に空いている抑制帯受取付穴に抑制帯受をあわせてください。
 - ②ボルトとナットで抑制帯受を仮止めし、その後スパナ（対辺13mm）で、しっかりと締付けて固定してください。（2ヶ所）
- ※取付位置については3ページをご確認ください。
※エスパシアシリーズ・KA-N1000シリーズは、KA-P70RCを取付ける際にKA-P70RC1が必要になります。


使用工具

スパナ（対辺13mm）:2本

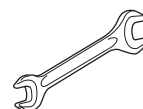


※付属されていません。
お客様でご用意ください。

<メーティスPROシリーズ>

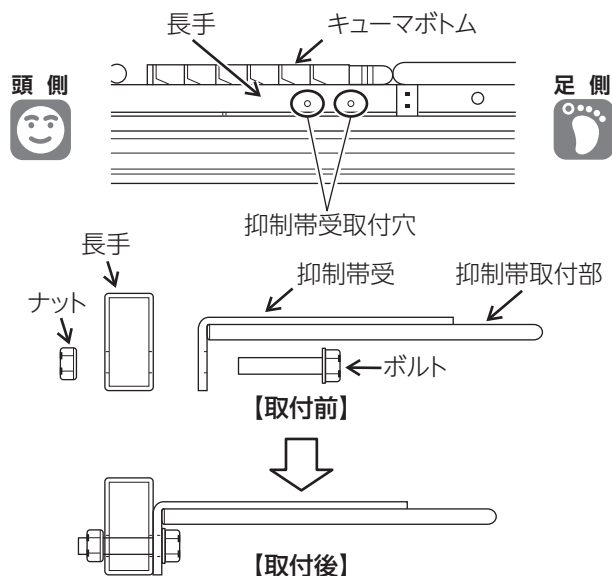

<エスパシアシリーズ・KA-N1000シリーズ>

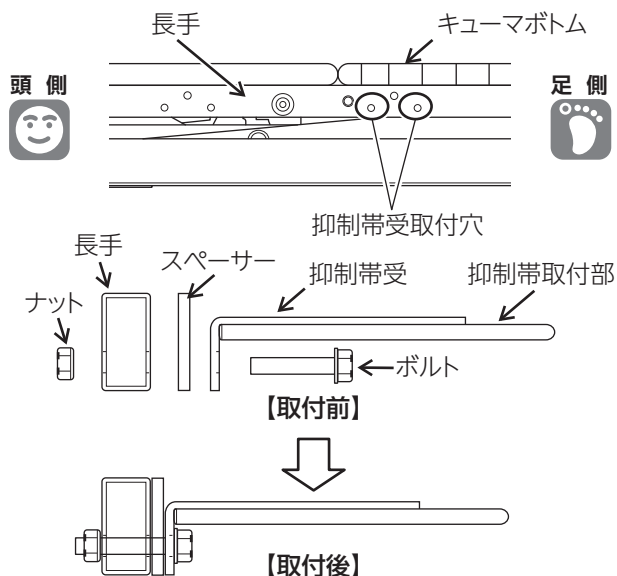

日常のお手入れ・長期保管について

<日常のお手入れ>

■汚れを落とす場合

下記①～③の手順で行ってください。

- ①水で薄めた中性洗剤にひたした布をよくしぼって拭いてください。
- ②水でひたした布をよくしぼって、残った洗剤分を拭き取ってください。
- ③乾いた布で残った水分を拭き取ってください。

■消毒する場合

必ず下記の消毒剤を指定の濃度で、消毒剤の取扱説明書などの指示に従ってご使用ください。

- 76.9～81.4% 消毒用エタノール
 0.05～0.2% 塩化ベンザルコニウム（オスバンなど）
 0.05～0.2% 塩化ベンゼトニウム（ハイアミンなど）
 0.05% グルコン酸クロルヘキシジン（ヒビテンなど）
 0.02～0.05% 次亜塩素酸ナトリウム（ミルトンなど）



●揮発性のもの（シンナー、ベンジン、ガソリンなど）やクレゾールは使用しないでください。変色・変質するおそれがあります。

●消毒剤を使用する場合は、指定以外の薬品を使用しないでください。破損・変質のおそれがあります。

●中性洗剤を使用した場合は、その後水拭きをしてください。水拭きをしないと樹脂の部分が割れるおそれがあります。



●オゾン殺菌器、オートクレーブ滅菌器などには対応できません。

<長期保管について>

- 高温・多湿・低温・乾燥・ほこりの多い場所を避けてください。
温度-10～50℃、湿度30～90%RHの環境で保管してください。
- 取扱説明書は紛失しないよう、大切に保管してください。

仕様

品 名	抑制帯受		
品 番	KA-P70RA	KA-P70RB	KA-P70RC
適合品	エスパシアシリーズ、KA-N1000シリーズ(KA-N1****) ※KA-P70RCとKA-P70RC1を組み合わせで取付けます。		
	メーティスPRO シリーズ(KA-7****0*)		
	メーティスシリーズ(KA-9****1*、KA-9****2*) KA-5000シリーズ、アルデコラシリーズ(KA-5*1*1*、KA-5*2*1*、KA-5*0*3*) ウッディーシリーズ(KA-2****1*)、スタンダードベッド(KA-201*1) ドージェシリーズ(KA-23221E) カリストエールシリーズ、KA-30000シリーズ(KA-3****1*、KA-3****2*) KA-4000シリーズ(KA-4****2*)、アルフォーネシリーズ(KA-83*2、KA-83*7)		
寸法(cm)	幅:19.8×奥行:8×高さ:4.7 (ボトム取付時)	幅:34.6×奥行:8×高さ:4.7 (ボトム取付時)	幅:14.2×奥行:14.2×高さ:3 (長手取付時) ※KA-P70RC1使用時 幅:14.2×奥行:14.5×高さ:3.8
材 質	スチール製・・・クロムめっき		

アフターサービスについて

1.保証書

保証書は、必ず「販売店名・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、記載内容をよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

販売店名・お買い上げ日の記入がない場合は、品番・販売店・お買い上げ日が確認できるように、製品をお買い上げの領収書などを保証書と一緒に保管してください。

2.修理を依頼されるとき

修理のご依頼は、お買い上げの販売店または弊社製品の修理受付窓口であるパラテクノコールセンター（下記参照）までご連絡ください。

■連絡していただきたい内容

- 品名、品番、製品識別表示ラベルの番号（貼付位置は1・2ページ「各部の名称と部品の確認」参照）
- お買い上げ日 ●故障または異常の内容（できるだけ詳しく）
- 施設名、お名前、ご住所および電話番号

■保証期間内は

保証書の記載内容に基づき無償で修理いたします。ただし、保証期間内でも修理が有償になる場合があります。詳しくは下記の保証書をご覧ください。

■保証期間が過ぎているとき

修理により使用できる製品については、ご要望により有償で修理いたします。

3.部品の最低保有年数は

弊社では、この製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間を製造打ち切り後8年としております。

4.アフターサービスについてご不明な場合

お買い上げの販売店、またはパラテクノコールセンターまでお問い合わせください。

パラテクノコールセンター ☎ 0120-54-8639

受付時間：平日 8：00～19：00 / 土・日・祝日 9：00～17：20（年始は休業いたします）

【パラテクノ株式会社について】 弊社製品の修理や保守点検などの各種サービスを実施する会社です。

保 証 書

品名／品番 抑制帯受／KA-P70RA・P70RB・P70RC・P70RC1		保証期間	*お買い上げ日	年	月	日より1年間
お客様	お名前	★販売店				
	〒 () ご住所					
			☎ ()			

★印欄の情報が確認できない場合は無効となりますので販売店から発行された★印欄の情報が確認できる領収書などを、本保証書と一緒に大切に保管してください。
この保証書は、本書の記載内容に基づき無償修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書、ラベル類などの注意書きに従った正しい使用状態で故障した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

【保証規定】

- 保証期間内（お買い上げ日より1年間）に、正常な使用状態において故障した場合は、無償で修理いたします。
- 次のような場合は、保証期間内でも修理は有償となります。
 - 使用上の誤り、あるいは不当な改造や修理による故障および損傷
 - 弊社が指定する適合品以外の製品と組合せて使用したことによる故障および損傷
 - お買い上げ後の移動、設置、落下あるいは輸送による故障および損傷
 - 火災、煙害、異常電圧および地震、雷、風水害、その他、天災地変などによる故障および損傷
 - 保証書のご提示がない場合
 - 本保証書の保証期間および販売店名が確認できない場合
 - 字句を書き換えるなどの不正行為が発覚した場合
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
 - This warranty is valid only in Japan.

<パラマウントベッド株式会社>

本 社	〒136-8670	東京都江東区東砂 2 丁目 1 4 番 5 号	☎ (03)3648-1111 (代)	横浜支店	〒194-0004	東京都町田市鶴間 5 丁目 3 番 3 3 号	☎ (042)795-8800 (代)
東京支店	〒136-8670	東京都江東区東砂 2 丁目 1 4 番 5 号	☎ (03)3648-1171 (代)	名古屋支店	〒461-0001	名古屋市中区東 1 丁目 2 0 番 1 7 号	☎ (052)963-0600 (代)
札幌支店	〒060-0062	札幌市中央区南 2 条西 13 丁目 318 番地 11	☎ (011)271-1181 (代)	大阪支店	〒550-0001	大阪市西区土佐堀 2 丁目 3 番 3 3 号	☎ (06)6443-8791 (代)
仙台支店	〒984-0015	仙台市若林区卸町 2 丁目 3 番地 3 号	☎ (022)239-5211 (代)	広島支店	〒733-0011	広島市西区横川町 3 丁目 8 番 5 号	☎ (082)293-1311 (代)
さいたま支店	〒338-0001	さいたま市中央区上落合 9 丁目 4 番 7 号	☎ (048)852-0707 (代)	福岡支店	〒812-0013	福岡市博多区博多駅東 3 丁目 14 番 20 号	☎ (092)461-1131 (代)