

保証書

お客さまへ

本製品は当社において厳格なる品質管理のもとに検査され、合格したものであります。お客様の正常なご使用状態で、万一お買い上げ一年以内に製造上の不備に起因する故障が生じた場合には無償修理いたします。

[保証規定]

- 本書に記載されている保障期間内の修理は無償です。
 - 保障期間内であっても、次の場合は有償修理となります。
 - 不適当な取扱、不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - 火災その他の天災地変、異常電圧、指定以外の使用電源等、過失又は事故による故障及び損傷。
 - 当社又は当社指定のサービス店以外で修理された場合。
- ※この保証書は日本国内においてのみ有効です。

1年間保証	お買い求めの代理店または販売店でご購入の年月日と店名を記入してもらってください。		
製品名:	歯ブラシケース		
型式:	日医 - 21826, 20310 (50本用) / 日医 - 21827, 20320 (30本用)		
製造番号:			
お買い上げ年月日:	年	月	日
お客様 お名前	電話番号	()
	ご住所	電話番号	()
代理店 ご住所 店名	店名		印
ご担当者			

総発売元：株式会社日本医療器研究所
〒111-0034 東京都文京区湯島 2-24-11
電話：03-3834-3191

製造元：株式会社日本医療器研究所 製造部
〒340-0811 埼玉県八潮市 2-1007
電話：048-994-3221

歯ブラシケース

取扱説明書

(送風機能無し／送風機能付 共有取扱説明書)

送風機能付き

日医 - 21826 (50本用) / 日医 - 21827 (30本用)

送風機能なし

日医 - 20310 (50本用) / 日医 - 20320 (30本用)

このたびは、歯ブラシケースをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。



ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。

この取扱説明書は大切に保管してください。


お使いいただく前に

● 注意！






電源について

	本製品を移動するときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。電源コードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。
	電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張るとコードが傷つき、火災、感電の原因になることがあります。


設置環境について

	高温、多湿の場所や換気の悪い場所、またホコリの多い所には本製品を設置しないでください。故障の原因になります。
---	--

安全にお使いいただくために

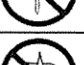	本製品の上に花瓶、コップなど水の入った容器を置かないでください。水がこぼれた場合、火災や感電の原因になります。
	万一、異物（金属片、水、液体）が内部に入った場合は、ただちに使用を止め、電源プラグをコンセントから抜いてください。そして、代理店に連絡してください。そのまま使用すると火災や感電の恐れがあります。
	ネジで固定されている扉や送風機などは、絶対にはずさないでください。本製品の破損の原因や内部電源での感電の恐れがあります。
	本製品の改造や、部品を変更しないでください。誤動作や発火、発煙の恐れがあります。
	電源プラグは絶対に濡れた手で触らないでください。感電の恐れがあります。

各部名称（送風機能付）

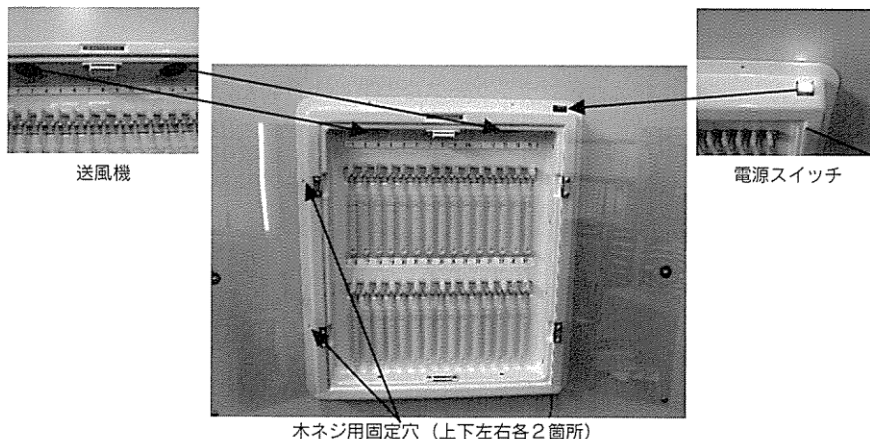

—歯ブラシケース（30本用）—

- ・サイズ：W445×D70×H510mm
- ・正面扉開閉式 ・しずく受付
- ・開閉：マグネットキャッチ式
- ・プラスチック製

—歯ブラシケース（50本用）—

- ・サイズ：W670×D70×H510mm
- ・正面扉開閉式 ・しずく受付
- ・開閉：マグネットキャッチ式
- ・プラスチック製

注：歯ブラシ取り付け可能な寸法は、全長148mm、太さは5mm迄です。

設置方法：本体裏面の両面テープで平面の壁に取り付けてください。もし、両面テープで接着が不十分な壁の場合は付属の木ネジをご使用ください。

※本製品には上下左右に各2箇所ずつ木ネジ用の取り付け穴があいています。

使用方法：電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチを押すと、パイロットランプが緑色に点灯し送風機が作動します。電源スイッチをもう一度押すと運転を停止します。※パイロットランプ（緑色）が消灯します。

清 掃：清掃には、柔らかい布で中性洗剤又は、エタノールをご使用ください。
⑧：使用される中性洗剤の使用方法に従ってください。

付 属 品：木ネジ4本

推 奨 品：日医—22572 タイマー スイッチの切り忘れ防止に。

使用上の注意事項（送風機能無、送風機能付共通）（一般的な注意事項）

- 1) 設置するときは、次の事項に注意してください。
 - 1 水のかからない場所に設置してください。
 - 2 温度、湿度、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより、悪影響の生ずる恐れのない場所に設置してください。
- 3 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意してください。
- 4 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に設置しないでください。

<送風機能付>

- 1) 使用する前には次の事項に注意してください。
 - 1 スイッチが点灯（緑色）し、送風機（2個）が正常に作動することを確認してください。
 - 2 電源プラグが完全にコンセントに接続され

ていることを確認してください。

- 3 歯ブラシの水滴をよくきってから歯ブラシ掛けに取り付けてください。
- 2) 使用中は、次の事項に注意してください。
 - 1 使用時間にご注意下さい（目安の時間は室温24℃で約2時間）タイマーの設定をお勧めします。
 - 2 本製品全般に異常のないことを監視してください。
 - 3 本製品に異常が発見された場合には、ただちに使用を中止してください。
 - 4 本製品の送風口など、小さなお子様が触れることのないように注意してください。
- 3) 使用後は次の事項に注意してください。
 - 1 歯ブラシの乾燥を確認後、電源を切ってください。
 - 2 電源コードの取り外しの際は、電源プラグを持って行き、コードを引いたりしないでください。故障の原因になります。
 - 3 本製品は次の使用に支障ないように必ず清掃しておいてください。
 - 4) 故障したときは分解等の操作をせず「故障中」等の適切な表示を行い、代理店へ連絡し修理は専門家に任せてください。

保守点検に係る事項（使用者による点検事項）

- 1) 電源コードにキズ、破損がないことを目視で確認してください。
- 2) 本製品外装、キズ、変形、錆びがないことを目視で確認してください。
- 3) スイッチは正常に動作して、パイロットランプが点灯（緑色）し、送風機が作動することを確認してください。
- 4) しばらく使用しなかった本体を再使用するときは、使用前に必ず本体が正常かつ安全に作動することを確認してください。

長期間ご使用にならないとき

長期間ご使用にならないときは、本製品内側・外側の汚れをしっかりとふき取り、水気が残らないように乾燥させ、直射日光の当たらない高温多湿を避けた場所に保管してください。
※電源プラグ類にもホコリがたまっていないか確認してください。