

# 乳がんエコーモデル

## BMC-02 取扱説明書

### はじめに

このたびは「BMC-02乳がんエコーモデル」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

商品を末永く、安全にお使いいただけるよう、ご使用前には必ず本説明書をお読みください。

株式会社 **レジーナ**

<https://www.bioskin.jp>

改訂 :2021/4/1

本 社 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-10-2  
TEL.048(837)2600 FAX.048(837)0099

工 場 〒019-1402 秋田県仙北郡美郷町野中宇下村107-2  
TEL.0187(84)1516(代) FAX.0187(84)0591

Regina Fashion Supply Co.,Ltd.

## ■はじめに

このたびは、乳がんエコーモデル（以後 BMC-02）をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

BMC-02 は、医師の方が超音波機器を使った乳がんを見つけるトレーニング用に開発されました。

商品を末永く、安全にお使いいただけるよう、ご使用前には必ず本説明書をお読みください。

## ■ご利用方法

- 1) 必要に応じて、手袋を着用してください。
- 2) 本体を取り出し、滑りにくい場所などに置いてください。
- 3) 超音波用ゼリーなどを使用し、プローブの操作、超音波ガイド下にて穿刺トレーニングを行ってください。
- 4) 機器によっては映りが悪いことがあります。ゲインを調整すると映りが改善することがあります。

注) 模擬腫瘍の生検、吸引はできません。

## ■ご利用上の注意および保管について

◎無理な荷重や、落とすと破損の恐れがありますので、ご注意ください。

◎必要に応じて、手袋を着用してください。

◎直射日光や、高温多湿な環境下での長期保管は変形、変色することがありますのでご注意ください。

◎煮沸や高温のお湯（60℃以上）に付けたり、火気を近づけたりしないで下さい。

◎本商品は消耗品です。使用される針の太さ、穿刺回数、箇所により針跡が残ります。

◎汚れた場合には、エタノールなどのアルコール類で拭きとって下さい。

※イソジン液、シンナー、クロロホルムなどの有機溶剤、酸性薬品、アルカリ薬品の使用は禁止です。


◎実際の処置と同様の効果を保証するものではありません。

◎本商品は改良のため、予告なしに使用変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

## ■内容物

内容物をご確認ください。

- (1) 乳がんエコーモデル（BMC-02）本体 … 1個
- (2) モデル台 … 1枚
- (3) 取扱説明書（本紙） … 1枚

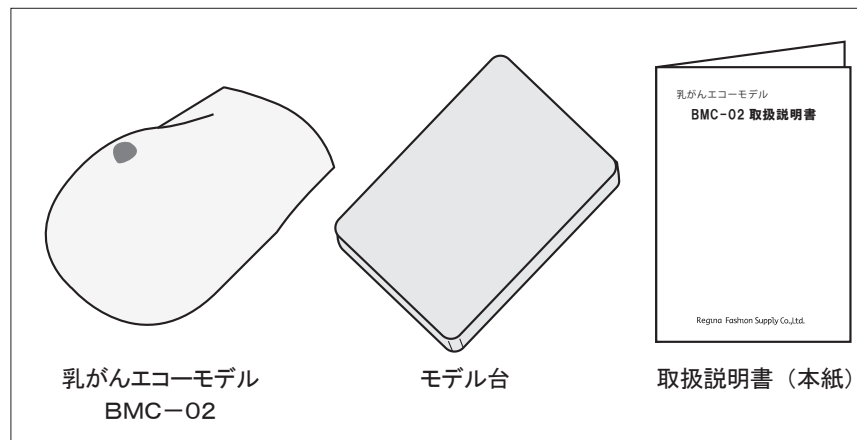

(※) 模擬腫瘍数は9個ランダムに埋め込まれています。