

Posey ヒールプロテクター #6218 取扱説明書 使用前に必ずお読みください！

【使用目的・製品特徴】

- かかと／足の保護・安定。
- 足首固定。
- 開放されたかかと部は換気・除圧・観察が良好です。
- 内部・外部ともに通気性が良い素材を使用。
- 外部素材はシーツとの相性の良い滑りやすい素材。
- 内部素材は軽量のマイクロファイバー使用で弾力性を維持します。
- 米国カリフォルニア州の燃焼遅延規格 CA117 適合製品

【使用方法】

1. 本品付属の全てのベルクロを取り外します。
2. ヒールプロテクターに足をのせます(Fig.2)。かかとがプロテクター底より浮いているのを確認して下さい。
3. やさしく包みこむように巻きつけストラップで固定して下さい(Fig.3,4)

注意1 簡単に外れたり抜けないようにしっかりと固定してください。しかしストラップの締めすぎに注意してください。指が入る程度(Fig.5 参照)にしてください。

注意2 かかと部が完全に開放されているか再度確認してください(Fig.6)

【注意・警告事項全般】

- ◆ 本品はかかとの保護・安定を目的とした製品であり治療・症状の改善を目的とした製品ではありません。
- ◆ 各施設で使用上の基準やガイドラインを作成して使用してください。
- ◆ 使用目的以外の用途で使用しないでください。
- ◆ 使用前に必ず製品の点検・確認を行ってください。製品に生地痛みなど品質上の異常がみられる場合には直ちに使用を中止してください。
- ◆ 常に監視してください。(固定状態と皮膚状態)
- ◆ 締めすぎによる循環障害に注意してください。
- ◆ 定期的(最低2時間に一回)に取り外し皮膚の状態・むれなどを注意・観察する。
- ◆ 火気の近くでの使用はしないでください。
- ◆ この製品は基本的に病院・施設向けですが医療機関からの在宅使用の推奨がある場合は専門知識を有した看護・介護スタッフからの使用上のアドバイスを受け、取扱方法を十分習得した上で使用してください。



【洗濯方法】

- 洗濯機 38℃以下
- 漂白剤使用可能
- 乾燥機(低)

【サイズの目安】 24cm ~ 28cm