

マツヨシ簡易採血台(MY-2290, MY-2291)



組立説明書

この度は当社製品をお買い上げ頂きありがとうございます。



組立の前に必ずお読みください。不適切な組立は事故につながることがあります。重量がありますので、2人以上で組立してください。

- 電気ドライバー等、ご用意ください。
- 工具類の取扱いには十分に注意してください。
- 組立の際は、お子様に注意し広い場所で行ってください。
- ネジの部分は確実に組立ててください。
不十分ですと使用中に製品が破損してけがをすることがあります。
- 組立の際は、製品及び床面を傷つけないようにご注意ください。

組立部品

①取付ボルトセット (M8×15)	4本
②取付ボルト (M6×15)	4本(予備2本)


ご使用前に下記の「安全上の注意」をよくお読み頂き、正しくお使い下さい。



- ◎テーブルの用途以外に使用しないで下さい。けがの原因となります。
- ◎テーブルの上に乗ったり、座ったり、重いものを乗せないで下さい。転倒し、けがの原因となります。
- ◎天板を折りたたむ際には可動部の隙間に手を入れないで下さい。けがの原因となります。
- ◎天板を跳ね上げた後、確実にロックされているか確認してください。天板が倒れてけがの原因となります。
- ◎キャスター停止バーをロックしたまま移動しないで下さい。けがや破損の原因となります。
- ◎使用中に異常が生じた場合はそのまま使用せず、お買い上げの販売店まで御連絡ください。そのまま使用しますとけがの原因となります。
- ◎直射日光やストーブの近くで使用しないで下さい。変形や変色の原因となります。
- ◎水のかかる場所や湿気や乾燥の著しい場所で使用しないで下さい。変形や変色の原因となります。


組立方法

手順1

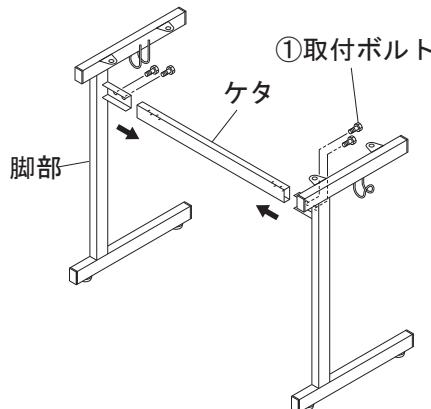

①取付ボルトM8×15を使用し左右の脚にケタを取付けます。

手順2

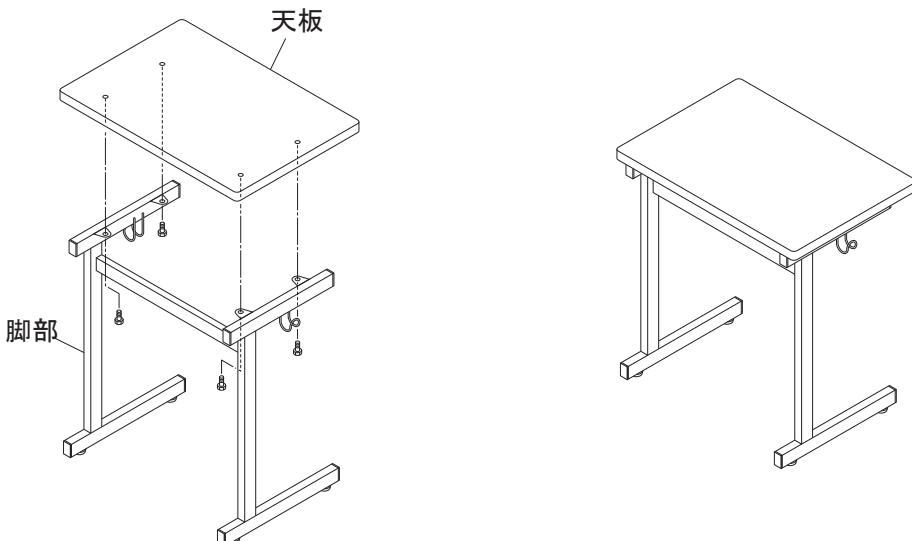

②取付ボルトM6×15を使用し脚部と天板を取付けます。
ガタ付きがないことを確認しアジャスターで水平を調整します。

【発売元】

 松吉医科器械株式会社
<https://www.matsuyoshi.co.jp>