

取扱説明書

回転シャワーベンチ



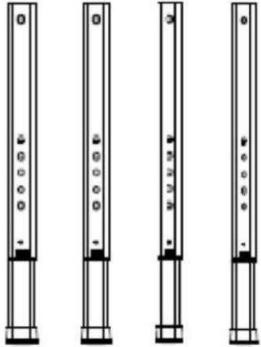
この度は当製品をお買い上げ頂き、誠に有難うございます。安全にご使用頂くため、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みいただいた後はお手元に保管してください。



《付属品の確認》

当製品には下記①～③の部品が同梱されています。不足がないこと、破損など異常がないことをご確認ください。

※不足品や不具合などがございましたら、お買い求めの販売店までご連絡ください。

番号	部品名	数量	番号	部品名	数量	番号	部品名	数量
①	座面	1枚	②	物置棚	1枚	③	伸縮パイプ	4本
								

《製品の仕様》

カタログコード：24-6028-00

品名：回転式シャワーベンチ MY-1243

材質：フレーム＝アルミ、座面＝ポリエチレン、マット＝ポリウレタン

サイズ：W365xD365xH450～550mm

重量：約3.2kg

販売元

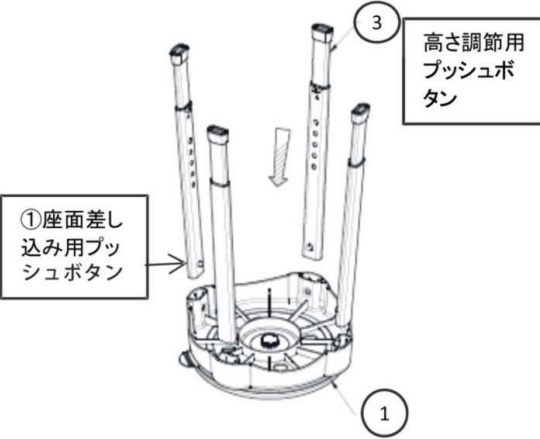
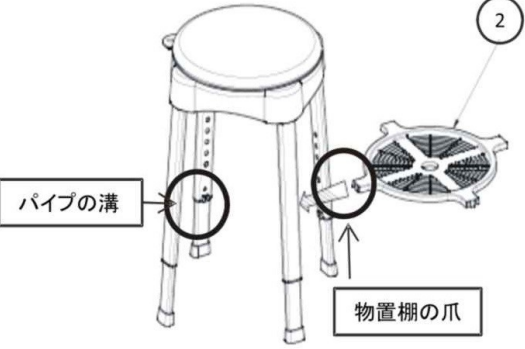
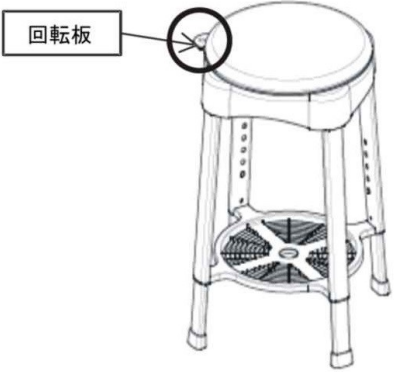
松吉医科器械株式会社

<http://www.matsuyoshi.co.jp>

本社：〒113-8520 東京都文京区湯島3-14-9 湯島ビル3階

TEL：03-5816-8819(音声ガイダンス) FAX:0120-024432

組立方法

<p>ステップ1</p> <p>①座面を裏返して、③の座面差込み用プッシュボタンを押さえ、座面の裏にある4つの穴に伸縮パイプを差し込んでください。(伸縮パイプを座面に入れる時、指をはさまないように注意してください。) 4本の伸縮パイプとも高さ調節用プッシュボタンを押して、同じ高さに調節してください。 4本の伸縮パイプのプッシュボタン全てが穴に固定されている事を確認してください。</p>	
<p>ステップ2</p> <p>物置棚の爪を伸縮パイプ内側にある溝に差し込んでください。物置棚と伸縮パイプが固定されている事を確認してください。</p>	<p>ステップ3</p> <p>各部品がしっかり固定されている事を確認し、完成です。 ★回転板を持ち上げながら、座面は360度回転ができます。座面の下に固定ポイントがあります。</p>
	



安全上のご注意

- 本製品は入浴する際に、シャワーをあびたり体を洗う際にご使用ください。
- ご使用前に各部の点検をし、破損や変形、グラつきなど異常がある場合にはご使用しないでください。
- 4本の伸縮パイプは同じ高さに調節してください。プッシュボタンが確実に穴に固定されている事を確認してください。
- 伸縮パイプを座面に入れる時、指をはさまないように注意してください。
- 平らな場所でご使用ください。凸凹のある不安定な場所に置くと、転倒してけがをする可能性があります。
- 本製品の上に立つ、踏み台にするなど本来の目的以外の使い方はしないでください。
- 本製品は必ず1人でお使いください。2人以上でのご使用は転倒したり、けがをする恐れがあります。
- 本製品を改造しないでください。
- 棚に足をかけないでください。

お手入れ

- ◎本製品をご使用後は薄めた中性洗剤を柔らかいスポンジや布などに含ませ、汚れを取った後にきれいな水で洗剤を洗い流してください。洗剤を洗い流した後は乾いた布で拭きとるか陰干ししてください。
- ◎本製品に直接熱湯をかけて洗わないでください。変形する恐れがあります。
- ◎タワシ・研磨剤入りスポンジ・両面スポンジの固い面などはご使用にならないでください。また、塩素系洗剤・有機溶剤・クレゾールなどはご使用にならないでください。樹脂が劣化し、破損する恐れがあります。
- ◎温泉や入浴剤入りのお湯はかけないでください。劣化の原因となります。