

取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
製品を安全に末永くご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みになり、
お読みいただいた後はお手元に保管してください。

⚠安全上のご注意

- 製品の不当な改造、分解をしないでください。製品破損による事故の原因となります。
- 変形・破損したまま使用しないでください。転倒や積載物の落下による事故の原因となります。
- 内容物（トレー・駒）が破損した場合には直ちに新しいものと交換・補填してください。事故やケガの原因となります。
- 製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないでください。転倒事故や製品破損による事故の原因となります。
- 天板は投薬に関連する軽作業のスペースですので、重量物の積載や物を載せすぎたりしないでください。製品破損の原因となります。また、偏った積載をしないでください。積載物の落下による事故の原因となります。
- ハンドル（取手）の上部より体重や負荷をかけないでください。製品破損による事故の原因となります。
- 引出が少しでも出た状態では施錠できません。引出が出た状態での施錠行為は製品破損による事故の原因となります。
- 引出を出した状態で移動しないでください。転倒や積載物の落下による事故の原因となります。
- 引出を手前に強く引き出すと、製品破損による事故の原因となります。
- 引出のレールに触れたり、隙間に指を入れたりしないでください。切断面などでケガをする恐れがあります。
- 特に、段差や傾斜のある場所を移動する際には、転倒や積載物の落下に十分ご注意ください。
- 傾斜のある場所や凹凸した不安定な場所に停車しないでください。転倒や積載物の落下による事故の原因となります。
- 停車させる際は、必ずキャスターのストッパーをかけ、製品が固定されていることを確認してください。
- キャスターのストッパーを完全に解除せず移動するとキャスターの摩耗を早め、製品破損による事故の原因となります。

使用上のご注意

- 引出前面の名札、トレー・駒の名札を確認のうえ、処方箋に基づき薬のセットを行ってください。
また、当該患者様が変わった時は、速やかに引出、トレー・駒に付随する名札を変更してください。
- 本製品は屋内用です。屋外や水のかかる場所に放置しないでください。
- 製品を水に濡れたままにしておきますと腐食の原因となりますので、乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- 酸性の液体や塩分、洗剤の原液などが付着しないようにしてください。
- キャスター部や可動部などに異常音が発生した場合には使用を中止し、販売店までご相談ください。
- その他、製品に不具合が発生した場合には使用を中止し、販売店までご相談ください。
- **シャッターを上げる際の指の巻き込み・下げる際の指詰め等には十分注意してください。**

開閉・施解錠の手順

閉/施錠


- 引出及び最上段の小物バスケットが飛び出ない事を確認してください。
※引出は確実に奥まで収納してください。
- 付近に挟まるものが無いことを必ず確認し、引き手を持ち、ゆっくりとシャッターを下ろしてください。
※シャッターが完全に下がりきるまで引き手から手を離さず
- シャッターが完全に下りていることを確認し、鍵で施錠し解錠/開

- 鍵で解錠します。
- 引き手を持ち、ゆっくりとシャッターを上げてください。
※シャッターが完全に上がりきるまで引き手から手を離さず

製品のお手入れ

- 乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れが著しい場合は、薄めた中性洗剤につけた布で拭き、水分が残らないように拭き取ってください。
- ※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤などは、表面材が損傷する恐れがありますので、使用しないでください。
- ※金属製のブラシや研磨剤入りの洗剤などは、表面材が損傷する恐れがありますので、使用しないでください。

各部の名称

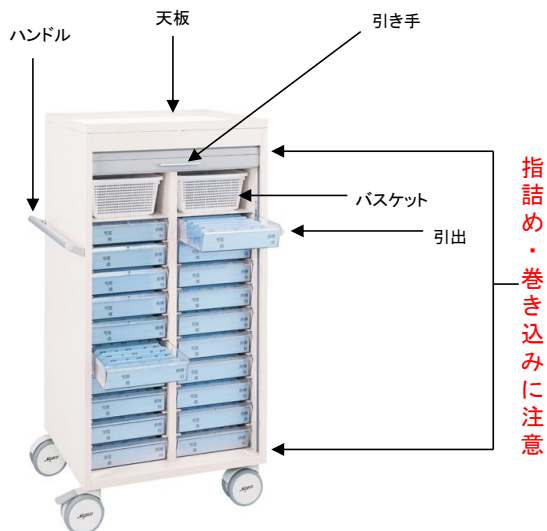

(発売元)



松吉医科器械株式会社

東京都文京区湯島3-14-9 湯島ビル3階