

「折りたたみ式ワゴンの開閉方法、製品特徴」について

■ 開閉方法



1. 天板が倒れないように手で押さえながら左右どちらかの脚パイプを開いてください。



2. 天板を押えた状態で、もう一方の脚パイプを開いてください。



3. 左右の脚パイプが完全に開いている事を確認したうえで、天板をゆっくりとおろしてください。（反対側も同様）

Ⓢ：天板をおろす際、指を挟まないようご注意ください。

■ 製品の特徴



本製品は折りたたんで隙間に収納できる、折りたたみ式回診車です。上記の開閉仕様により、奥行寸法「475」ミリから「170」ミリになるので場所をとりません。

【Ⓢ「折りたたみ時」について】



折りたたんだ際、奥行きが浅くなるため、キャスターの向きによっては不安定となり、転倒するおそれがあります。写真のとおり、キャスターの向きは外側に向けた状態にしてください。



また本製品は安全上、折りたたんだ状態での走行を想定したものではありません。走行時は製品を完全に開ききった状態で、ご使用頂けますようお願い致します。

■ その他備考

本製品は、オールステンレス製品です。スムーズに開閉できるよう、可動部には若干の「アソビ」を設けております。

そのため、ご使用になる際、「アソビ」による金属音が発生します。あらかじめご了承ください。