

マツヨシ小型点滴処置台 取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。製品を末永くご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みになり、お読みいただいた後はお手元に保管してください。

【各部名称】



点滴架仕様

フックは上段(3個)が固定式
下段(5個)が可動式です。



⚠安全上のご注意

- 本製品は、本来の目的以外に使用しないでください。また、加工や改造など行わないでください。
- ご使用前に各部品が破損や変形などの異常が無いか必ず点検してください。異常が見られる場合はただちに使用を中止してください。
- 本製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないでください。転倒や破損の原因になります。
- 耐荷重(約30kg/フック1個当たり約3kg)以上の重さがかからないようにご使用ください。破損や事故の原因に繋がる恐れがあります。
- 点滴架やトレーに物を載せすぎたり、偏った積載はしないでください。転倒や積載物落下による事故の原因になります。
- 屋外、傾斜や不安定な場所でのご使用はお控えください。転倒や破損の原因になります。
- キャスターより異常音が発生した場合は直ちに使用を中止し、ご購入された販売店にご相談ください。
- 天板をたたく等、強い衝撃を与えないでください。破損の原因になります。

製品仕様

品 番	MY-1095
サイズ	W480×D345×H900mm (点滴架含むH1585mm)
点滴架	フック=上段3個・下段5個
トレー内寸	小=W365×D265×H70mm 4個 大=W365×D265×H155mm 2個
耐荷重	本体=約30kg 点滴架=フック1個あたり約3kg
材 質	本体=圧縮合板 天板・点滴架=ステンレス

お手入れ方法・保管方法

- 拭き取りの際は、固く絞った柔らかい布で水拭きしてください。
- 薬液などが付着した場合は、直ちに拭き取ってください。
- 風通しのいい直射日光が当たらない場所で保管してください。過度な高温多湿の環境で保管しないでください。
- 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

【発売元】

松吉医科器械株式会社
<https://www.matsuyoshi.co.jp>