

## 取扱上のご注意、保管について

- ◎しこりを探すときは、カバーを被せた状態で爪を立てずに指で押ししてください。カバーを捲ったまま押すと、乳房本体の表面に傷がつくことがあります。
- ◎過度な力で押すと、製品の表面に細かい傷がつくことがあります。
- ◎無理に引っ張りや荷重のかけ過ぎ、落下などで破損する恐れがあります。
- ◎目的以外の使用、分解や改造などの行為は行わないでください。
- ◎油性のマジックやサインペンなどは色が沈着することがありますので、ご使用はお控えください。
- ◎直射日光や高温多湿な環境下での長期保管は変形、変色することがあります。
- ◎煮沸や高温のお湯（60℃以上）につけたり、火気を近づけたりしないで下さい。
- ◎汚れた場合には、エタノールなどのアルコール類で拭きとって下さい。  
※シンナー、クロロホルムなどの有機溶剤、酸性薬品、アルカリ薬品は使わないでください。
- ◎製品に異常が発生した場合は、担当者までご連絡ください。

## 乳がん触診モデル (カバータイプ)

# BMC-03 取扱説明書

### はじめに

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
この商品はカバー部分が交換可能なタイプです。商品を末永く、安全にお使いいただけるよう、ご使用前には必ず本説明書をお読みください。



製造元

株式会社 **レジーナ**

本 社 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-10-2  
TEL.048(836)2600(営) FAX.048(837)0099  
工 場 〒019-1402 秋田県仙北郡美郷町野中下村107-2  
TEL.0187(84)1516(代) FAX.0187(84)0591

Regina Fashion Supply Co.,Ltd.

## ■はじめに

このたびは、乳がん触診モデル カバータイプ（以後 BMC-03）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

BMC-03 は、医大生、研修医の方が乳がん触診の練習をするための教材として、病院の外来等での説明用ツールとして開発された本格的シミュレーターです。

そのため、病巣はリアルに再現しております。

また、乳がんの早期発見を目的とした啓発活動用ツールとして、一般向けにもご利用いただけます。

商品を末永く、安全にお使いいただけるよう、ご使用前には必ず本説明書をお読みください。

## ■ご利用方法

- (1) 乳がん触診モデル本体をモデル台の上に置きます。
- (2) 爪を立てず、指の腹で優しく押し、しこりの場所を探します。  
このとき、必ずカバーを被せた状態で行ってください。カバーを被せずに直接透明な乳房本体を押すと、乳房本体に傷がつくことがあります。
- (3) しこりの位置を確認したい時は、カバーを捲ってください。しこりを目で確認したら、再びカバーを被せて感触を確認してください。
- (4) 繰り返しお使いいただくことで、乳がん触診モデルの表面に細かい皺ができることがあります。問題ございません。



カバーの上からしこりを探す



カバーを剥がしてしこりを押す

## ■内容物

内容物をご確認ください。

- (1) 乳がん触診モデル 本体 … 1個
- (2) 乳がん触診モデル カバー … 1枚
- (3) モデル台 … 1枚
- (4) 取扱説明書（本紙） … 1枚

