



## 取扱説明書


- [ご使用前に]     △ 製品の安全確認をしてからご使用ください  
 △ ご使用前に必ずこの説明書をお読みの上、正しくお使いください

[各部名称・組立て]

- ①主柱     ②台(主柱取付ネジ x 3本・セット済)     ③カーソル(遊標)     ④付属:専用レンチ

1. 専用レンチであらかじめ台にセット済のネジ x 3本を外し、図-I の様に台に主柱を取付けます
2. 主柱の上部先端よりそのままカーソルを差込んでください \*カーソルの方向に注意(図-II 参照)
3. カーソル移動時は先端を持たずに後方を掴む様にし、ゆっくりと上下させてください


図-I

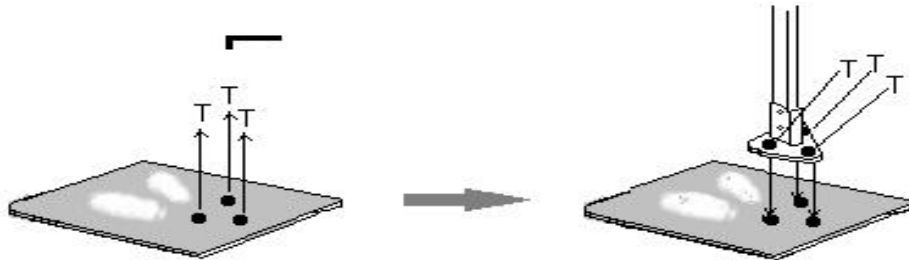

① あらかじめセットされているネジを外す

② 主柱下部を上図の方向にて台にセットし、外しておいたネジで取付ます

図-II

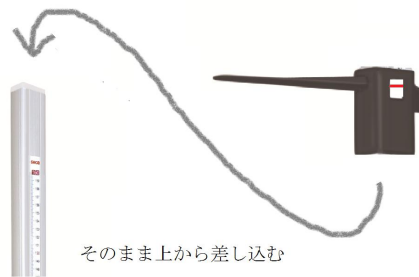


そのまま上から差し込む

主柱トップからカーソル先端が台側に向く様に垂直に差込んで下さい

⚠ 使用しない時は接触破損等を防ぐ為、カーソルを外して保管をお願いします

組み立て完成図

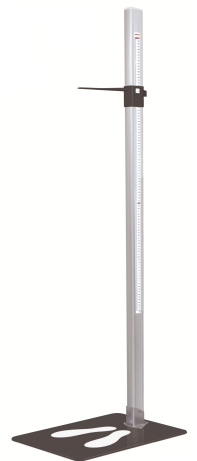

[測定方法]

- ① あらかじめカーソルを上方へ移動させます
- ② 主柱を背に背筋を伸ばし真っ直ぐ立ち顎を引きます  
(両足のカカトは上げない)
- ③ 静かにカーソルを降ろし被験者の頭にのせます
- ④ 右図の様に読取ります(ツインメジャー仕様なので左右両側から読取出来ます)

水平に見て、赤線と重  
なった数値を読取る



[使用上の注意]

- △ ケガをする恐れがありますので、本製品に飛び乗ったり寄りかかったりしないでください。
- △ 転倒する恐れがありますので、必ず平らな場所に設置し、各部取付も確実にこなしてください。
- △ 故障の原因となりますので、移動の際に振り回したり落としたりぶついたりしないしてください。
- △ 使用后、汚れた場合はベンジン、ソナー等は使わずに乾拭き(又は薄めた中性洗剤を使用)してください。
- △ 分解および改造行為は絶対におやめください。\*保証対象外および修理不能の恐れがあります。
- △ 合板床材、塩ビ床材等に設置しないで下さい※非移行性ゴム脚でも床材により色移行の可能性があります。

[アフターサービスについて]

1. 修理、その他お問合せは本製品をお買い求め頂いた販売店にご連絡ください。
2. 本製品を正常にご使用いただいた上での保証期間はご購入後1年間となります。