

使用前に必ずお読み下さい！



### 抑制帯の取付け

※現在は表面が黒色に変更になっております



抑制帯を出しストレッチャーに拡げます。ストレッチャーに固定するためのバックル付ストラップ(頭頂・胸・腹・足横・足先端)をしっかりと固定します

※上図は頭頂部マットレス下のボトム穴にストラップを通して固定



バックルを固定した後ストラップをしっかり締める

※上図は足先端部のストラップを金属バーに固定

胸部位置にある両側のストラップをストレッチャー下で固定



足首横にある両側のストラップをストレッチャー下で固定

腹部位置にある両側のストラップをストレッチャー下で固定


※ストレッチャー下でバックルをロックしストラップをしっかり締めます



腹部にある抑制ストラップのバックルを解除しておきます




手首抑制帯と付属抑制ストラップのマジックテープを剥がしておきます  
同様に足首抑制帯のマジックテープも剥がしておきます

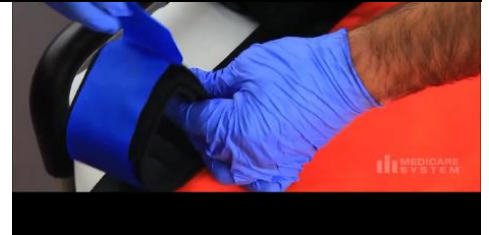


## 患者への装着



患者さんをストレッチャー用抑制帯の上  
に寝かせます

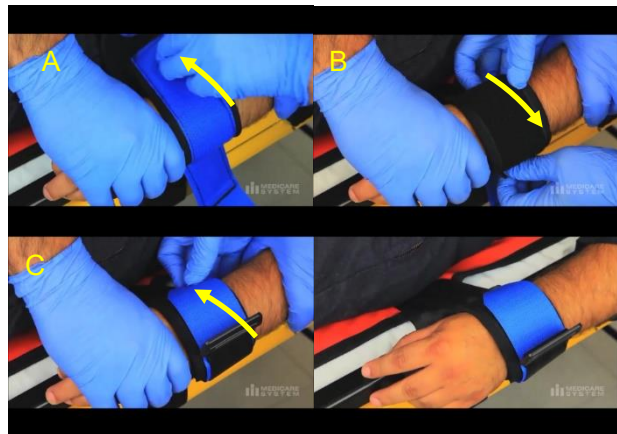


手首抑制帯を装着します。上図のように  
3層構造になっており、重ね合わせます

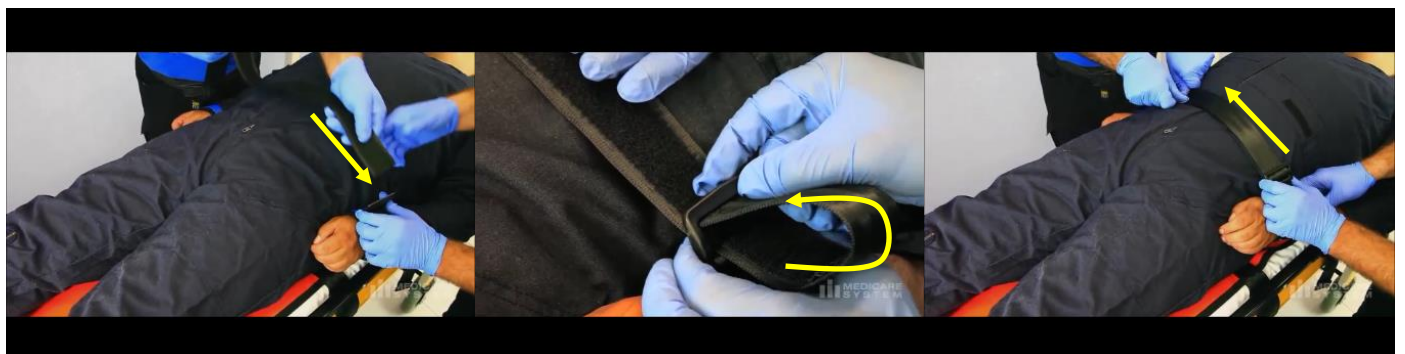

手首帯付属の左右を固定するベルトの片端をバックルに通し、折り返して通してからしっかり締めます



足首抑制帯を装着します。  
手首同様3層構造になっています  
(手首帯欄参照)

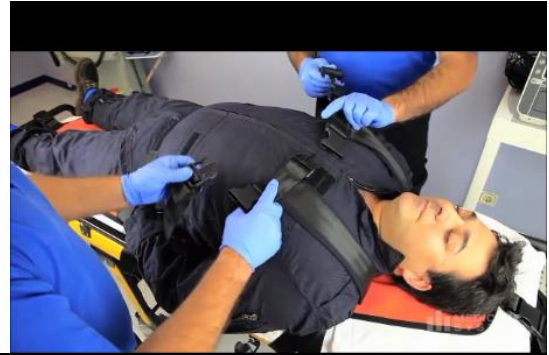

胸部抑制ストラップのバックルをロックします



バックルをロックした後ストラップを引っ張り確実な固定にします



胸部抑制ストラップは体格により固定方法が若干異なります



160cm 以上の体格



160cm 以下の体格では上図↑のループ(赤ラベル)にストラップを通して固定



150cm 以下の体格では上図↑のループ(青ラベル)にストラップを通して固定また、足首帯の位置に合わせて本体の一部をたたみ、長さを調節することも可能です





ストレッチャーに固定しているストラップの固定をすべて解除します



スライドの際の持ち手が両側に8カ所あります



両側二人ずつ、しっかり持ち手を持って移動させます

**【警告事項 注意全般】**

1. 抑制帯は病院・施設で医療法や精神保健法、その他の法令等に従った上で医師などの権限・監督下において必要と判断された場合に患者／入所者に安全対策の一つの手段として使用されるべきものです。目的以外の用途で使用しないでください。
2. 抑制帯は病院・施設での患者のストレッチャー移動時の安全対策補助を目的とするものであり、健康被害の防止、生命救済、生命維持を保証するものではありません。
3. 各施設で使用上の基準やガイドラインを作成して慎重、安全に使用してください。
4. この製品は医師・看護師が常駐する病院・施設に限り使用できます。抑制ができる法的条件を満たし、必要な手順を整えてから使用してください。
5. 個人の在宅での使用はできません。
6. 取り扱いに際して十分に使用方法を習得し熟練した医師・看護師が使用してください。
7. 抑制帯使用中は安全管理を徹底し、患者の異変・異常を認めた場合、また製品の装着に問題が有る場合は使用を中止してください。

**【警告事項 使用前の注意】**

8. 使用前に必ず製品の点検・確認を行ってください。製品の生地痛み、付属ベルト・バックルなど品質上の異常がみられる場合には直ちに使用を中止してください。
9. 人工肛門・胸部疾患（心臓・肺）があり固定ベルト装着に問題がある患者には使用しないでください。
10. 四肢に脱臼・骨折・創傷があり固定ベルト装着に問題がある患者には使用しないでください。
11. 著しく攻撃的・凶暴性の患者で抑制帯装着による2次的なトラブルが予想される場合には使用しないでください。
12. 抑制帯使用者は上向き以外での使用はできません。
13. ストレッチャー以外での使用はできません。

**【警告事項 取り付け時の注意】**

14. 締め過ぎによる呼吸・循環を妨げる固定はしないでください。
15. 抑制帯の固定ストラップ/ベルトは、ストレッチャーのフレームにしっかりと固定してください。
16. 帯各部の緩みをチェックしてください。緩みがあると帯からのすり抜け、ストレッチャーから転落の危険が高まります。
17. 本製品使用により患者の動揺・不適切な行動など異常がある場合は使用を中止し適切な方法に変更してください。
18. 安全帯は耐火性ではありません。炎に近づけないでください。

**<洗濯方法>**

- 手洗い（ぬるま湯） ●除菌クリーナー
- ×洗濯機不可 ×乾燥機不可
- ×アイロン不可、×漂白剤不可

**輸入発売元:**  
**株式会社メディカルプロジェクト**  
 Tel : 054-252-1141