






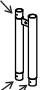
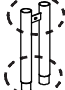

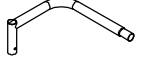








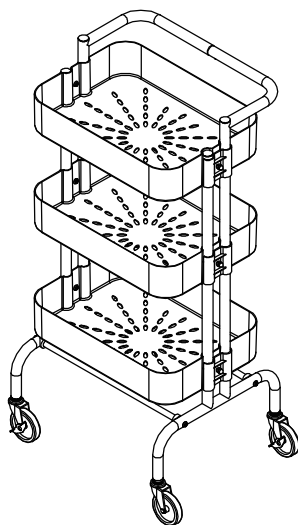

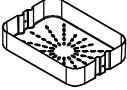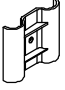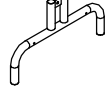
3段バスケットワゴン

この度は当製品をお買い上げ頂き、誠に有難うございます。安全にご使用頂くため、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みいただいた後はお手元に保管してください。



《付属品の確認》

当製品には下記A～Sの部品が同梱されています。不足がないこと、破損など異常がないことをご確認ください。
※不足部品や不具合などがございましたら、お買い求めの販売店までご連絡ください。

項目	部品名	数量	項目	部品名	数量	項目	部品名	数量	項目	部品名	数量
A	バスケット	3	B	スリーブ	6	C	キャスター受け台座	2	D	ポールセット	1
										 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> 部品の右側にタッピングネジ取付用の穴 </div>	
E	ポールセット	1	F	ポールセット	2	G	ポール	2			
	 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> 部品の左側にタッピングネジ取付用の穴 </div>										
H	左ハンドル	1	I	右ハンドル	1	J	キャップ	4	K	キャスターストッパー付	2
											
L	キャスター	2	M	ネジ(28mm)	6	N	六角袋ナット	6	O	タッピングネジ	11
											
P	長ネジ(38mm)	4	Q	波型ワッシャー	4	R	スパナ(大)付属品	1	S	スパナ(小)付属品	1
											

《製品の仕様》

カタログコード : 24-7883-00 (ピンク) ・ 24-7883-01 (ブルー)
 品名 : 3段バスケットワゴン MY-IJW200P(ピンク) ・ MY-IJW200B(ブルー)
 材質 : 本体:スチール(粉状塗装)、バスケット:ポリプロピレン
 寸法 : 本体:W450xD365xH930mm ・ バスケット:W405xD280xH90mm ・ キャスターΦ75mm(対角ストッパー付)
 重量 : 約4.0kg
 耐荷重 : 一段約5.0kg

販売元 松吉医科器械株式会社


本社:〒113-8520 東京都文京区湯島3-14-9 湯島ビル3階
 TEL:03-5816-8819
 E-Mail:info@matsuyoshi.co.jp

組立方法

※プラスドライバーをご用意ください。


ステップ 1

- ①ポール(G)を波型ワッシャー(Q)を挟んでキャスター受け台座(C)に差し込んでください。
- ②ポール(G)の先端を長ネジ(P)で固定してください。
- ③タッピングネジ取付用の穴が内側になるようにポールセット(F)を台座(C)を差し込んで、タッピングネジ(O)で固定してください。
- ④ポールセット(D、E)の両端の形状を確認の上、ポールセット(F)にポールセット(D、E)を差し込んで、タッピングネジ(O)で固定してください。
- ⑤キャップ(J)をポールセット(D、E)の空洞に差し込んでください。

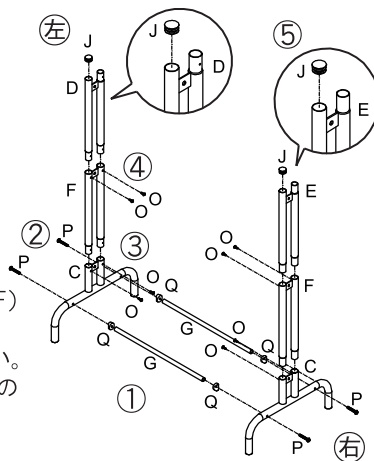


ステップ 3

- ①各段、ポールのバスケット取付位置で、ポールをスリーブ(B)とバスケット(A)で挟み、ネジ(M)をバスケット(A)側から通してください。
- ②スパナ小(S)を使って、六角袋ナット(N)をおさえて、ネジ(M)を締めてください。

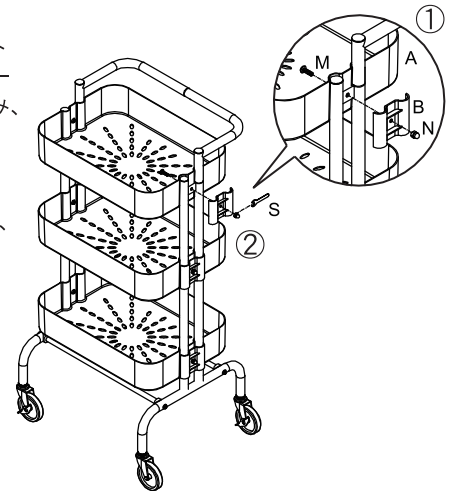


ステップ 2

- ①スパナ大(R)でキャスター(K、L)をキャスター受け台座(C)に取り付けてください。
- ②右ハンドル(I)に左ハンドル(H)を差し込んで、タッピングネジ(O)で固定してください。
- ③ハンドル(H、I)をポールセット(D、E)に差し込んでタッピングネジ(O)で固定してください。
- ④キャップ(J)をハンドル(H、I)の空洞に差し込んでください。

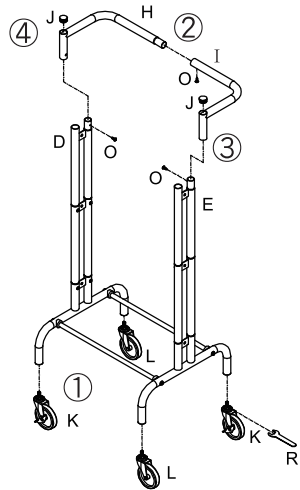

ステップ 4

これで完成です。

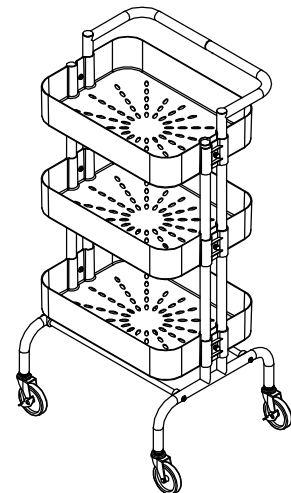

安全上のご注意

- ご使用前に各部の点検をし、破損や変形、グラつきなど異常がある場合にはご使用しないでください。
- 平らな場所でご使用ください。凸凹のある不安定な場所に置くと、転倒してけがをする可能性があります。
- 設置に際して、直射日光が当たる場所、火気、ストーブなどの近く、湿気の多いところは避けてください。変色や変形、劣化の原因となります。
- 本製品の上に乗ったり、製品に寄りかかることは製品が転倒する恐れがありますので、おやめください。
- 耐荷重を確認の上、ご使用ください。耐荷重を超えて使用した場合は破損や変形、事故に繋がりますのでおやめください。
- ネジがゆるんだまま使用しないでください。本体がこわれてケガをすることがあります。
- 安全のため、重い物は下の段及び中央の段に収納してご使用ください。
- 本製品は本来の目的以外の使い方はしないでください。ケガをすることがあります。
- 本製品を改造しないでください。

お手入れ

- ◎お手入れの際は、から拭きするか固く絞った布などで拭いてください。
- ◎汚れがひどい場合には、水で薄めた中性洗剤を使用し、傷が付かないよう、柔らかい布で拭き取ってください。
- ◎本製品に直接熱湯をかけて洗わないでください。変形する恐れがあります。
- ◎タワシ・研磨剤入りスポンジ・両面スポンジの固い面などはご使用にならないでください。傷みの原因となります。
- ◎塩素系洗剤・有機溶剤・クレゾールなどはご使用にならないでください。製品が劣化し、破損する恐れがあります。