


折りたたみワゴン

この度は当製品をお買い上げ頂き、誠に有難うございます。安全にご使用頂くため、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みいただいた後はお手元に保管してください。

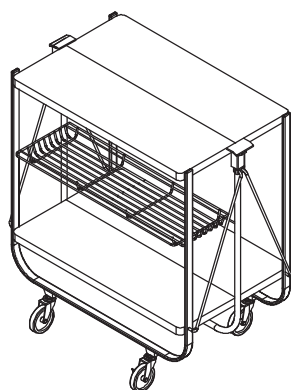

◀付属品の確認▶

当製品には下記A～Eの部品が同梱されています。不足がないこと、破損など異常がないことをご確認ください。
※不足部品や不具合などがございましたら、お買い求めの販売店までご連絡ください。

項目	部品名	数量	項目	部品名	数量	項目	部品名	数量	項目	部品名	数量	項目	部品名	数量
A	本体	1	B	キャスター	2	C	キャスターストッパー付	2	D	脚カバー	4	E	スパナ(付属品)	1

組立方法

ステップ 1	ステップ 2	ステップ 3
<p>①本体(A)のキャスター取付部分に脚カバー(D)を取り付けます。</p> <p>②スパナ(E)を使って、キャスター(B) キャスターストッパー付(C)を本体(A)に取り付けてください。</p> <p>③レバーを引上げると折りたたむことができます。</p>	<p>これで完成です。</p>	<p>折りたたみ時。</p>

◀製品の仕様▶

カタログコード : 24-7882-00 (ホワイト)
 品名 : 折りたたみワゴン MY-IJW100(ホワイト)
 材質 : 本体:スチール(粉状塗装)
 寸法 : 本体:W685xD75xH1200mm ・ キャスターΦ75mm(対角ストッパー付)
 重量 : 約6.2kg
 耐荷重 : 一段 約10kg ・ ワイヤーラック 約5kg

安全上のご注意	お手入れ
<p>!</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ご使用前に各部の点検をし、破損や変形、グラつきなど異常がある場合にはご使用しないでください。 ●平らな場所でご使用ください。凸凹のある不安定な場所に置くと、転倒してけがをする可能性があります。 ●設置に際して、直射日光が当たる場所、火気、ストーブなどの近く、湿気の多いところは避けてください。変色や変形、劣化の原因となります。 ●本製品の上に乗ったり、製品に寄りかかることは製品が転倒する恐れがありますので、おやめください。 ●耐荷重を確認の上、ご使用ください。耐荷重を超えて使用した場合は破損や変形、事故に繋がりますのでおやめください。 ●ネジがゆるんだまま使用しないでください。本体がこわれてケガをすることがあります。 ●安全のため、重い物は下の段に収納してご使用ください。 ●本製品は本来の目的以外の使い方はしないでください。ケガをすることがあります。 ●本製品を改造しないでください。 	<ul style="list-style-type: none"> ◎お手入れの際は、から拭きするが固く絞った布などで拭いてください。 ◎汚れがひどい場合には、水で薄めた中性洗剤を使用し、傷が付かないよう、柔らかい布で拭き取ってください。 ◎本製品に直接熱湯をかけて洗わないでください。変形する恐れがあります。 ◎タワシ・研磨剤入りスポンジ・両面スポンジの固い面などはご使用にならないでください。傷みの原因となります。 ◎塩素系洗剤・有機溶剤・クレゾールなどはご使用にならないでください。製品が劣化し、破損する恐れがあります。 <p>販売元 松吉医科器械株式会社 本社:〒113-8520 東京都文京区湯島3-14-9 湯島ビル3階 TEL :03-5816-8819 E-Mail:info@matsuyoshi.co.jp</p>