

## 取扱説明書

製品を安全にご使用いただくために、この取扱説明書よくお読みになり、お読みいただいた後はお手元に必ず保管してください。



### 注意

取り扱いを誤った場合に、人が怪我を負ったり財産に損害を受ける恐れがある内容を示しています。

- 本製品は、本来の目的以外に使用しないでください。また、加工や改造など行わないでください。
- ご使用前に破損や変形などの異常が無いか必ず点検してください。異常が見られる場合は使用を中止してください。
- 耐荷重(約6kg/フック1個あたり約1.5kg)以上の無理な力がかからないようにご使用ください。破損や事故の原因に繋がる恐れがあります。
- 左右のバランスが可能な限り均等になるように輸液バッグ等を取り付けてください。破損や事故の原因に繋がる恐れがあります。
- 天井レールには、医療用点滴対応レールを使用してください。また、天井レールの耐荷重にご注意ください。
- 伸縮をする際は必ず片方の手で本製品の支柱部分を持ちながら行ってください。
- MRI室で絶対に使用しないでください。重大な事故に繋がる恐れがございます。

### ■製品仕様

- サイズ：全長=585～880mm ■天井との隙間：約1cm ■重量：約277g
- 耐荷重：約6kg(フック1個あたり約1.5kg) ■材質：本体=ステンレス


### ■使用方法

#### 【使用前】

- 1.製品が破損などしていないか点検を行ってください。
- 2.フック(③)を出し、長さ調節ボタン(④)を用いて必要な長さに調整してください。長さ調整の際には、支柱(②)を片方の手で持ちながら行ってください。
- 3.レール用フック(①)を天井レールに引掛けてください。
- 4.輸液バッグなどを重さが不均等にならないようにフック(③)に掛けてください。

#### 【使用后】

- 1.使用した輸液バッグなどをフック(③)から外してください。
- 2.レール用フック(①)を天井レールから取り外してください。
- 3.フック(③)を収納し、長さ調節ボタン(④)を用いて一番短い状態にしてください。

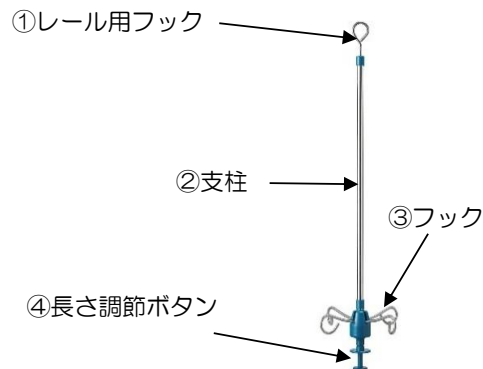

### ■お手入れ・保管方法

- 拭き取りの際は、固く絞った柔らかい布で水拭きしてください。
- 薬液などが付着した場合は、直ちに拭き取ってください。
- 風通しのいい直射日光が当たらない場所で保管してください。過度な高温多湿の環境で保管しないでください。
- 保管の際は、支柱の長さを一番短い状態にしてから保管してください。

(発売元)



松吉医科器械株式会社

<https://www.matsuyoshi.co.jp>