

折りたたみ式交互歩行器


この度は当製品をお買い上げ頂き、誠に有難うございます。安全にご使用頂くため、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みいただいた後はお手元に保管してください。



《付属品の確認》

当製品には下記A～Bの部品が同梱されています。不足がないこと、破損など異常がないことをご確認ください。
 ※不足部品や不具合などがございましたら、お買い求めの販売店までご連絡ください。

項目	部品名	数量	項目	部品名	数量
A	本体	1	B	伸縮パイプ	4本

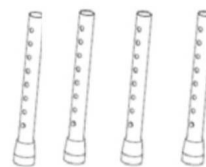

組立方法

ステップ1	ステップ2	ステップ3
<p>①本体 (A) 左右にあるレバーを同時に外側へ動かします。</p> <p>②本体を折りたたみの状態から展開します。</p>	<p>足パイプのプッシュボタンを押しながら、伸縮パイプ (B) に差し込んでください。</p> <p>4カ所それぞれのプッシュボタンが伸縮パイプの穴に固定されている事を確認してください。</p> <p>4本とも必ず同じ高さに調節してください。</p> <p>プッシュボタン (4カ所)</p>	<p>これで完成です。</p>

《製品の仕様》

カタログコード : 24-7473-00
 品名 : 折りたたみ交互歩行器 MY-1244
 材質 : アルミ・メッキスチール
 寸法 : 展開時 : W550xD400xH750~950mm ・ 折りたたみ時 : W550xD70xH750mm
 重量 : 約2.7kg

安全上のご注意	お手入れ
<p>●ご使用前に各部の点検をし、破損や変形、グラつきなど異常がある場合にはご使用しないでください。</p> <p>●平らな場所でご使用ください。凸凹のある不安定な場所に置くと、転倒してけがをする可能性があります。</p> <p>●設置に際して、直射日光が当たる場所、火気、ストーブなどの近く、湿気の多いところは避けてください。変色や変形、劣化の原因となります。</p> <p>●本製品の上に乗ったり、製品に寄りかかることは製品が転倒する恐れがありますので、おやめください。</p> <p>●4本の伸縮パイプは同じ高さに調節してください。プッシュボタンが確実に穴に固定されていることを確認してください。</p> <p>●本製品は本来の目的以外の使い方はしないでください。ケガをすることがあります。</p> <p>●本製品を改造しないでください。</p>	<p>◎お手入れの際は、から拭きするか固く絞った布などで拭いてください。</p> <p>◎汚れがひどい場合には、水で薄めた中性洗剤を使用し、傷が付かないよう、柔らかい布で拭き取ってください。</p> <p>◎本製品に直接熱湯をかけて洗わないでください。変形する恐れがあります。</p> <p>◎タワシ・研磨剤入りスポンジ・両面スポンジの固い面などはご使用にならないでください。傷みの原因となります。</p> <p>◎塩素系洗剤・有機溶剤・クレゾールなどはご使用にならないでください。製品が劣化し、破損する恐れがあります。</p>
<p>販売元 松吉医科器械株式会社</p> <p>本社 : 〒113-8520 東京都文京区湯島3-14-9 湯島ビル3階 TEL : 03-5816-8819 E-Mail : info@matsuyoshi.co.jp</p>	