



マツヨシ ノンラテックス駆血帯小児用


- 小児用サイズです。
- チューブは腕に結びやすく、ほどけにくいポリウレタン製。
- 従来の天然ゴムの質感を再現しています。
- ラテックスフリーですので安心です。

■品番：MY-5703

■サイズ：チューブ=φ5.8×350mm

■材質：金具=真鍮、チューブ=ポリウレタン

【チューブの取り付け方法】

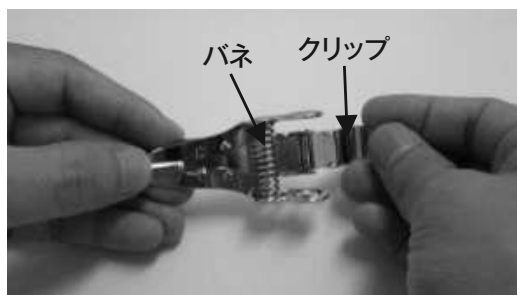

- ①金具を裏返しにして、バネからクリップを右に開いて「パチン」と外します。



- ②クリップの下の方からチューブを通します。



- ③チューブが1cm程度出るところまでチューブを差し込んでください。



- ④チューブを挟んだままクリップをもう一度バネに「パチン」と引っ掛けて完成です。

<発売元>

 松吉医科器械株式会社
<https://www.matsuyoshi.co.jp>