

## 抜管防止手袋『トレンちゃん』取扱について

この度は『抜管防止手袋 トレンちゃん』をお買上げいただき、ありがとうございます。

この商品は、山梨県の産官学連携をテーマに「医療関連ものづくり交流会」の中から看護師さんのアイデア（こんな商品があったらいいな！）が製品化された商品です。

ご意見・アイデア等ございましたら、下記までお寄せ下さい。

- 1) マジックテープの端は手首部に収納して下さい。
- 2) 手首はしっかりと固定して下さい。  
(緩いと外れたり、先端部分の開放部から指が出て抜管することもあります)
- 3) 中にカラーボールを入れていますが、他のもので代用いただいて構いません。
- 4) カラーボールの代わりに消臭分解ウールを入れて手の臭いを取る効果もございます。
- 5) 洗濯は、洗濯ネットに入れて洗濯機で水洗いして下さい。  
乾燥は陽の当たらない場所に手首マジックテープ側を上にして、日陰干しして下さい。  
(直射日光を受けるとビニール部が変形することがあります)
- 6) お手入れの際は中性洗剤をご使用ください。アルコールは使用しないでください。

サイズ：フリー  
入数：1組(2個入り)／袋  
材質  
透明カバー部：塩ビ  
手首部ホールド部：ポリエステル 100%

### ■商品お問い合わせ先



### マコト医科精機株式会社

〒409-3845 山梨県中央市流通団地北5番地  
TEL055-273-0333 FAX055-273-7626