

SHINWA

取扱説明書



かんたん O2タイガー



この度は、「かんたん O2 タイガー」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。



ご使用前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

お読みになった後は、いつでも確認できるよう大切に保管してください。

●各部名称

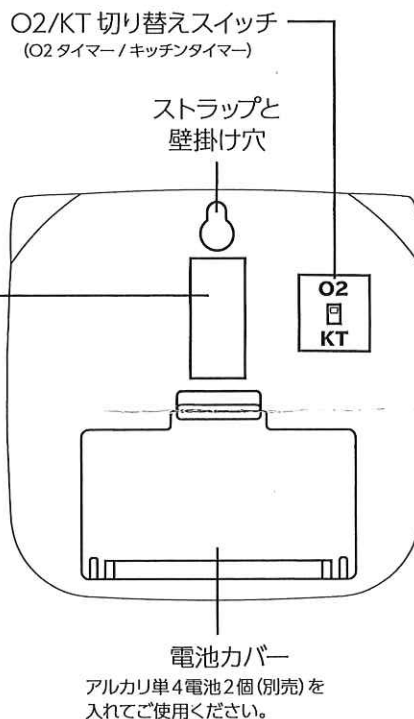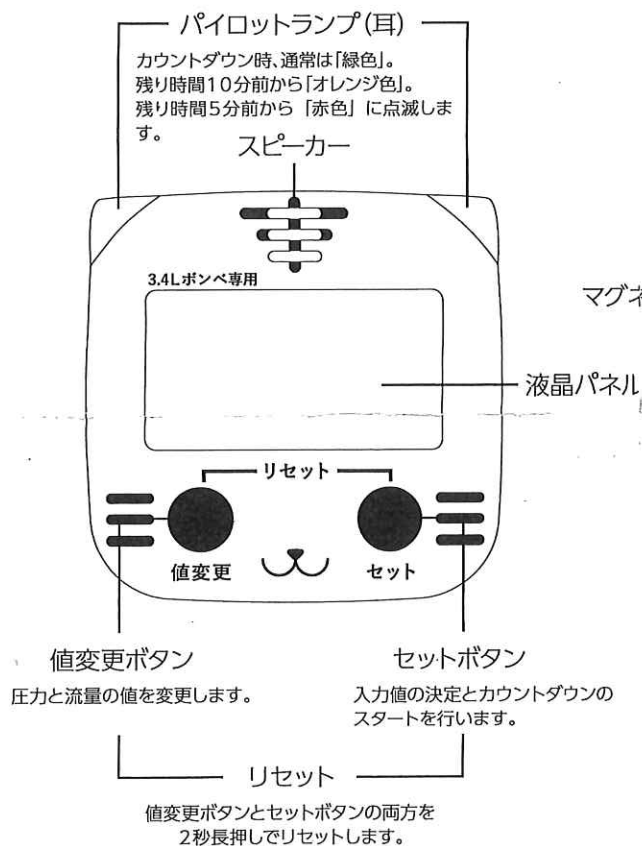


●電池交換方法

- ・電池カバーを開けて単4アルカリ乾電池を2個セットしてください。
- ・セットしたらカバーをカチッと音がするまで閉めてください。
- ※電池の極性(+-)を正しく入れてください

●表示画面(液晶パネル)


3.4Lポンペ専用

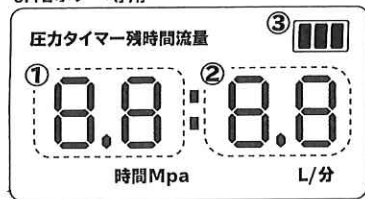


① 圧力 / 時間表示

② 流量 / 分表示

③ 電池残量表示 電池残量を3段階で表示します

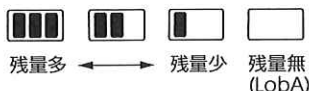

●設置イメージ

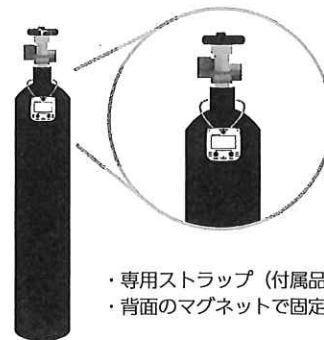

- ・専用ストラップ(付属品)で落下防止
- ・背面のマグネットで固定

●製品についてのご希望と注意事項

- ・本製品は3.4Lの酸素ポンペ専用タイマーです。
- ・O2タイマーモードで使用する場合、異なる容量のポンペでは絶対に使用しないでください。
- ・高温、多湿環境で保管しないでください。
- ・加熱、分解、充電、改造、水中や火中での使用は避けてください。
- ・落下の衝撃は、故障の原因となりますのでご注意ください。
- ・本体のお手入れの際、シンナー、ベンジン、ガソリン、灯油、アルコール等は使用しないでください。変色、変形、破損のおそれがあります。

●製品仕様

表示方法	液晶デジタル4桁	付属品	専用ストラップ
最大セット時間	99時間59分	材質	ABS樹脂(抗菌仕様)
電源	アルカリ単4乾電池2個(別売)	その他	操作時バックライト機能付
電池寿命	約2ヶ月(仕様頻度により変動)		

●操作説明

[O2タイマーモード 設定]

- ①本製品の背面にある O2/KT 切替スイッチを「O2」にセットしてください。
- ②電池をセットすると、表示画面が 1 秒間全表示し、自動的に「圧力設定」画面に切り替わります。
(電池をすでにセットしている場合、「値変更ボタン」と「セットボタン」を同時押し 1 秒間で表示画面が 1 秒間全表示し、自動的に「圧力設定」画面に切り替わります)
- ③「値変更ボタン」で 3.4L 酸素ポンベの圧力値を設定します。(圧力設定画面)
 - ・「3.0」からスタートし「15」まで 1.0 ずつカウントアップします。
 - ・設定値で「セットボタン」を押すと「流量設定」画面に切り替わります。
- ④「値変更ボタン」で 3.4L 酸素ポンベで設定した流量値に設定します。(流量設定画面)
 - ・「0.5」からスタートし「3.0」まで 0.5 ずつカウントアップ。「3.0」から「15」まで 1.0 ずつカウントアップします。
 - ・設定値で「セットボタン」を押すと「設定値確認」画面に切り替わり、設定した圧力と流量が表示されます。設定値を確認します。
→「セットボタン」を押すと、カウントダウンがスタートします。
→「値変更ボタン」を押すと、「流量設定」画面に戻ります。
→「値変更ボタン」と「セットボタン」を同時押し 1 秒間で初期画面に戻ります。

※注意事項※

- ・設定値に間違いがないか、必ず確認してください。
- ・「設定値確認」画面のままの状態では 5 秒後にアラート音が鳴ります。
- ・「圧力設定」画面、「流量設定」画面、「設定値確認」画面では無操作で 3 分経過すると、画面が消え設定値がリセットされます。
- ・設定中は、表示画面のバックライトが点灯します。
- ・電池残量が不足している場合、「設定値確認」画面から「セットボタン」を押しても画面表示に「LobA」(ローバッテリー)が表示点滅し、カウントダウンしません。その場合はすみやかに電池を交換をしてください。

[表示画面とパイロットランプについて]

カウントダウン中は残時間によって以下の動作になります。

【通常時】左右の耳(パイロットランプ)が緑色で点滅します。

10分前：5 秒間アラート音が鳴り、左右の耳がオレンジ色で点滅します

5分前：30 秒間隔でアラート音が鳴り、左右の耳が赤色で点滅します

1分前：1 秒間隔でアラート音が鳴り、左右の耳が赤色で点滅します

0秒：アラート音が 5 分間鳴りつづけ、左右の耳が赤色で点滅します

- ・カウントダウン中は「:」が常時点滅します。
- ・カウントダウン 1 分を切ると「分」表示消えて 59 秒から 1 秒ごとにカウントダウンします。
- ・カウントダウン中にリセットする場合は「値変更ボタン」と「セットボタン」を同時に 1 秒間押しと初期画面に戻ります。
- ・カウントダウン中に「値変更ボタン」もしくは「セットボタン」を押すと表示画面のバックライトが 10 秒間点灯します。

[キッチンタイマーモード 設定手順]

- ①本製品の背面にある O2/KT 切替スイッチを「KT」にセットしてください。
- ②電池をセットすると、表示画面が 1 秒間全表示し、自動的に「時間設定」画面に切り替わります。
(電池をすでにセットしている場合、「値変更ボタン」と「セットボタン」を同時押し 1 秒間で表示画面が 1 秒間全表示し、自動的に「時間設定」画面に切り替わります。)
- ③「値変更ボタン」で時間の値を設定します。(時間設定画面)
 - ・「0」分からスタートし「99」時間まで 1 ずつ値がアップします。(長押しすると 10 時間単位でアップします)
 - ・設定値で「セットボタン」を押すと「分設定」画面に切り替わります。
- ④「値変更ボタン」で分の値を設定します。(分設定画面)
 - ・「0」時間からスタートし「59」分まで 1 ずつ値がアップします。(長押しすると 10 分単位でアップします)
 - ・設定値で「セットボタン」を押すと「設定値確認」画面に切り替わり、設定した時間と分が表示されます。
→「セットボタン」を押すとカウントダウンがスタートします。
→「値変更ボタン」と「セットボタン」を同時押し 1 秒間で、初期画面に戻ります。
→「値変更ボタン」を押すと④の「分設定」画面に戻ります。

※注意事項※

- ・「時間設定」画面、「分設定」画面、「設定値確認」画面では無操作で 3 分経過すると、画面が消え設定値がリセットされます。
- ・電池残量が不足している場合、「設定値確認」画面から「セットボタン」を押しても画面表示に「LobA」(ローバッテリー)が表示点滅し、カウントダウンしません。その場合はすみやかに電池を交換してください。
- ・カウントダウン時 0 秒になった時にアラート音が 30 秒間鳴りつづけます。



- 製品保証 -

取扱説明書にそった正常な使用状態で、万が一保証期間内に故障がおきた場合、本保証書を添えて製品をお買い上げいただいた販売店にご持参ください。無料修理・調整いたします。尚本保証書の発行によるお客様の法律上の権利を制限するものではありません。本保証書は必ず以下欄の記入をお確かめのうえ大切に保存してください。

品名 かんたんO2タイガー

保証期間 お買い上げ 年 月 日より 1 年間

施設名

ご氏名

ご連絡先

(住所・電話番号)

販売店名

●販売元

株式会社ライフメッド

〒113-0033 東京都文京区本郷 2-17-17

TEL. 03-3814-7511 FAX. 03-3812-7561

WEB. www.lifemed.co.jp

●製造元

新和工業株式会社

〒650-0015 神戸市中央区多聞通 5 丁目 3-13

TEL. 078-382-2231 FAX. 078-382-2230

WEB. www.shinwa.co.jp