


この度は、点滴ポール電源コンセント LE-550 をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本書は、本製品の正しい使い方や使用上の注意について記載してあります。ご使用前に、本書をお読みになり、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。


目次

- ① 付属品とオプションパーツ
- ② 製品構成及び仕様
- ③ 安全及び取扱上のご注意
- ④ 製品取付け方法

① 付属品とオプションパーツ

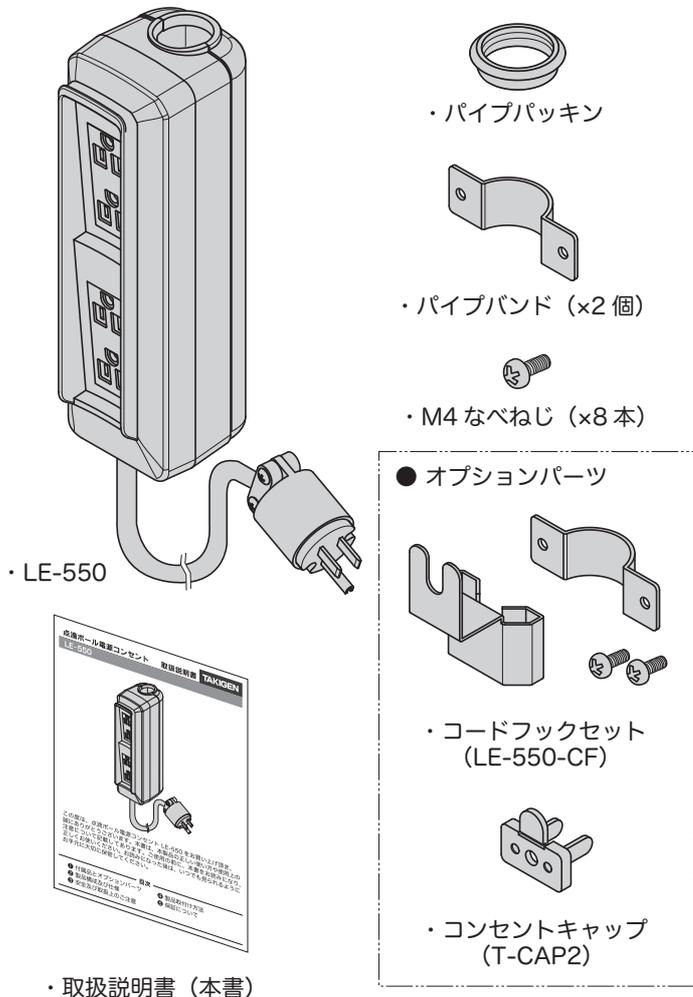

② 製品構成及び仕様

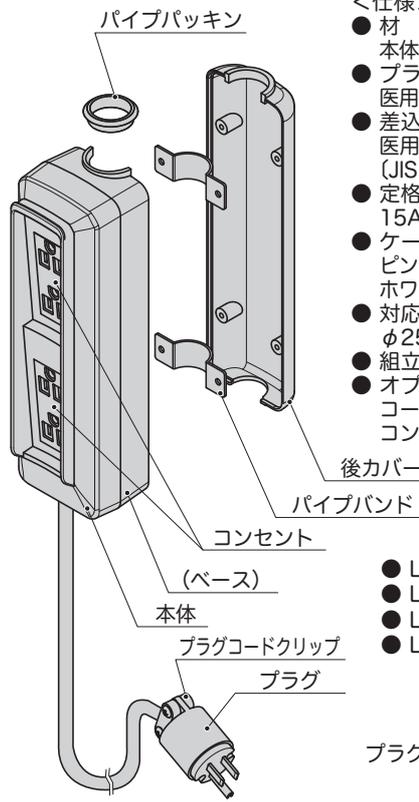

- <仕様>
- 材質：本体/ポリカーボネート (PC / ABS)
 - プラグ仕様：医用接地プラグ (JIS T 1021 適合品)
 - 差込口：医用接地コンセント 4 個口 (2x2) (JIS T 1021 適合品)
 - 定格容量：15A・125V (合計 1500W まで)
 - ケーブル長さ：ピンクタイプ/3m ブルータイプ/5m ホワイトタイプ/5m
 - 対応点滴ポール径：φ25.0mm~φ27.0mm
 - 組立式 (要工具)
 - オプションパーツ：コードフック (LE-550-CF) コンセントキャップ (T-CAP2)
- | | | |
|-----------------|---------|-------|
| ● LE- 550 - 3 - | White - | Pink |
| ● LE- 550 - 5 - | White - | Blue |
| ● LE- 550 - 5 - | Red - | White |
| ● LE- 550 - 5 - | Green - | White |
- コード長さ
- コンセント部
プラグコードクリップ部の色
- 本体 (ベース) の色

③ 安全及び取扱上のご注意

⚠ 警告


- 本製品に記載されている電流許容値を超えないように、電気製品を接続してください。
- 電流許容値を超える接続をした場合、火災や故障の原因となります。
- 電熱器具やエアコンなどで、テーブルタップの使用を禁止している機器があります。詳しくは接続される機器の取扱説明書をご確認ください。
- 分解改造は絶対にしないでください。
- トイレの液体洗剤をかけないでください。
- 万一洗剤や殺虫剤などの液体に浸かった場合は新しいものに交換してください。
- 絶縁不良、金属の腐食等が発生し大変危険です。
- コンセントの差込口や電源プラグの刃の間は、ほこりがたまるように定期的に清掃してください。漏電や火災の原因となります。
- コードを束ねて使用しないでください。発熱して焼損や火災の原因となります。
- 濡れた手でさわらないでください。感電の原因となります。
- 過度に水のかかるところ、金属片や粉塵の多いところでは使用しないでください。感電や火災の原因となります。

⚠ 注意


- 本製品は日本国内専用です。海外では使用しないでください。
- 本製品は屋外で使用しないでください。本製品は屋内専用です。
- 人や運搬車などでコードが直接踏まれる場所で使用しないでください。
- 振動するような場所に設置しないでください。
- コードを家具など重たいものにはさんだり、下敷きにならないようにしてください。
- 漏電や火災の原因となります。
- 傷ついた電源コードを使用しないでください。漏電や火災の原因となります。
- 本製品をステーブルなどで固定しないでください。漏電や火災の原因となります。
- 本製品を熱いものに近づけたり、加熱しないでください。本製品の故障や火災の原因となります。
- 接続するプラグは正しくコンセントに差込み接触させてください。また、プラグの栓刃が変形している場合は使用を中止してください。接触が不安定の場合、漏電や火災の原因となります。
- コードを足で引っ掛けたり、コードを引っ張らないでください。故障や断線の原因となります。
- コードを途中で切断し、別のコードを接続して延長しないでください。
- コードセットおよびテーブルタップの二重接続はしないでください。
- プラグを抜き差しするときは、必ず電気機器を切 (OFF) にした状態でおこなってください。
- コードを故意に折り曲げたり、ねじったりしないでください。
- コードを曲げたり伸ばしたりすると接続した電気機器が ON / OFF する場合、コードの内部が断線しています。使用を中断してください。
- プラグをコンセントから抜くとき、コードを引っ張って抜かないでください。必ず、プラグを持ってまっすぐに抜き差ししてください。

4 製品取付け方法





① パイプパッキンをポールに差込みます。

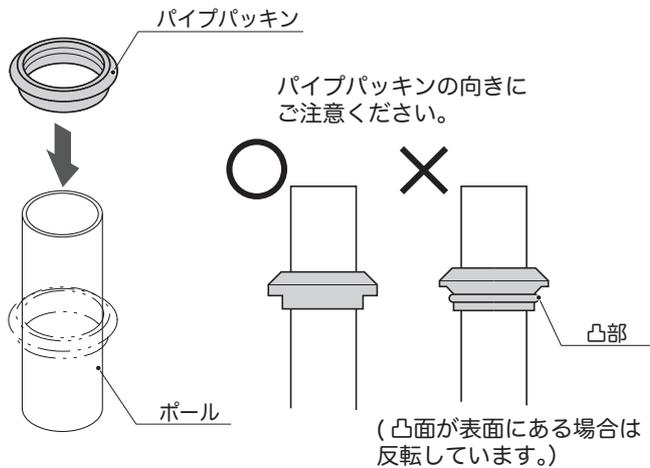

② 本体を2個のパイプバンドで固定してください。
パイプバンドの固定は付属の M4 なべねじを使用してください。
(推奨締付トルク：1.48N・m)
パイプバンドで固定したあと、本体とポールにガタつきがないことを確認してください。

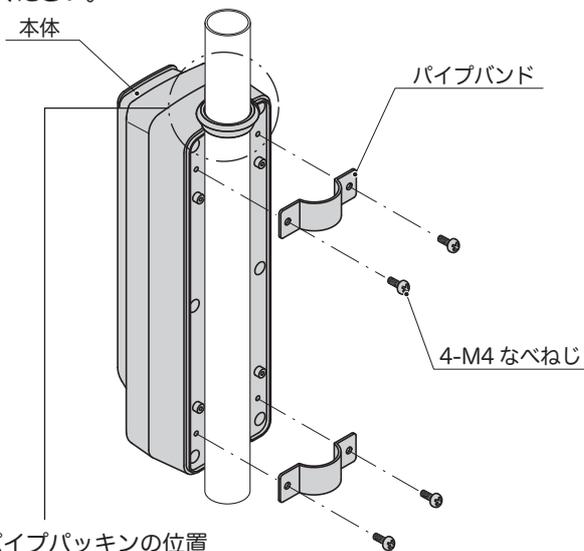

③ 後カバーを本体に固定してください。
後カバーの固定は付属の M4 なべねじを使用してください。
(推奨締付トルク：0.74N・m)

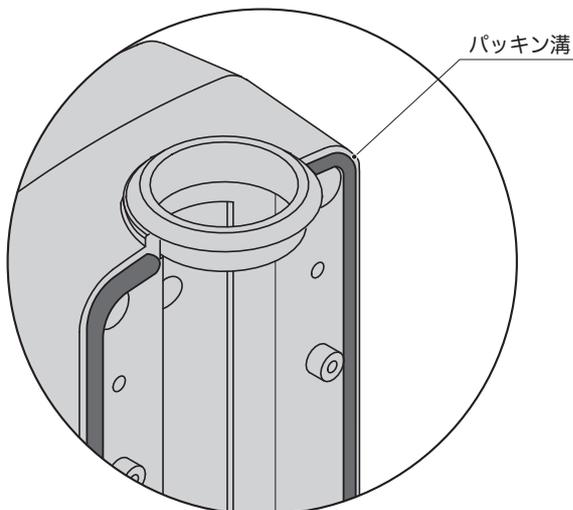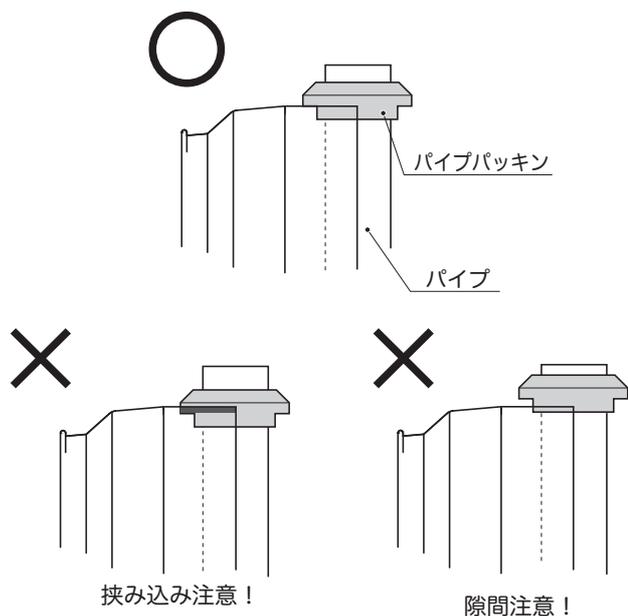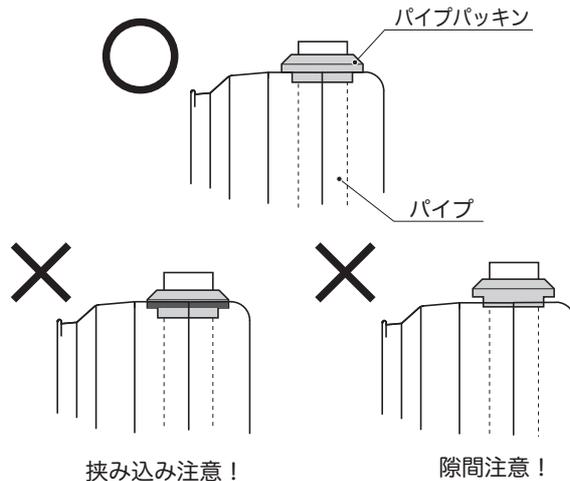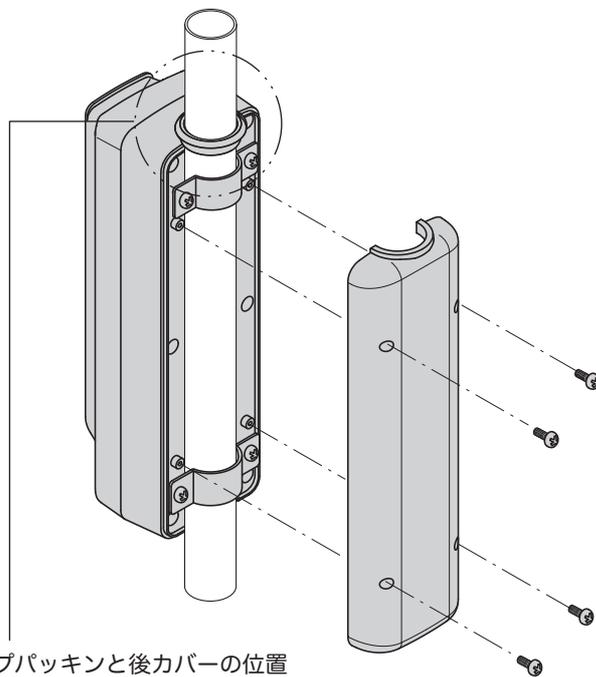

取付け時、パッキンが本体のパッキン溝から外れないようご注意ください。

タキゲンはあなたの工場です 試作品・特注品スグ創ります 一協力開発のタキゲン

創業明治43年
タキゲン 製造株式会社
永い歴史と最新の技術 品質保証の TAKIGEN マーク

フリーコール

0800-222-2004

受付時間 8:45~17:30 (土日、祝日を除く) 携帯電話、一部の IP 電話からはご利用いただけません。つながらない場合は 03-3492-2001 または、タキゲン WEB サイトまたは QR コードより最寄りの支店にご連絡ください。



<https://www.takigen.co.jp>

2019.05.kouhou Ni