

# ドライマックス テーブルパッド 取扱説明書

## 1. 重要な使用上の注意事項

- 再使用しないでください（ディスポーザブル製品）。
- 本品はカットして使用することはできません。
- 包装の破れや本品に傷等がある場合は使用しないでください。
- 可燃性の消毒剤（アルコール含有等）を吸収しないでください。電気メスや高温を出す医療機器を使用すると引火する恐れがあります。（電気メス等、併用する医療機器の取扱説明書等を熟読し、その指示に従うこと。）  
※アルコールを含有する消毒剤は火気厳禁です。多量の消毒剤の使用により、ドレープ(覆い布)、マットレスに吸収された消毒剤などから気化したアルコールに引火します。消毒剤の乾燥を十分確認すること。(PMDA 医療安全情報 No.15 より)
- 温熱器具や加温装置と患者の間に液体を吸収した製品を放置しないでください。
- 患者の下に敷いて使用する場合、局所血流障害や皮膚のずれなどの褥瘡発生原因を作らないよう留意してください。また、消毒剤等を吸収した製品を患者に接触させた状態で長時間放置しないでください。
- 創傷被覆保護材として使用しないでください。
- 滅菌モデルは、ドレーピングの上（滅菌野）で使用してください。
- パッドを傾斜状態で使用する場合は、液体の表面張力のために、液体が吸収される前にパッド表面を流れ落ちることがあるので、下方にくぼみを作り、液体を受けるようにしてください。

## 2. 使用目的

**本製品は、手術台や処置台の上で使用する両面吸収パッドです。**

手術中や処置中に発生する血液、体液、洗浄液等の液体を除去吸収します。

## 3. 製品の種類

品名	品番	滅菌	テープ	サイズ (cm)	ケース 入数	パッキング 単位	吸収性(L)		
							水道水	0.9%生食	
ドライマックス コンフォート	F20261	未滅菌	—	72x37	100	25 枚/袋 ×4 袋	6	2.4	
ドライマックス ステリ	ミディ	F50161	滅菌	—	56x37	100	50 枚/袋 ×2 袋	4	1.6
	ミディ テープ	F50163	滅菌	○	56x37	100	50 枚/袋 ×2 袋	4	1.6
	マキシ	F50241	滅菌	—	72x37	80	40 枚/袋 ×2 袋	6	2.4
	マキシ テープ	F50243	滅菌	○	72x37	80	40 枚/袋 ×2 袋	6	2.4

## 4. 保管方法と有効期限

- 直射日光、高温多湿を避けて保管してください。
- 滅菌モデルのラベルに滅菌有効期限が記載されています。

## 5. 廃棄方法

医療廃棄物として適切に廃棄してください。水道管には流さないでください。

### 〈お問い合わせ先〉

株式会社医療福祉研究所  
東京都荒川区西尾久 2-37-7  
Tel. 03-5855-3450