

# MATSUYOSHI マツヨシ ナースカート 取扱説明書


製品をお買い上げ頂きありがとうございました。

■ご使用前に、この取扱説明書をよく読んでいただき、正しくお使い下さい。

■お読みになった後は、大切に保管して下さい。

梱包内容

本体………1

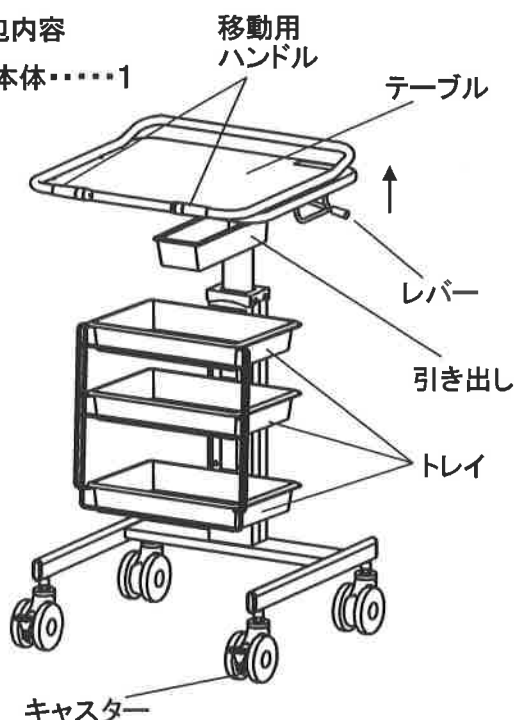

(操作方法)

## ●テーブルをさげる

レバーを押し上げながらテーブルを下に動かして下さい。  
レバーから手を放しますと、任意の位置でテーブルの高さが固定できます。



**警告**

レバーを操作する時は、必ずテーブルに手をそえて操作して下さい。  
搭載物の重みで急激に下降してケガをするおそれがあります。

## ●テーブルをあげる

レバー操作の必要はありません。  
テーブルを持ち上げて下さい。

(お手入れのしかた)

水または中性洗剤を含ませた柔らかい布で、軽く拭いて下さい。

## ！ ご使用上の注意

！ **警告** 誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

### ●上に乗らないで下さい。

テーブルの端に腰掛けたり、片手をついて体重をあずけないで下さい。転倒し、ケガや破損の原因となります。

### ●平らな場所を選んでご使用下さい。ガタツキやゆがみの原因となります。

### ●ご使用される時は、必ずキャスターのブレーキをロックしてからお使い下さい。

本体が移動・転倒し、ケガや破損の原因となります。

### ●改造、分解、用途以外の使用は絶対にしないで下さい。破損の原因となります。

### ●屋外や湿気・乾燥の著しい場所でのご使用は避けて下さい。テーブルの反り、変形の原因となります。

### ●テーブルに表示荷重より重い物は置かないで下さい。(耐荷重 15kg)

テーブルが破損してケガをするおそれがあります。

### ●各トレイに耐荷重より重い物は置かないで下さい。(耐荷重 3kg)

トレイ受けが破損し、トレイの落下やケガをするおそれがあります。

### ●トレイを引き出したまま手を離さないで下さい。

トレイが落下し、ケガや破損の原因となります。

### ●レバーを操作する時は、必ずテーブルに手をそえて操作して下さい。

搭載物の重みで急激に下降してケガをするおそれがあります。

## ！ テーブル部分の注意

### ●テーブルに熱いポットや湯呑みなどを直接置くことは避けて下さい。変色や変形の原因となります。

### ●直射日光やストーブなどの高熱は避けて下さい。変色や変形、火災の原因となります。

### ●カッターなどをテーブル上で直接ご使用になることは避けて下さい。テーブルにキズがつきます。

### ●液体をこぼした場合には、すぐに拭き取って下さい。

そのまま放置しますと変形したり、汚れが落ちにくくなります。

### ●ベンジン、シンナー、磨き粉、科学雑巾などは使用しないで下さい。変色や変形及び破損の原因となります。

松吉医科器械株式会社

〒113-8520 東京都文京区湯島 3-14-9 湯島ビル 3 階

TEL 03-5816-8819

587915110