





取扱説明書

製品を安全に末永くご使用いただくために、この取扱説明書よくお読みになり、お読みいただいた後はお手元に保管してください。

 危険	取り扱いを誤った場合に、危険な状況を起こりえて、死亡または重症を受ける可能性が想定される内容を示しています。
 注意	取り扱いを誤った場合に、人が怪我をおったり財産に損害を受ける恐れがある内容を示しています。

安全上のご注意

 危険	
<ul style="list-style-type: none"> ●ボックス内部の配線コードを破損する様なことはしないでください。配線コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。芯線が傷み加熱し、感電、火災の原因となります。 ●本体の上に、水の入った容器など乗せないでください。水がこぼれたりして中に入った場合、故障するだけでなく、感電、火災の原因となります。 ●濡れた手で電池交換などしないでください。感電の原因になることがあります。 ●壁面に取り付けの際は必ずしっかり固定した状態で作業を行ってください。本製品の落下や脱落などの恐れがあり、危険です。 ●本製品の取付けは、十分な強度のある垂直な壁面に確実に固定してください。十分でない場合本製品が落下し、機器の故障やケガの原因となります。 ●警報ブザーは大音量が鳴ります。絶対に耳のそばに近づけないでください。聴覚が低下する恐れがあります。 	
 注意	
<ul style="list-style-type: none"> ●マツヨシAED収納ボックス（壁掛式）はAED（自動体外式除細動器）を収納する製品です。本製品を目的以外の用途では使用しないでください。 ●本製品を使用する前に破損や異常が発生していないか、ご使用前に必ず点検してください。 ●本製品を加工・改造など行わないでください。 ●設置にあたりましては、通行などの妨げにならないように、周囲の状況に十分配慮して設置してください。 ●壁面に取り付ける場合、施工の専門業者に依頼いただき、壁材質を確認後に取り付けてください。 ●本製品は屋内用です。屋外など湿気の多い場所でのご使用はしないでください。 	

【商品仕様】

- 外形寸法：W400×D180×H450mm ■AED収納部内寸：W390×D160×H350mm
- 重量：約5.8kg ■材質：スチール（本体）■電源：9V角型乾電池×1コ（付属）

■各部の名称

ボックス外観		ボックス内部	
 <p>取手</p> <p>ロック解除ボタン</p> <p>警告ブザー連動スイッチ</p>		 <p>電池ボックス</p> <p>AED収納部</p>	
		 <p>ダルマ穴</p>	

■設置方法

- 次の順で進めてください
①ボックスの設置 ②警報ブザーの動作確認 ③AED機器ならび付属品の収納 ④ドア締めにて運用開始
- 壁面に取り付ける場合、施工の専門業者に依頼いただき、壁材質を確認後に取り付けてください。
《手順》
(1) 取り付け場所を決めてください。
(2) ボックス内部の4点のダルマ穴よりビスを打ち込んで壁面に固定します。
※本製品には、コーススレッドビス（木ネジ）が付属しておりますが、壁面の設置強度によってアンカーボルトなど別途ご用意のうえ、取り付けてください。



危険

本製品の取付けは、十分な強度のある垂直な壁面に確実に固定してください。
十分でない場合本製品が落下し、機器の故障やケガの原因となります。

■警報ブザーの動作確認



警報ブザーON/OFFスイッチ

- 出荷の段階にて9V角型乾電池が電池ボックスに収納されています。
- 電池ボックスの「警報ブザーON/OFFスイッチ」を左にスライドすると警報ブザーが鳴ります。
ブザーの鳴動を確認後、直ちにスイッチをOFFにしてください。



危険

警報ブザーは大音量の音が鳴ります。
絶対に耳のそばに近づけないでください。
聴覚が低下する恐れがあります。

《電池交換》

電池交換は電池ボックスのネジをプラスドライバーで開け、樹脂の電池ケースより電池を取り出して交換してください。



■運用開始

- AED機器ならび付属品（消耗品など）を収納後、警報ブザーON/OFFスイッチをONにし、扉を閉めてください。

（発売元）



松吉医科器械株式会社

<https://www.matsuyoshi.co.jp>