


シングルユースボール用ラック

400-063004

組立手順書

1,各部の名称

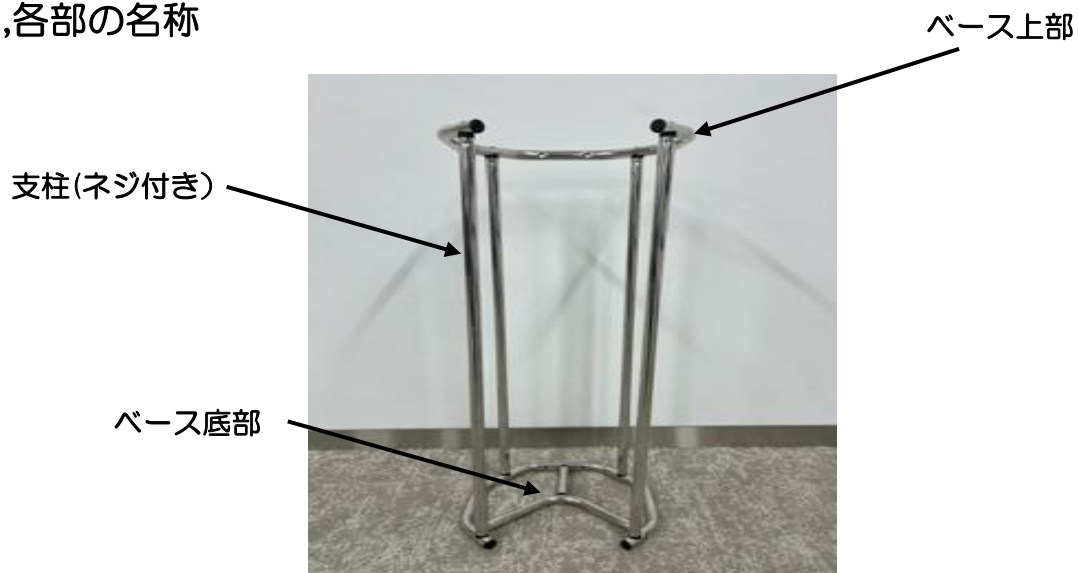

2,組み立て方法

【準備】

それぞれの部品を梱包から取り出してください。

❗ 組立の前に部品の不足、破損等を必ず確認してください。

【部品一覧】

- ①ベース底部 1個
- ②ベース上部 1個
- ③支柱(ネジ付き) 4本
- ④壁打ち用ネジセット 4組


【準備する工具】

- ・プラスドライバー




【組み立て手順】

- 1,支柱の両端からプラスドライバーを使用し、ネジを取り外してください。
ベース底部にある差込穴と支柱を合わせ、取り外したネジでしっかりと固定してください。

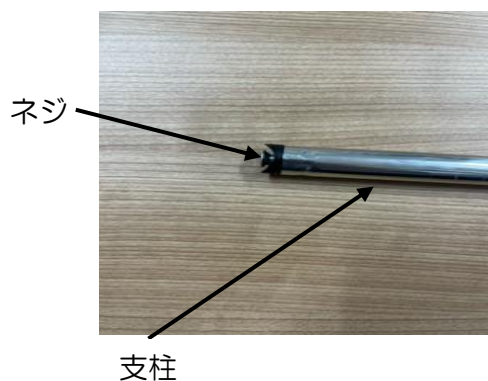

- 2,1と同様にベース上部にある差込穴と支柱を合わせ、取り外したネジでしっかりと固定してください。これで完成になります。

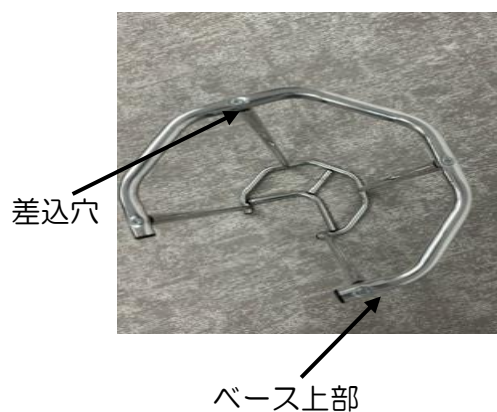

【壁に取り付ける場合】

- ❗ 施工の専門業者に依頼いただき、壁材質等を確認後に取り付けてください。

《取り付け手順》

- 壁に穴を開ける位置を決める。
- 直径6.35mmのドリルビットで深さ38mmまで穴を開ける。
- 同じ手順で残り3つの穴も開ける。
- 壁の穴に壁打ち用ネジセットのプラスチック製のネジを入れる。
- 差込穴と壁の穴を合わせ、壁打ち用ネジセットのネジでしっかりと固定する。



松吉医科器械株式会社

〒113-8520 東京都文京区湯島3-14-9 湯島ビル3階
TEL: (03) 5816-8819 (音声ガイダンス)