
制 菌 そらまめ クッション

取 説 明 扱

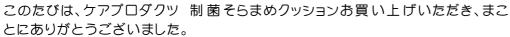

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

※「CSC-4301 ファインビーズそらまめクッション」から改称いたしました。 製品に変更はありません。





使用上の注意



- ・ 包 装 用 のポリ袋 をか ぶると、窒 息 する危 険 があります。 クッションを取り出 した後 は、穴 をあけ て廃棄してください。
- ・ カバー破損などで中のビーズがこぼれ出た場合、速やかに使用を中止し、ポリ袋に入れるな ど、ビーズが飛 散して吸 い込 んだりしないような処 置をした上 で廃 棄してください。
- 火 気 を近 づけないでください。 溶 けたり燃 え出したりする場 合 があります。



- このクッションは、身体の各部の体位保持(ポジショニング)を行うために作られています。それ以外の目的 に使用しないでください。
- クッションを使用中(ケア動作を含む)の喫煙は、おやめください。火種の落下等によりクッションに火が燃え 移ると、火災や火傷の原因となります。
- ヒーター上 やストーブの近くなど、高温になるところに置かないでください。変形 や、製品の寿命を著しく縮め る原因になります。
- 過度の荷重や力を加えると、破損の原因となります。特に認知症の方など、判断力理解力等の問題から過 度の力を加える可能性のある人にお使いいただく場合などは、ケアされる方が十分に注意をしてください。
- 皮膚に反応性の充血など、圧迫による影響が見られないか、状態を観察しながらお使いください。異常が 認められた場合、直ちに使用を中止し、医師等の指示に従ってください。特にクッションを使い始めた時は、 こまめに皮膚の状態を確認してください。
- 褥瘡(床ずれ)の創部(発赤を含む)や、皮膚障害などのある部分には、クッションを当てないでください。
- 麻痺や感覚障害のある方にお使いになる場合、クッションを入れたことにより無理な力がかかっても、分か らないことがあります。十分に気をつけてお使いください。
- カバーが破損して、ビーズを飲み込んでしまっても、消化されずに排泄されます。多量に飲み込んでしまった 場合は、医師の指示に従ってください。またビーズが目に入った場合、清浄な流水で洗眼してください。異 常を感じた場合は、眼科医の指示に従ってください。 その他吸い込んだり耳に入ったりした場合は、専門医を受診し、指示に従ってください。
- 常に乾燥した清潔な状態で使用してください。特に洗濯後は、日陰で十分乾かしてから使用してください。
- カビの発生や、過湿による皮膚のしん軟(ふやけ)によるトラブルなどを引き起こすことがあります。

お手入れの方法

- 汚れた場合は、洗濯してください。手洗いで丸洗いし、自然乾燥させてください。 乾 燥 機 でのタンブラー乾 燥 はできません。70℃以 上 の温 度 がかかると、中 材 のビーズが脱 泡して、収 縮してしまいます。 ※縦型洗濯機では、水に浮いてしまいます。手洗いをお勧めします。
- 除 東漂 白をする場合は、規定濃度に希釈した塩素系漂白剤(ハイター等)や過酸化水素系漂白剤を使用してくださ い。薬剤使用後は、清水によるすすぎを十分に行ってください。

[仕	様]	

品名 / 品番	制 菌 そらまめクッション / CSC-4301
寸法(約·cm)/重量(約·g)	長さ47×幅 27×厚さ12 / 260
材質中材	発 泡 ポリスチレンファインビーズ
カバー	ポリエステル 100%、JAFET 特定用途制菌・吸水・速乾・帯電防止加工
カラー	フレッシュグリーン

[開発・販売元]

ケアプロダクツ www.care-products.jp

〒254-0813 神奈川県平塚市袖ケ浜 17-40-307 TEL 0463-26-6201 FAX 0463-26-6202 e-mail info@care-products.jp

