

ビーズ角クッション PRO



取扱説明書

このたびは、ケアプロダクツ ビーズ角クッションPROをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。



使用上の注意



警告

- ・包装用のポリ袋をかぶると、窒息する危険があります。クッションを取り出した後は、穴をあけて廃棄してください。



注意

- ・このクッションは、人の身体各部の体位保持（ポジショニング）を行うために作られています。それ以外の目的に使用しないでください。
- ・クッションを使用中（ケア動作を含む）の喫煙は、おやめください。火種の落下等によりクッションに火が燃え移ると、火災や火傷の原因となります。カバーには難燃加工が施されていますが、不燃ではありません。
- ・ヒーターの上や吹き出し口の近く、ストーブの近くなど、高温になるところに置かないでください。変形や、製品の寿命を著しく縮める原因になります。
- ・過度の荷重や力を加えると、破損の原因となります。特に認知症の方など、判断力理解力等の問題から過度の力を加える可能性のある人にお使いいただく場合などは、ケアされる方が十分に注意をしてください。
- ・皮膚に反応性の充血など、圧迫による影響が見られないか、状態を観察しながらお使いください。異常が認められた場合、直ちに使用を中止し、医師等の指示に従ってください。特にクッションを使い始めた時は、こまめに皮膚の状態を確認してください。
- ・褥瘡の創部（発赤を含む）や、皮膚障害のある部分には、クッションを当てないでください。
- ・麻痺や感覚障害のある方にお使いになる場合、クッションを入れたことにより無理な力がかかっても、分からないことがあります。十分に気をつけてお使いください。
- ・常に乾燥した、清潔な状態で使用してください。また、汚れた場合は、清拭してください。
- ・防水生地を使用していますが、縫い目からは、水分などが浸入します。丸洗いや液体をかけるようなことは避けてください。万一クッション内部に水分が入ると、乾かすことはできません。
- ・蒸れが気になるときや、腰周りなど汚れやすい場所でお使いのときは、枕カバーに入れたり、タオルなどを巻くなど、カバーをしてお使いいただくことをおすすめします。

お手入れの方法

- ・洗濯は、できません。汚れた場合は、清拭してください。
- ・消毒が必要な場合は、消毒用エタノールやヒビテン等の消毒薬で湿らせた布で清拭するか、速乾性消毒薬（ウエルパス等）を少量掛け、拭きとった後、日陰でよく乾燥させてください。濡れてしまった場合も、風通しの良いところで陰干ししてください。
- ・ノロウイルスやC型肝炎ウイルス対応などで、塩素系の消毒薬が使われた後は、塩素臭が消えるまで水拭きをしてください。
薬液がカバー生地表面に残留して濃縮すると、生地の防水膜を劣化させます。

[仕様]

	S サイズ	M サイズ	L サイズ
品番	CKP-3001	CKP-4501	CKP-6001
寸法（約・cm）	長さ 30×幅 23×高さ 7	長さ 45×幅 30×高さ 11	長さ 60×幅 30×高さ 11
重量（約・g）	120	200	300g
材 中材	発泡ポリスチレンビーズ		
質 カバー	ポリエステル 100%、ウレタンラミネートによる防水・特定用途制菌・難燃加工(Galax®MC)		
カラー	ライトグリーン	ダークグリーン	ライトグリーン

[開発・販売元]

ケアプロダクツ
www.care-products.jp

〒254-0813 神奈川県平塚市袖ヶ浜 17-40-307
TEL (0463)26-6201 FAX (0463)26-6202
e-mail info@care-products.jp