

# ダンプフリーパッド 取扱説明書

このたびは、ケアプロダクツ ダンプフリーパッドをお買い上げいただき、  
まことにありがとうございました。  
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。



## 使用上の注意

### ！ 警告

- ・ ダンプフリーパッドは、ベッド上での体位変換に使用するためのものです。  
移乗介助など、全身を持ち上げたり、吊り下げるような使用方法は、おやめください。

### ！ 注意

- ・ ダンプフリーパッド上での喫煙は、おやめください。火種の落下等により火が燃え移ると、火災や火傷の原因となります。
- ・ 常に乾燥した清潔な状態で使用してください。特に洗濯後は、十分乾かしてから使用してください。カビの発生や、過湿による皮膚のしん軟(ふやけ)によるトラブルなどを引き起こすことがあります。

## 使い方

- ・ 平らで滑らかな面を身体側に、メッシュ面をマットレス側(下側)にしてお使いください。
- ・ ベッドメイクした最も上部(身体の直下)に敷き、ダンプフリーパッド上にお休みください。  
そのままダンプフリーパッドを用いて体位変換できます。また、蒸れも防止できます。



## お手入れの方法

- ・ 洗濯できます。発汗時やシーツ交換時など、汚れがひどくならないうちに、洗濯してください。
- ・ 塩素漂白はお勧めしません。漂白される場合は、酸素系(過酸化水素)漂白剤をお使いください。  
※ 塩素漂白は、製品の中でも特にナイロン部分(立体構造を作っている部分)の劣化を促進します。どうしても塩素の強い漂白力を必要とされる場合は、短時間で漂白処理を終え、十分にすすいでください。  
※ 塩素漂白や高温水での滅菌洗濯を繰り返し行った場合、通常の洗濯に比べて生地劣化が進むことがあります。

## 製品の特徴

- (1) 旭化成せんの「フュージョン<sup>®</sup>」と「テクノファイン<sup>®</sup>」を一体的に使用。  
速乾性に優れ、滑らかな肌触りのテクノファインが、汗を素早く広げ、ベタつきを抑えます。  
下面のフュージョン<sup>®</sup>の立体構造は、クッション性に優れ、表面の汗を素早く下側に放散します。
- (2) 身体(寝衣)のすぐ下にダンプフリーパッドを敷くことで、パッドを持ってラクラク体位変換できます。  
サラッとした感覚を保ちますので、体位変換後も、快適にお休みいただけます。
- (3) ベッドのヘッドアップで身体がずり下がった場合、ダンプフリーパッドを持って、位置を直せます。
- (4) 腰が有る生地ですので、しわになりにくく、しわが寄っても容易に広げられます。バスタオルのように、湿気を吸うと強固なしわが寄って、悩まされることはありません。
- (5) 体圧分散寝具などで身体が沈みこんだ状態でお使いいただいても、十分な幅を持たせました。
- (6) 外周部には、テープなど圧迫の元となるものを使用していません。
- (7) 全身用は、シーツの代わりとしてもお使いいただけます。コット用は、小児・新生児用にお使いください。

## ご利用のヒント

- ・ 体位変換を行うときは、必ず「声掛け」をしてから行いましょう。いきなり身体を動かされると、不快なばかりでなく、緊張したり、不穩の原因となることもあります。
- ・ ずり下がり直す場合、左右同時に一度に持ち上げるのではなく、左右を交互に少しずつ身体を動かすと、自然な身体の動きに近づきます。

[仕様]	品名	ダンプフリーパッド	ダンプフリーパッド 全身用	ダンプフリーパッド コット用
	品番	CDP-1301	CDP-1901	CDP-0701
	寸法(約・cm)	幅 80 × 長さ 130	幅 80 × 長さ 190	幅 36 × 長さ 69
	重量(約・g)	400	600	100
	材質	上面/ポリエステル 100%(テクノファイン <sup>®</sup> ) 下面/ナイロン・ポリエステル(フュージョン <sup>®</sup> )		
	カラー	白		

[開発・販売元]

※「フュージョン<sup>®</sup>」と「テクノファイン<sup>®</sup>」は、旭化成せんい株式会社の登録商標です。

ケアプロダクツ  
www.care-products.jp

〒254-0813 神奈川県平塚市袖ヶ浜 17-40-307  
TEL (0463)26-6201 FAX (0463)26-6202  
e-mail info@care-products.jp

