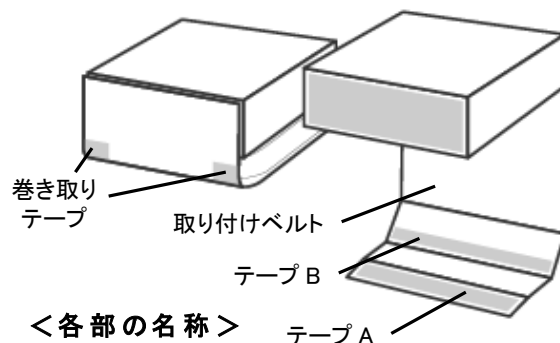


フットサポートクッション 取扱説明書



このたびは、ケアプロダクツ フットサポートクッションをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。



使用上の注意

警告

- 必ずレッグサポート長（足載せ台の高さ）を調整して、お使いください。
- フットサポートクッション（以下クッション）を取り付けると、クッションの厚み分、レッグサポート長が減少します。
- 調整をしないと、膝裏が浮いてしまい、坐骨部や仙骨下端部に圧力が集中して、褥瘡発生のリスクが高まります。また、脚が広がりやすくなる、臀部が前方にずれやすくなるなどの不都合が発生します。

注意

《調整について》

- 身体に合った車いすを、適切に調整してお使いください。
- レッグサポート長は、一般的には大腿骨が車いす座面と平行になるように調整しますが、股関節の屈曲角制限がある方の場合などはこの限りではありません。シーティング調整の出来るスタッフ（理学療法士や作業療法士、リハエンジニアなど）に、ご相談ください。
- レッグサポート長の調整方法は、お使いの車いすの取扱説明書でご確認ください。

《取り付けについて》

- クッションは、取り付けベルトを十分に引っ張って、動かないようにしっかりと取り付けてください。取り付けが緩いと、使用中にクッションがずれることがあります。
- 以下の車いすには、取り付けられません。無理に取り付けることは、おやめください。
 - フットサポートの外周（奥行き＋厚み）×2が、約40cm以上の車いす
 - レッグパイプ（フットサポート取付パイプ）の内・内寸法が、約34cm以下の車いす
 - ベルト式の足載せなど、特殊な形状のフットサポート形状やレッグサポート形状の車いす

《車いすへの乗降時》

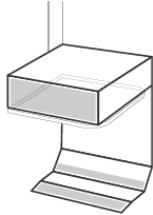

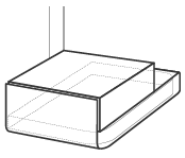
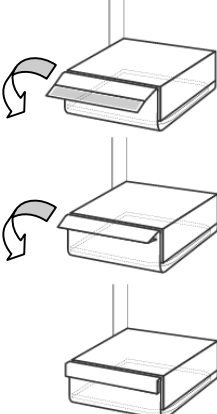
- クッションを取り付けると、フットサポートが十分に跳ね上げられなくなります。車いすへの乗降時（介助での乗降含む）には、レッグサポートをスイングアウトして（全体を外側に回して）ください。スイングアウトできない車いすでお使いの場合は、乗降時にはその都度クッションを取り外してください。フットサポートが十分に跳ね上げられていない状態で乗り降りをする、足がフットサポートに引っかかり、ケガや転倒などの原因となります。

《その他》

- クッションに火気を近づけないでください。火災や火傷の原因となります。
- 過度の荷重や力を加えると、破損の原因となります。特に認知症の方など、判断力理解力等の問題から過度の力を加える可能性のある人にお使いいただく場合などは、ケアをされる方が十分に注意をしてください。
- 皮膚に反応性の充血など、圧迫による影響が見られないか、状態を観察しながらお使いください。異常が認められた場合、直ちに使用を中止し、医師等の指示に従ってください。特にクッションを使い始めた時は、こまめに皮膚の状態を確認してください。
- 汚れた場合は、洗濯してください。カバーごと丸洗い出来ます。

- ・ 常に乾燥した清潔な状態で使用してください。特に洗濯後は、日陰で十分乾かしてから使用してください。カビの発生や、過湿による皮膚のしん軟(ふやけ)によるトラブルなどを引き起こすことがあります。

取り付け方 (表面右上の、<各部の名称>をご参照ください)

<p>① 取り付けベルトを伸ばした状態で、ベルトを車いすの後ろ側にして、フットサポート上にクッションを置いてください。</p> <p>※ 既に車いすに乗車されている場合は、ここでクッションに足を乗せていただいても構いません。</p>	
<p>② ベルトを、フットサポートの下側を回して、前側に持ってきます。</p>	
<p>③ ベルトのマジックテープを、クッションのマジックテープ部に付けて、クッションを固定します。 このときに、クッションがずれないようにフットサポートに押し付けるようにしながら、ベルトを引っ張って、しっかりと取り付けてください。 大き目のフットサポートで、テープ A をお使いのときは、取り付け終了です。</p>	
<p>☆ 小さめのフットサポートで、テープ A では十分に固定が出来ないときには、テープ B をお使いください。</p> <p>④ (テープ B をお使いのとき)テープ A を2回巻いて、巻き取りテープに付けてください。</p>	

お手入れの方法

- ・ 汚れた場合は、洗濯してください。
水もしくは中性洗剤を使って、手洗いで中芯ごと丸洗いができます。
- ・ 乾燥は、脱水後に日陰で自然乾燥させてください。家庭用のタンブラー乾燥も可能です。
- ・ 塩素系漂白剤(ハイター等)は使用しないでください。除菌漂白をする場合は、過酸化水素系の漂白剤を使用してください。またドライクリーニングもできません。
- ・ 消毒が必要な場合は、指定濃度に希釈したエタノールやヒビテン等の消毒薬をお使いください。

[仕様]	品名	フットサポートクッション
	品番	CFC-1001S
	寸法(約・cm)	幅 20×奥行 15×厚さ 6 取り付けベルト長 28 (片側)
	重量(約・g)	150(片側)
	材質	中材 特殊加工低反発ウレタンフォーム(ウォッシュャブル) カバー ポリエステル 100%、底面及び取り付けベルト部には特殊ウレタン樹脂による滑り止め加工
	カラー	グレー

[開発・販売元]

ケアプロダクツ
www.care-products.jp

〒254-0813 神奈川県平塚市袖ヶ浜 17-40-307
TEL (0463)26-6201 FAX (0463)26-6202
e-mail info@care-products.jp

