

ピタットくん90ワイド取扱説明書



90度側臥位・60度側臥位をサポートするクッションです。




クッション内部に筒状クッションを固定しているため、背中への倒れ込みがしにくくなっています。骨盤が倒れ込みにくいので、仰向け防止効果が期待できる。




形状と各部の名称

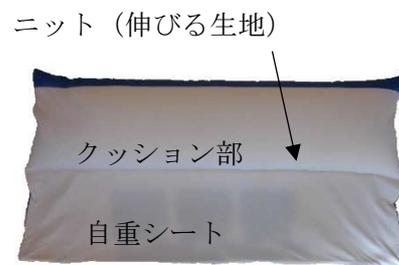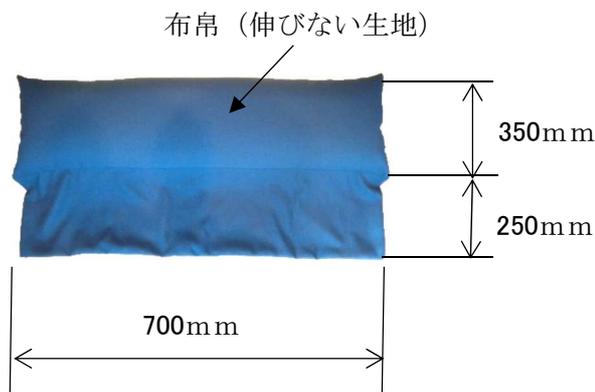

60度側臥位

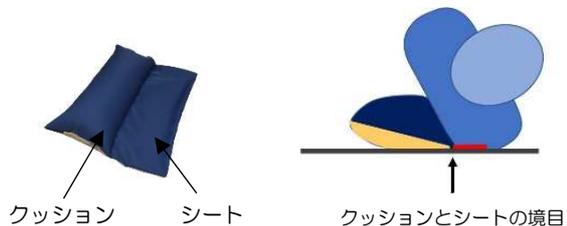

90度側臥位

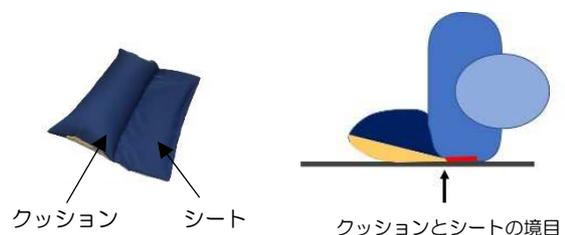

使用例



布帛を身体側に、自重シートを身体の下に敷いて使用



・重度な嚥下障害の完全側臥位法での使用
・仰向け防止に

使用方法

自分で身体を動かせる方



自重シートをベッドの中央に置く。



クッションと自重シートの境目が身体にかかるように体を動かす。



自分では身体を動かしにくい方



自重シートを布帛側に折り曲げる。



折り目を背面とベッドの境にセットする。



自重シートとクッションの間に手を入れて、患者の体の下に手とともに自重シートを敷きこむ。

身体が安定するように、自重シート及びクッションを調整する。

※2～3時間おきに体位変換される場合は、自重シートの半分を目安に敷きこんでください。シートが取りにくくなりますので。

ピタットくん90ワイド仕様

サイズ	外形 600×700 クッション部幅 350/自重シート 250×長さ 700
材質	布帛（ポリエステル 100%）、ニット（ポリエステル 100%） ビーズクッション（ポリスチレン、ポリエチレン重合体）
重量	約 800 g

お手入れ方法

- ・唾液、嘔吐、頭髮、薬剤などが生地に付着し、不衛生になった場合、洗濯と消毒ができます。
- ・洗濯はぬるま湯で、手洗い後、脱水して下さい。乾燥機を避けて（耐熱 75 度）日陰干して下さい。
- ・ピタットくん90ワイドは、0.1%次亜塩素酸消毒対応の生地・発泡ビーズを使用しています。

製造・販売 **誰もが楽しい食事を**

株式会社 甲南医療器研究所

〒653-0032 神戸市長田区苅藻通 2-7-6

TEL 078-651-3819 FAX 079-421-7404

e-mail: info@easyswallow.jp

<http://easyswallow.jp/>

営業時間（月～金）9時～18時