

ドレインバッグホルダー

型式：DBH-REM2

取扱説明書

まえがき

この度は、ドレインバッグホルダーをお買い上げいただき、ありがとうございます。


- 正しく安全にご使用いただくために、この「取扱説明書」をよくお読みください。
- この「取扱説明書」をお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- お買い上げの製品は、改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。

使用目的

- 本製品は車いすに装着し、ドレインバッグなどを取り付けることを目的としています。

各部の名称

- 開梱後、下記の部品がすべて揃っていること、破損していないことをご確認ください。
万一、部品の不足や破損があった場合には、販売店または直接弊社までご連絡ください。

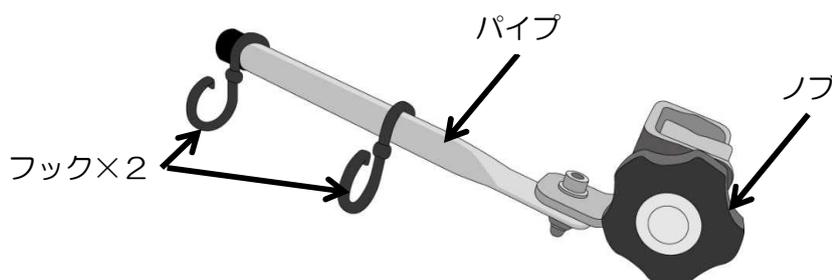

取扱説明書（本紙）×1

ドレインバッグホルダー×1

安全に使用するための注意事項


- 本製品を目的以外に使用しないでください。
思わぬけがや破損の原因となります。
- ご使用前に、本製品にドレインバッグを取り付けた状態でドレインバッグが地面に擦らないことをご確認ください。
ドレインバッグが地面に擦れる状態で使用すると、ドレインバッグの破損や思わぬけがの原因となります。
地面に擦れる場合は、本製品の車いす取付位置を高くするか本製品の使用を中止してください。
- 本製品を車いすに取り付ける際は、ゆるみがないようにノブをしっかりと締めてください。
ノブがゆるいと、思わぬけがや破損の原因となります。
- 本製品の耐荷重（2kg）を超えて使用しないでください。
思わぬけがや破損の原因となります。
- 本製品を使用しないときや車いすを折りたたむときは、本製品を取り外すか、邪魔にならないよう本製品の向きを調整してください。
思わぬけがや破損の原因となります。
- 本製品が破損・変形した場合は使用を中止してください。
思わぬけがをする恐れがあります。

使用方法



警告

車いすを広げて、ブレーキをロックしてから、付け外し作業を行ってください。
車いすが動き、思わぬけがをするおそれがあります。

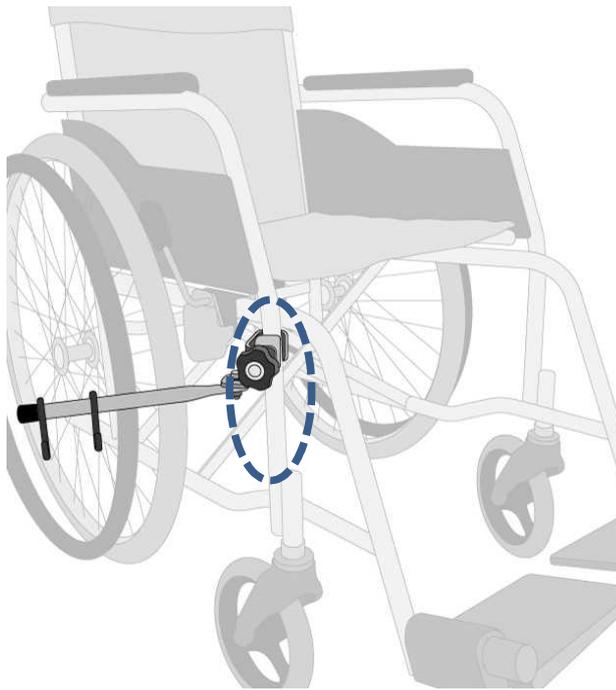


<取付位置>

左図の点線○部分のように、車いすの前輪から肘置きまでの地面に垂直なパイプに本製品を取り付けてください。

- ゆるみがないように、ノブをしっかりと締めてください。
- 車いすの仕様によっては取付部分の形状が左図と異なる
または取付ができない場合があります。
- 取付後は、ご使用になる前に、本製品にドレインバッグを取り付けた状態でドレインバッグが地面に擦らないことをご確認ください。
- 本製品を使用しないときや車いすを折りたたむときは、本製品を取り外すか、邪魔にならないよう本製品の向きを調整してください。思わぬけがや破損の原因となります。

■車いす外側に取り付ける場合

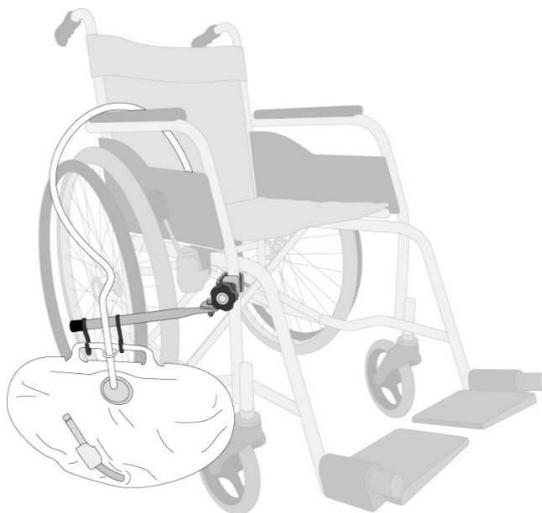

■車いす内側に取り付ける場合



日常のお手入れ

- 清掃する場合は、水につけた布を固くしぼり、汚れ・ほこりなどを拭きとった後に乾いた布で仕上げ拭きをしてください。
- 揮発性剤（シンナー・ベンジン・アルコール類）は使用しないでください。
変色・劣化の原因となります。