

## イエルベンマットレスの取扱について

この度は、イエルベンマットレスのご購入をいただき、誠にありがとうございます。  
末永く、安全にご利用いただくために、下記についてご確認下さい。



### ●ベッドメイキングが容易です。

ベッドに直接敷いてご使用下さい。マットレスの上に敷くものは、シーツのみのご使用をお勧めします。発汗の多い方がご使用になる場合は、吸湿目的でベッドパッドやタオルをご使用下さい。PVC 剤を使用した製品(失禁シーツなど)を直接マットレスに接触して使用した場合、接着する可能性があります。直接のご使用は避けて下さい。また湯たんぽや電気あんか、電気毛布を長時間にわたり使用したとき、マットレス表面が変色する可能性があります。



### ●使用面に決まりはありません。

表・裏・頭・足の4方向の面を使用できます。  
(ソフトユーロフレックスのみ表裏使用です。)  
定期的にマットレスの使用面を交換してご使用下さい。(交換の目安:3~6ヶ月毎)  
2面または4面で、使用面を交換して使用することで、最大限の耐久性を発揮します。



### ●汚染したら、通常は水で拭き取るだけです。

- 1) 表面が汚れた場合は、中性洗剤と水で拭き取ってください。また感染症の方が使用した場合は、アルコール系洗浄剤または逆性石鹼を使用して拭き取ってください。
- 2) また院内のICPプロトコルに基づいた濃度の塩素系消毒剤等で拭き取った場合、消毒剤が残らないよう、よく水拭きしてください。
- 3) 腎臓疾患や癌など特有の疾患の方が使用したとき、マットレスに独特のにおいが付着する場合があります。そのときは、表面をレモン果汁を使用して拭き、そのまま15分放置した後、清潔な布で水拭きして下さい。繰り返し行うことで、においが軽減されます。
- 4) オートクレーブや、紫外線などによる消毒滅菌方法は、避けて下さい。
- 5) マットレス表面は、汚染や破損が目立つように白色を使用しています。薬液や体液の色素によっては、拭き取り洗浄後も着色が残ることがありますが、衛生面には問題ありません。

### ●マットレス表面が傷ついたら、その場で修理できます。



レントックス防水フィルムは、カバー全体を交換する必要はありません。傷ついた部分だけを、レントックステープで補修することができます。  
細菌やバクテリアの侵入を防ぐために、必ず専用のレントックステープを使用してください。マットレスの取扱の際、引きずり行為や鋭利なものへの引っ掛けは厳禁です。  
ピンホールであっても破損を見つけたら、迅速に補修し、衛生的にご使用ください。  
破損した状態のまま使用を継続すると、不衛生だけでなく、レントックス接着面の劣化を招きます。



### ●移動はできるだけ2人で行って下さい。

マットレス表面を覆っているレントックス防水カバーは、鋭利なもので引っ掛けたりした場合、裂けることもあります。また、シーツが滑らないよう摩擦抵抗も大きくしてあります。マットレスの引きずり行為や鋭利なものへの引っ掛けは厳禁です。また保管は必ず直射日光が当たらない屋内とし、物や突起物等置かないでください。