

Dun-Slope Mini

ダンスロープミニ取扱説明書

この製品は、屋内外の小さな段差を解消させ、安全な歩行をサポートするスロープです。

本書に使用しているイラストは、設置方法等をわかりやすくするため、現物とは多少異なることがあります。

●ご使用前に、使用者及び介助者の方は必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。


用途

この製品は、屋内外の小さな段差を解消させ、車いすの走行や軽歩行を安全にサポートするスロープです。それ以外には使用しないでください。

使用方法

① 段差の高さを確認し、段差と同じ高さのスロープを右上の表から選択してください。

② 段差のある場所に隙間を空けずに置いてください。

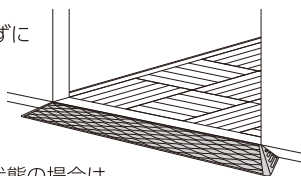


床に固定する場合

スロープと設置面が動きやすい状態の場合は、スロープと設置面を固定してご使用ください。

<固定方法>

- 裏面に両面テープを貼り付けて固定してください。
- 裏面にビスで固定する目印の穴を設けています。裏面の穴からキリで表面まで貫通させ、皿ビスで固定してください。
*両面テープ、皿ビスは付属しておりません。

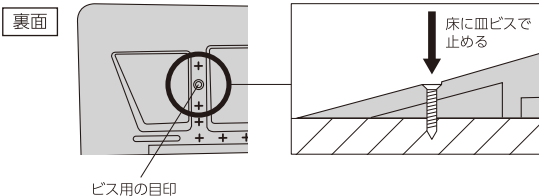

お手入れ方法


定期的にもスロープの表面・底面の汚れ等を落としてください。

- 洗浄は、柔らかい毛先のタワシや布にて、水で洗ってください。熱湯（60℃以上）は使用しないでください。
- 洗浄する場合は、一般家庭用洗剤（中性洗剤）をご使用ください。有機溶剤（シンナーやベンジン）や強アルカリ、強酸などが含まれている洗剤は使用しないでください。
- 消毒する場合は、アルコール消毒剤をご使用ください。

保管方法

汚れを落とし、平置きにして保管してください。立て掛けた場合、スロープの変形などの発生原因になります。直射日光のあたる場所や高温の場所に放置されますと劣化しやすくなりますので避けてください。

仕様

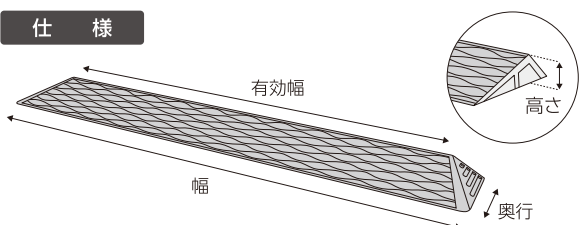

ダンスロープミニ (76cm 幅)

品番	商品名	高さ cm	幅 cm	有効幅 cm	奥行 cm	質量 g	勾配 °
04740	R-7610M	1.0	76	73	4.1	200	14
04741	R-7615M	1.5	76	71	6.1	300	14
04742	R-7620M	2.0	76	69	8.1	600	14
04743	R-7625M	2.5	76	67	10.1	800	14
04744	R-7630M	3.0	76	65	12.1	900	14
04745	R-7635M	3.5	76	68	14.1	1,200	14
04746	R-7640M	4.0	76	66	16.1	1,500	14
04747	R-7645M	4.5	76	64	18.1	1,800	14
04748	R-7650M	5.0	76	62	20.6	3,000	14
04802	R-7655M	5.5	76	62	20.0	2,300	15
04803	R-7660M	6.0	76	62	20.0	2,800	16

*質量については、製品によってバラツキがあります。
*製品仕様及び内容は予告なく変更する場合があります。

素材：塩化ビニル

使用上の注意

警告



- 砂や雪がある場合は、必ず清掃してご使用ください。
- スロープが濡れている状態では使用しないでください。
- 使用者の安定した歩行に支障がある場合は介助者と一緒にご使用ください。
- スロープと設置面を動かないよう固定してご使用ください。また、ガタツキが発生するような場所では使用しないでください。

注意



- 設置場所は平らな固い床面に設置してください。
- ご使用前に傷等の異常がないこと及び砂や異物の付着が無いことを確認してください。
- 直射日光や熱をできるだけ避けてご使用ください。
- 床材の種類によっては、製品からの成分移行等により跡が残る場合があります。
- 製品を折り曲げたり強い衝撃を加えないでください。
- 水が溜まったり水が流れるような場所で使用しないでください。
- 穏やかな車いす歩行とその介助者の歩行程度を想定した設計です。人の飛び跳ねや、本体の落下・転倒などによる衝撃は加えないでください。
- 輸送状態などにより、製品の変形が起こる場合があります。元に戻るまで平らな場所に放置してください。
- 陽のあたる場所で長期間使用されますと色が変わる場合がありますが、製品の使用上問題はありませぬ。

警告 死亡または重傷などを負う可能性を意味します。

注意 障害を負うまたは物的損害を発生させる可能性を意味します。

住友ゴム工業株式会社

販売元 株式会社 **タンロッツ・ホームフロタクト**

問い合わせ先

〒541-0059 大阪市中央区博労町4-6-10

TEL.06-6120-7323

<http://www.dhp-dunlop.co.jp>