




ヴィスコフロート 低反発シートクッション 取扱説明書

この度はヴィスコフロート低反発シートクッションをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ヴィスコフロート低反発シートクッションは、腰と臀部の負担を軽減するために作られたクッションです。車いす用のクッションとして最適なクッションです。カバーは超撥水加工が施されており、更に制菌加工の施された新開発生地を使用しています。中材は日本製低反発ウレタンフォームを使用しておりますので、体圧分散に優れ、尚且つ通気性も良いので、長時間座って疲れを軽減できるクッションです。

☆ご使用上の注意☆

- ・ウレタンフォームの性質上、温度により硬さが多少変化します。温度が下がるとやや硬く、温度が上がるとやや柔らかくなる傾向がありますが、素材自体の特質ですのでご安心下さい。
- ・カバーに使われています生地は超撥水加工が施されています。長く使いますとその超撥水加工が落ちてきます。その場合は乾燥機にかけますと撥水度が戻ります。
- ・品質の劣化につながる恐れがあるため、極端に高温、もしくは低温の場所に長時間放置しないで下さい。
- ・ウレタンフォーム劣化防止のため、天日干しは避けて下さい。日光によりすぐに劣化することはありませんが、できるだけ風通しのよいところで、陰干しして下さい。
- ・本体を折り畳んだり、ねじったり、叩いたりしないで下さい。裂けやすくなります。
- ・ご使用の際は必ずカバーをつけた状態で使用し、ファスナーの留め金部分はしっかり留めて下さい。
- ・カバーのファスナー開閉の際は、中の生地を引っ掛けないようご注意ください。
- ・万一、ご使用中に違和感や苦痛などが生じた際は、速やかにご使用をおやめ下さい。
- ・フォームは変色しますが、物性・性能が落ちることはありません。
- ・ウレタンフォームを口に入れないで下さい。
- ・ウレタンフォームは洗濯しないで下さい。カバーだけを本体から取り外して洗うことができます。(ウレタンフォームに大量の水が吸収されるとなかなか乾きません。乾燥しないうちに使用されると、ウレタンフォームが裂けやすくなります。)

* カバーの洗濯の際には下記の注意をお守り下さい。

	・液温は30℃を限度とし、洗濯機で非常に弱い洗濯ができる
	・塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止
	・底面温度110℃を限度としてアイロン仕上げができる

* カバーは洗濯の際、若干色落ちする場合がありますので他の衣類と一緒に洗濯しないで下さい。

* カバーの洗濯の際に乾燥機の使用はOKです。

◎ ウレタンフォーム本体は家庭用洗濯機では洗えませんが、特殊なクリーニング機械で水洗いする事ができるようになりました。詳細は下記の株マルゼンまでお問い合わせ下さい。

☆仕様☆

- ・サイズ:幅40x縦40x厚さ5cm
- ・重量:約)1085g
- ・素材【本体】モールド型低反発ウレタンフォーム
【カバー】ポリエステル100% 制菌加工 超撥水加工
日本製

株式会社 マルゼン

<http://www.k-maruzen.com>

〒321-0911 栃木県宇都宮市問屋町 3413-51 TEL:028-656-3636 FAX:028-656-3637