

## マイクロニードルポート穿刺トレーニングモデル

### CVP-S 取扱説明書

このたびは、マイクロニードルポート穿刺トレーニングモデルをご購入いただきまして、まことにありがとうございます。

当製品を安全かつ末永くお使いいただくために、当取扱説明書のご一読を宜しくお願いいたします。

#### 1) 内容物

当製品は、胸部石膏モデルと皮膚シート等からなります。マイクロニードルポート穿刺のトレーニングに必要なポートや、ヒューバー針、シリンジ等は別途お客様にてご用意頂く必要がございます。



#### ○製品に含まれているもの

- ・胸部石膏モデル    1個
- ・皮膚シート          1枚
- ・液体用タンク        1個
- ・プラスチック収納ケース   1個



液体用タンク



プラスチック収納ケース



#### ○製品に含まれていないもの

- ・ポート、ヒューバー針、シリンジ等

## 2) ご使用手順

- 2-1) ポートを胸部石膏モデルの窪み（2箇所の内どちらを使用しても可）にセットし、溝にカテーテルを通します。
- 2-2) 皮膚シートを上からかぶせます。
- 2-3) カテーテルの先端を液体の入った容器の中に入れます。



- 2-4) ヒューバー針を、ポートに対して垂直になるように刺します。
- 2-5) ヒューバー針のチューブに液体の入ったシリンジを繋げプランジャーを押します。カテーテル内の空気が押し出され、液体で満たされます。
- 2-6) プランジャーを引くことでバックフロー、押すことでフラッシュの確認ができます。
- (※) プランジャーを引く際は、初め少し抵抗があります。
- 2-7) ご使用後は、カテーテル内に残っている水を、排出してから保管してください。



## 3) ご使用上の注意

- 3-1) 本製品の推奨ポートは日本コヴィディエン株式会社製です。それ以外のポートをお使いになる場合、胸部石膏の溝にポートがはまらない可能性があります。
- 3-2) 直射日光や、高温多湿な環境下での長期保管は変形、変色することがありますのでご注意ください。
- 3-3) 煮沸や高温のお湯（60℃以上）に付けたり、火気を近づけたりしないで下さい。
- 3-4) 汚れた場合には、エタノールなどのアルコール類で拭きとって下さい。
- (※) シンナー、クロロホルムなどの有機溶剤、酸性薬品、アルカリ薬品の使用は禁止です。
- 3-5) 液体に模擬血液を使用した場合、長期間製品内に残留していると凝固するおそれがありますので、洗浄してから保管してください。
- 3-6) 本商品は改良のため、予告なしに仕様変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。