

取扱上のご注意、保管について

- ◎表面を爪で引っ掻くと傷になる場合があります。
 - ◎メイクをしたまま長期保存すると、色素が沈着する恐れがありますので化粧料を十分に拭きとってから保管してください。
 - ◎メイクの反復練習を可能にする特殊コーティングが施されておりますが、クリーム系ファンデーション、リキッド系ファンデーションをお使いいただく際は、事前にメーキャップベースとして適当なミネラルオイルをマスク表面に塗布すると、ファンデーションの伸びと馴染みが良くなり、より使いやすくなります。
 - ◎化粧料を落とす際にはクレンジングオイルや洗顔せっけんなどを使用し、刺激性の強い薬品などの使用はお止めください。またたわしや歯ブラシなど硬いブラシ類での擦り洗いも表面を傷つけてしまう原因となりますのでお止めください。
 - ◎無理な荷重をかけたり、落とすと破損の恐れがありますので、ご注意ください。
 - ◎目的以外の使用、分解や改造などの行為は行わないでください。
 - ◎油性のマジックやサインペンなどは色が沈着することがあります。使用しないでください。
 - ◎直射日光や、高温多湿な環境下での長期保管は変形、変色することがありますのでご注意ください。
 - ◎煮沸や高温のお湯（60℃以上）に付けたり、火気を近づけたりしないで下さい。
 - ◎汚れた場合には、エタノールなどのアルコール類で拭きとって下さい。
- ※シンナー、クロロホルムなどの有機溶剤、酸性薬品、アルカリ薬品の使用は禁止です。

* お問い合わせは、お電話または弊社サイトのお問い合わせフォームから承っております。

製造元

株式会社 **レジーナ**

(2021.7版)

本 社 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-10-2
TEL.048(837)2600(営) FAX.048(837)0099
工 場 〒019-1402 秋田県仙北郡美郷町野中下村107-2
TEL.0187(84)1516(代) FAX.0187(84)0591
URL. <https://www.bioskin.jp>

バイオスキンメイクモデル

BMK-70 … エンゼルメイクモデル

BMK-300 … メディカルメイクモデル

取扱説明書

■内容物

内容物をご確認ください。

- (1) メイクモデル (BMKシリーズ) … 1個
- (2) 取扱説明書 (本紙) … 1枚

はじめに

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

商品を末永く、安全にお使いいただけるようご使用前には必ず本説明書をお読みください。

Regina Fashion Supply Co.,Ltd.