

〔保守〕

- ・洗濯はできません。

	家庭での洗濯禁止
	ドライクリーニング禁止
	ウエットクリーニング禁止

- ・汚れた場合は、柔らかい布に中性洗剤等をわずかにしめらせて拭き取り、清浄性を維持するようにしてください。
- ・消毒液等をご使用の場合は、各消毒剤の使用法や注意事項をよくお読みの上、ご使用ください。
 - ・ 清拭ができます。
 - ・ 消毒、除菌には第四級アンモニウム塩等の使用が可能です。
- ・よく乾燥した状態で保存してください。

〔保管方法〕

- ・水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管してください。

〔耐用年数〕

- ・使用頻度によって異なります。ご購入の販売店へお問合せ下さい。

〔製造販売〕

株式会社 丸井商事／ラクデス ホームページ <http://www.rakudes.com/>

本 社 〒424-0045 静岡県静岡市清水区東大曲町 4-18

TEL 054-366-1612 FAX 054-366-1738



RAKUDES®

あた丸
取扱説明書

あた丸 取扱説明書

- ・この度は、「あた丸」をお買い求めいただき、ありがとうございます。
- ・ご使用になる前に、この「取扱説明書」をよくお読みになって、正しくお使いください。
- ・この取扱説明書は、必要なときにいつでも取り出せるよう大切に保管してください。

〔製品概要〕

仰臥位時、頭部を耳の辺りまで支えることができ、安定した頭の姿勢維持が可能です。周辺機器や備品などとの干渉が最小に抑えられるようコンパクトに設計されており、また嘔吐への対応もできる形状です。

あた丸 (RP-AT)

本体



(付属品)
滑り止め



〔仕様〕

本体

サイズ	12 × 22 × 27 cm
生地	合成レザー 100%
中素材	ビーズ、ウレタン
色	ブルー色

滑り止め

サイズ	15 × 15 cm
材質	塩化ビニール (発泡体) ポリエステル (ネット)
色	黒

〔用途〕

「あた丸」は、頭部の姿勢保持に使用するポジショニング枕です。

〔安全にお使いいただくために〕

<危険>

- ・本品と火気を近づけないでください。火傷や火災の原因となる可能性があります。

<警告>

- ・設置に際しては、呼吸の妨げになるような配置にならないよう十分注意してください。
- ・本品は姿勢保持具です。姿勢保持以外の用途にはご使用にならないでください。

<ご使用上の注意>


- ・家庭でご使用の場合は、医師、看護師、介護支援専門員などの専門家とご相談の上、正しく使用してください。
- ・無理な体位でのご使用は避けてください。
- ・ご使用の際、落下・転落に注意してください。
- ・本品の使用によって身体に安定感が得られなかったり異常を感じたりした場合は、直ちに使用を中止してください。

- ・本品を鋭利なものでキズを付けると、中素材が、外に出てしまう可能性があります。中素材が出てしまった時は、ご使用をやめてください。

〔使用方法〕

本品の中素材は、流動性がありながら押せば安定する特殊開発素材（*1）からなっており、頭部から耳の辺りまでをできるだけ隙間なく支えることにより、より良い安定が得られます。

必要に応じて、本体の下に滑り止めをセットしていただくと位置ずれの防止に効果が得られます。

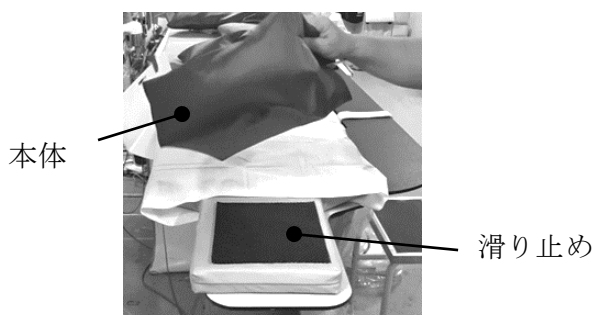

*1：特殊開発素材

ナジーム（ウレタンカット）＋ビーズ

【特許登録第 5762727 号】

<使用例>

本品「あた丸」は主として仰臥位での姿勢保持に使用する頭部用枕です。弊社「ラディ丸（医療機器届出番号 22B3X10013000001）」の使用時に、下肢用ポジショニングクッション「あし丸」や「ひざ丸」などと組み合わせて使用することで、より安楽で安定した姿勢を維持することができます。

