

〔保守〕

- ・ ご使用後は汚れを落とし、乾燥した状態で室温保管してください（消毒用クロスで汚れをふき取る）。

〔保管方法〕

- ・ 水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管してください。

〔耐用年数〕

- ・ 使用頻度によって異なります。ご購入の販売店へお問合せ下さい。

〔製造販売〕

株式会社 丸井商事／ラクデス ホームページ <http://www.rakudes.com/>

本 社 〒424-0045 静岡県静岡市清水区東大曲町 4-18

TEL 054-366-1612 FAX 054-366-1738



RAKUDES®


ひざ丸
取扱説明書

ひざ丸 取扱説明書

- ・この度は、「ひざ丸」をお買い求めいただき、ありがとうございます。
- ・ご使用になる前に、この「取扱説明書」をよくお読みになって、正しくお使いください。
- ・この取扱説明書は、必要なときにいつでも取り出せるよう大切に保管してください。

〔製品概要〕

仰臥位時、下肢にスムーズにセットでき、腰部～下肢にかけて安定が得られます。狭い手術用ベッドの上でのポジショニングにも有用です。

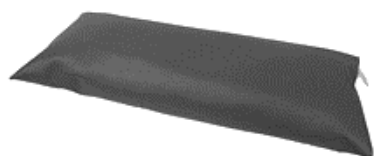

ひざ丸 (RP-HZ)

〔仕様〕

サイズ	8 × 23 × 58 cm
生地	合成レザー 100%
中素材	ビーズ、ウレタン
色	ブルー色

〔用途〕

「ひざ丸」は、仰臥位における腰部～下肢の姿勢保持に使用するポジショニングクッションです。

〔安全にお使いいただくために〕

<危険>

- ・本品と火気を近づけないでください。火傷や火災の原因となる可能性があります。

<警告>

- ・本品は姿勢保持具です。姿勢保持以外の用途には使用しないでください。

<ご使用上の注意>

- ・家庭でご使用の場合は、医師、看護師、介護支援専門員などの専門家とご相談の上、正しく使用してください。
- ・無理な体位でのご使用は避けてください。
- ・ご使用の際、落下・転落に注意してください。
- ・本品の使用によって身体に安定感が得られなかったり異常を感じたりした場合は、直ちに使用を中止してください。
- ・本品を鋭利なものでキズを付けると、中素材が、外に出てしまう可能性があります。中素材が出てしまった時は、ご使用をやめてください。

〔使用例〕

＜使用例 1＞

仰臥位時、下肢にセットすることで、腰部～下肢にかけての姿勢を安定化（*1）させます。



*1：特殊開発素材

ナジーム（ウレタンカット）＋ビーズ

【特許登録第 5762727 号】

＜使用例 2＞

本品「ひざ丸」は主として腰部～下肢の姿勢保持に使用するポジショニングクッションです。弊社「ラディ丸（医療機器届出番号 22B3X10013000001）」の使用時に、より安楽で安定した姿勢を維持するために、頭部に頭部用枕「あた丸」を使用し、下肢に本品「ひざ丸」と弊社足用ポジショニングクッション「あし丸」とを組み合わせセットした使用例です。

