



RAK UDES®

ミ二丸
取扱説明書

ミニ丸 取扱説明書

- ・この度は、「ミニ丸」をお買い求めいただき、ありがとうございます。
- ・ご使用になる前に、この「取扱説明書」をよくお読みになって、正しくお使いください。
- ・この取扱説明書は、必要なときにいつでも取り出せるよう大切に保管してください。

〔製品概要〕



ミニ丸 (RP-MN)

〔仕様〕

サイズ	5 × 14 × 17 cm
生地	合成レザー 100%
中素材	ビーズ、ウレタン
色	ブルー色

〔用途〕

- ・ミニ丸は、肘を支え腕の姿勢保持の補助に使用するポジショニングクッションです。

〔安全にお使いいただくために〕

<危険>

- ・本品と火気を近づけないで下さい。火傷や火災の原因となる可能性があります。

<警告>

- ・本品は姿勢保持具です。姿勢保持以外の用途にはご使用にならないで下さい。

<ご使用上の注意>

- ・本品を鋭利なものでキズを付けると、中素材が、外に出てしまう可能性があります。中素材が出てしまった時は、ご使用をやめてください。

〔使用方法〕

<使用例>



- ・採血の際に、補助的に肘を支え、腕を安定化(*1)させるクッションとしても使用することができます。

*1：特殊開発素材

ナジーム (ウレタンカット) + ビーズ

【特許登録第 5762727 号】

〔保守〕

- ・ご使用後は汚れを落とし、乾燥した状態で室温保管してください（消毒用クロスで汚れをふき取る）。

〔保管方法〕

- ・水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管してください。

〔耐用年数〕

- ・使用頻度によって異なります。ご購入の販売店へお問合せ下さい。

〔製造販売〕

株式会社 丸井商事／ラクデス ホームページ <http://www.rakudes.com/>

本 社 〒424-0045 静岡県静岡市清水区東大曲町 4-18

TEL:054-366-1612 FAX:054-366-1738