

## 〔洗い方〕

洗濯での丸洗い・乾燥ができます。

	・液温は 95°Cを限度とし、洗濯機で洗濯ができる
	・日陰の平干しがよい
	・塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止
	・アイロン仕上げ禁止
	・ドライクリーニング禁止

### <洗濯>

- ・中性洗剤を使用し、水温 95°C以下で洗濯してください。
- ・本品の損傷を防ぐため、洗濯ネットをご使用ください。
- ・洗濯槽に入らない場合は、手で押し洗いを行ってください。

### <乾燥>

- ・洗濯後は水気を除去し、風通しの良い場所で陰干ししてください。
- ・乾燥機を使用する場合は、100°C以下で乾燥してください。

### <注意>

- ・漂白剤や柔軟仕上げ剤は使用できません。
- ・繰り返しの洗濯により表皮生地が縮み、触感が変わる場合があります。
- ・アイロンは、使用しないでください。中素材の形状、触感が変わる可能性があります。

### <オートクレーブ>

- ・オートクレーブは 105°Cまで可能です。

## 〔保管方法〕

- ・洗濯後は十分に乾燥してください。
- ・水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管してください。

## 〔耐用年数〕

- ・使用頻度によって異なります。ご購入の販売店へお問合せ下さい。

## 〔製造販売〕

株式会社 丸井商事／ラクデス ホームページ <http://www.rakudes.com/>  
本 社 〒424-0045 静岡県静岡市清水区東大曲町 4-18  
TEL 054-366-1612 FAX 054-366-1738



RAK UDES®

あし丸  
取扱説明書

## あし丸 取扱説明書

- ・この度は、「あし丸」をお買い求めいただき、ありがとうございます。
- ・ご使用になる前に、この「取扱説明書」をよくお読みになって、正しくお使いください。
- ・この取扱説明書は、必要なときにいつでも取り出せるよう大切に保管してください。

### 〔製品概要〕

仰臥位時、両足の下に本品を敷くことで下肢の安楽な姿勢を維持することができます。本品に設けられたスリットにより足の内外側が支えられ、姿勢が安定します。また適度なクッション性と良好なフィット性により下肢への圧迫が分散され、褥瘡予防をサポートします。



あし丸 (RP-AS)

### 〔仕様〕

サイズ	7×53×56 cm
表生地	ポリエステル 65% 綿 35%
裏生地	ポリプロピレン 100%
中素材	ビーズ、ウレタン
色	ブルー色

### 〔用途〕

「あし丸」は、下肢の姿勢保持に使用する足用ポジショニングクッションです。

### 〔安全にお使いいただくために〕

#### <危険>

- ・本品と火気を近づけないでください。火傷や火災の原因となる可能性があります。

#### <警告>


- ・設置に際しては、呼吸の妨げになるような配置にならないよう十分注意してください。
- ・本品は姿勢保持具です。姿勢保持以外の用途にはご使用にならないでください。

#### <ご使用上の注意>

- ・家庭でご使用の場合は、医師、看護師、介護支援専門員などの専門家とご相談の上、正しく使用してください。
- ・無理な体位でのご使用は避けてください。
- ・ご使用の際、落下・転落に注意してください。
- ・本品の使用によって身体に安定感が得られなかったり異常を感じたりした場合は、直ちに使用を中止してください。
- ・本品を鋭利なものでキズを付けると、中素材が、外に出てしまう可能性があります。中素材が出てしまった時は、ご使用をやめてください。

## 〔使用方法〕

本品の中素材は、流動性がありながら押せば安定する特殊開発素材（\*1）からなっており、上向き寝の姿勢で下肢を支えることができます。スリットに大腿～下腿を乗せ、内外側を支えます。

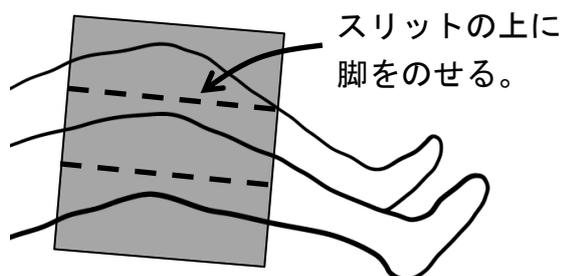

\*1：特殊開発素材 ナジーム（ウレタンカット）＋ビーズ  
【特許登録第 5762727 号】

### ＜使用例 1＞

1枚の使用で坐骨手前から膝下までがサポートできます。

また、2枚セットで使用していただければ坐骨手前から下肢全体をサポートできます。

2枚セットでのご使用がおすすめです。



### ＜使用例 2＞

本品「あし丸」は主として下肢の姿勢保持に使用する足用ポジショニングクッションです。弊社「ラディ丸（医療機器届出番号 22B3X10013000001）」の使用時に、頭部用枕「あた丸」や下肢用ポジショニングクッション「ひざ丸」などと組み合わせて使用することで、より安楽で安定した姿勢を維持することができます。

